

NÁVOD K POUŽITÍ



STOLEK K LŮŽKU DIFFUSION

421 400, 421 414, 421 300, 421 314



CE

NÁVOD K POUŽITÍ



STOLEK K LŮŽKU DIFFUSION

421 400, 421 414, 421 300, 421 314



CE


Použití:

Polohovací pojízdný stůl DIFFUSION je určen jako vybavení k nemocničním nebo rehabilitačním postelím. Slouží především k servírování stravy u ležících pacientů, ale také pro čtení nebo jako odkládací stůl. Lze výškově polohovat a horní desku lze naklápět. Pojezdová kolečka jsou vybavená brzdou. Všechny díly stolu jsou vyrobeny z omyvatelných materiálů.

Specifikace:

Code	Item	A	B x F	C	D x H	E	G	I	Tloušťka desky	Hmotnost	Nosnost
4213**	Diffusion 80 cm	15°	40 x 80 cm	0°<90°	44 x 57 cm	61/94 cm	53,5 cm	10 cm	16 mm	9 kg	10 kg
4214**	Diffusion 60 cm		40 x 60 cm							8 kg	

Colours

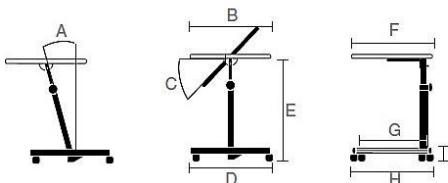

Popis:

Stůl se skládá z ocelové konstrukce a laminované desky s okrajem z PVC, který zabraňuje sklouzávání předmětů ze stolu. Konstrukce stolu umožňuje následující nastavení:

- výška: v rozmezí od 61 cm do 94 cm - plynulá regulace pomocí aretačního šroubu, teleskopický mechanismus;
- úhel sklonu základny: 3 pozice (vertikální 90°, 80°, a složená) – regulace pomocí páčky s aretačním kolíkem – blokáce ve vybraném otvoru konstrukce;
- úhel sklonu pracovní desky: – 8 poloh – regulace pomocí páčky s kolíkem.

Stůl DIFFUSION je vybaven čtyřmi kolečky, které umožňují zajet pod postel. Dva kolečka jsou opatřena brzdou. Minimální prostor pod postelí pro volný pohyb stolu je 10 cm.

Údržba:

Stůl je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem s použitím šetrných čistících prostředků a následně důkladně osušit. K čištění nepoužívat přípravky s obsahem chloru a abrazivní čistící prostředky způsobující mechanické narušení povrchu.

Záruka:

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakékoliv úpravě, opravě, nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

Datum vytvoření návodu: 25.1.2012

Vyrobeno: HERDEGEN, Francie

Distributor: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz




Použití:

Polohovací pojízdný stůl DIFFUSION je určen jako vybavení k nemocničním nebo rehabilitačním postelím. Slouží především k servírování stravy u ležících pacientů, ale také pro čtení nebo jako odkládací stůl. Lze výškově polohovat a horní desku lze naklápět. Pojezdová kolečka jsou vybavená brzdou. Všechny díly stolu jsou vyrobeny z omyvatelných materiálů.

Specifikace:

Code	Item	A	B x F	C	D x H	E	G	I	Tloušťka desky	Hmotnost	Nosnost
4213**	Diffusion 80 cm	15°	40 x 80 cm	0°<90°	44 x 57 cm	61/94 cm	53,5 cm	10 cm	16 mm	9 kg	10 kg
4214**	Diffusion 60 cm		40 x 60 cm							8 kg	

Colours

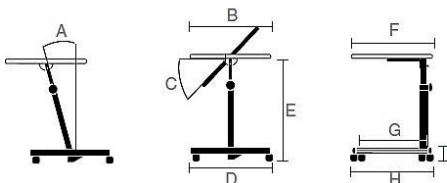

Popis:

Stůl se skládá z ocelové konstrukce a laminované desky s okrajem z PVC, který zabraňuje sklouzávání předmětů ze stolu. Konstrukce stolu umožňuje následující nastavení:

- výška: v rozmezí od 61 cm do 94 cm - plynulá regulace pomocí aretačního šroubu, teleskopický mechanismus;
- úhel sklonu základny: 3 pozice (vertikální 90°, 80°, a složená) – regulace pomocí páčky s aretačním kolíkem – blokáce ve vybraném otvoru konstrukce;
- úhel sklonu pracovní desky: – 8 poloh – regulace pomocí páčky s kolíkem.

Stůl DIFFUSION je vybaven čtyřmi kolečky, které umožňují zajet pod postel. Dva kolečka jsou opatřena brzdou. Minimální prostor pod postelí pro volný pohyb stolu je 10 cm.

Údržba:

Stůl je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem s použitím šetrných čistících prostředků a následně důkladně osušit. K čištění nepoužívat přípravky s obsahem chloru a abrazivní čistící prostředky způsobující mechanické narušení povrchu.

Záruka:

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakékoliv úpravě, opravě, nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

Datum vytvoření návodu: 25.1.2012

Vyrobeno: HERDEGEN, Francie

Distributor: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz

