

NÁVOD K POUŽITÍ

RAMPA NÁJEZDOVÁ TELESKOPICKÁ

MR 107



CE

POUŽITÍ

Nájezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší schodišťové nebo jiné výškové bariéry a usnadňují tak např. naložení mechanického a elektrického vozíku nebo skútru do auta.

POPIS

Lehká a skladná teleskopická dvoudílná duralová konstrukce je vybavena protiskluzovým povrchem a umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka rozložené rampy: 200 cm

Délka složené rampy: 105,5 cm

Celková šířka: 20,9 cm

Vnitřní šířka: 18,1 cm

Výška: 4,8 cm

Hmotnost: 2 x 5,1 kg

Nosnost: 250 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním ramp si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s rampou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.


Nepřekračujte maximální nosnost ramp 250 kg.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny díly rampy.

ROZLOŽENÍ A INSTALACE RAMPY:

Pro rozložení rampy zamáčkněte aretační pojistku (A) a vysuňte zvolený díl do plné délky, až pojistka sama opět zapadne. Při skládání postupujte opačně. Rozložené rampy umístěte zkosenou částí nahoru a ujistěte se, že jsou položeny stabilně.

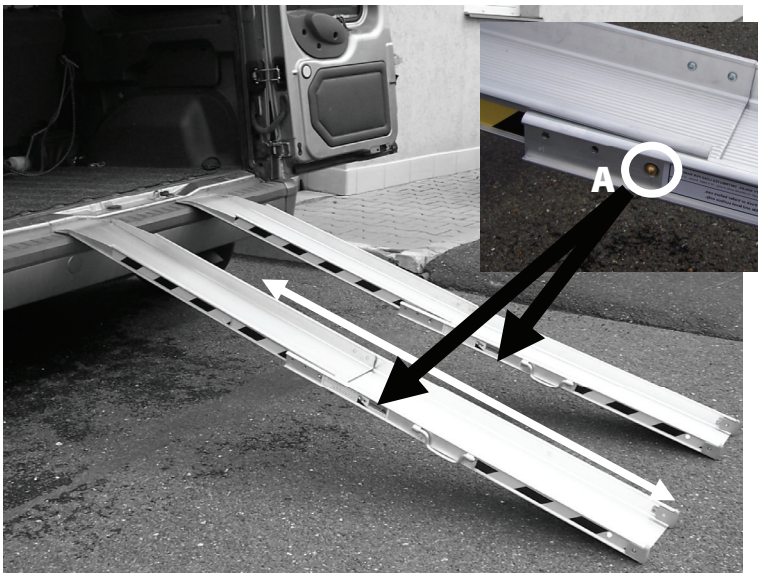

ÚDRŽBA

Rampy lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jistících prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.