

NÁVOD K POUŽITÍ

KŘESLO KLOZETOVÉ

513, 513 S



CE

POUŽITÍ

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Rám křesla je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti. Je doplněn, omyvatelným polstrovaným toaletním sedátkem, polstrovanou sedací deskou, opěrkou zad a plastovou toaletní nádobou (ACC 5G). Boční pevná madla mají pohodlné polstrované područky. Opěrné nohy jsou výškově nastavitelné a jsou opatřeny protiskluzovými pryžovými nástavci. Model 513 S má navíc odnímatelné postranice.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka křesla: 61 cm

Délka křesla: 53 cm

Výška křesla: 81-91 cm

Šířka sedu: 45 cm

Hloubka sedu: 42 cm

Výška prkénka: 48-58 cm

Výška sedáku: 52-62 cm

Hmotnost křesla: 9 kg

Nosnost: 120 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 125 kg.

Při nastavování výšky křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s podkladem.

Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám s opěrnými nohami, opěrkou zad a područkami, polstrovaný sedák a plastovou hygienickou nádobu ACC/5G.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ KŘESLA

Pro nastavení výšky křesla vyjměte aretační „E“ pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Ve zvolené poloze pojistku zasuněte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.



Umístění aretačních pojistek

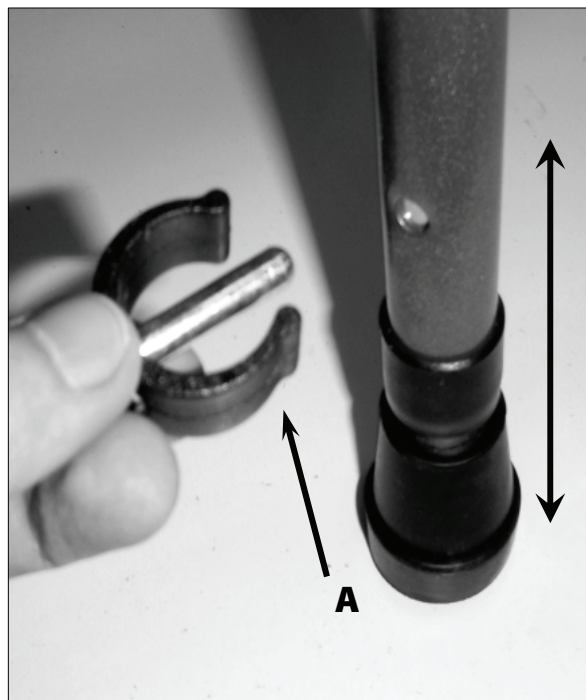

Aretační „E“ pojistka

MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU A PODRUČKOU

Pro použití křesla sundejte polstrovaný sedák a odstraňte víko plastové nádoby. Nádoby pak lze vysunout z držáků pod hygienickým prkénkem do pravé nebo levé strany. U modelu 513S lze tahem nahoru velmi jednoduše vysunout područku pro lepší nasedání.



Vysunutí/zasunutí plastové nádoby



Vysunutí područky (513 S)

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.