

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

KŘESLA KOMBINOVANÁ



*Křeslo kombinované pojízdné
typ:*

**588 FTB
4140
4141
4146**



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

KŘESLA KOMBINOVANÁ



*Křeslo kombinované pojízdné
typ:*

**588 FTB
4140
4141
4146**



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Kombinovaná křesla tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu a standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám křesla je vyroben z povrchově upravených ocelových nebo duralových (pouze typ 4140) trubek vysoké pevnosti, doplněn plastovou hygienickou deskou, omyvatelným polstrovaným sedátkem, polstrovanou opěrkou zad, plastovou toaletní nádobou s víkem nebo bez víka (588 FTB a 4141), podnožkami (pouze typ 588 FTB, 4140 a 4146), hrazdičkou nebo madly pro tlačení, držákem toaletního papíru a láhve (pouze typ 588 FTB) . Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou opatřena nášlapnou brzdou. Boční odklopná madla jsou chráněna pohodlnými polstrovanými područkami.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška sedu (cm)	Celková šířka (cm)	Max. zatížení (kg)
588 FTB	45	50	190
4140	53	62	130
4141	48	50	160
4146	48	55	160

Po odklopení nebo sejmutí vrchního polstrovaného sedátka odstraňte víko toaletní nádoby, čímž je křeslo připraveno k běžnému užívání jako klozetové křeslo. Toaletní nádoby po použití lze vyjmout po odklopení plastového toaletního sedátka nebo vysunutím (typ 588 FTB) směrem dozadu. Kombinovaná křesla jsou ve svém standardním provedení vybavena odklopnými madly. Přímým tahem směrem nahoru lze tato madla jednotlivě odklopit tak, aby žádným způsobem nebránila při přesunu uživatele. Model kombinovaného křesla 588 FTB, 4140 a 4146, je vybaven jednoduchou odklopnou podnožkou. Přímým tahem směrem nahoru lze a podnožku odklopit tak, aby nebránila při přesunu uživatele. K zabezpečení stability křesel v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány sešlápnutím přítlačné páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobený zablokováním zadních koleček proti pohybu.

ÚDRŽBA : Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pro zachování maximální stability a dlouhé životnosti křesla pravidelně kontrolujte polohu všech jisticích prvků a po použití jako sprchové křeslo nechte jednotlivé části křesla vyschnout.

VAROVÁNÍ : Při nasedání a vysedání musí být křeslo řádně zabrzděno !
Pozor při manipulaci - sedací plocha velice trpí při rychlém dosedání !!

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Kombinovaná křesla tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu a standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám křesla je vyroben z povrchově upravených ocelových nebo duralových (pouze typ 4140) trubek vysoké pevnosti, doplněn plastovou hygienickou deskou, omyvatelným polstrovaným sedátkem, polstrovanou opěrkou zad, plastovou toaletní nádobou s víkem nebo bez víka (588 FTB a 4141), podnožkami (pouze typ 588 FTB, 4140 a 4146), hrazdičkou nebo madly pro tlačení, držákem toaletního papíru a láhve (pouze typ 588 FTB) . Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou opatřena nášlapnou brzdou. Boční odklopná madla jsou chráněna pohodlnými polstrovanými područkami.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška sedu (cm)	Celková šířka (cm)	Max. zatížení (kg)
588 FTB	45	50	190
4140	53	62	130
4141	48	50	160
4146	48	55	160

Po odklopení nebo sejmutí vrchního polstrovaného sedátka odstraňte víko toaletní nádoby, čímž je křeslo připraveno k běžnému užívání jako klozetové křeslo. Toaletní nádoby po použití lze vyjmout po odklopení plastového toaletního sedátka nebo vysunutím (typ 588 FTB) směrem dozadu. Kombinovaná křesla jsou ve svém standardním provedení vybavena odklopnými madly. Přímým tahem směrem nahoru lze tato madla jednotlivě odklopit tak, aby žádným způsobem nebránila při přesunu uživatele. Model kombinovaného křesla 588 FTB, 4140 a 4146, je vybaven jednoduchou odklopnou podnožkou. Přímým tahem směrem nahoru lze a podnožku odklopit tak, aby nebránila při přesunu uživatele. K zabezpečení stability křesel v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány sešlápnutím přítlačné páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobený zablokováním zadních koleček proti pohybu.

ÚDRŽBA : Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pro zachování maximální stability a dlouhé životnosti křesla pravidelně kontrolujte polohu všech jisticích prvků a po použití jako sprchové křeslo nechte jednotlivé části křesla vyschnout.

VAROVÁNÍ : Při nasedání a vysedání musí být křeslo řádně zabrzděno !
Pozor při manipulaci - sedací plocha velice trpí při rychlém dosedání !!

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.