




NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÉ CHODÍTKO

Zb. č. 11992100



 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00
 (03) 747 19 18
 koval@koval.si

Informace před použitím výrobku / fungování zdravotních výrobků

Vážení kupující,

blahopřejeme vám k zakoupení zdravotnického výrobku Koval. Vezměte prosím na vědomí následující body:

1. Přečtěte si pozorně přiložený návod k použití.
2. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití.
3. Výrobek smí ovládat pouze personál, který je obeznámen s jeho fungováním.
4. Údržbu, jakož i bezpečnostní a technickou kontrolu smí provádět pouze společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval.
5. Montáž, rozšíření, revizi nebo opravy smí provádět pouze společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval.

V případě jakýchkoli technických zásahů do výrobku ve smyslu doplnění nebo revizí, které neprovede společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval, se ruší jakákoliv záruka ve vztahu k těmto revizím, jakož i ve vztahu k výrobku a jeho funkcím.

Preventivní opatření

Přečtěte si pozorně přiložený návod k použití. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití.


Řiďte se pokyny uvedenými pod nadpisem „VAROVÁNÍ“.

Účel použití

Toto chodítko se používá jako podpora pacientů při chůzi.

Předpisy a normy

Při používání chodítka se musí dodržovat veškeré platné předpisy a normy, které se na takovéto použití vztahují.

 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00
 (03) 747 19 18
 koval@koval.si

Značka CE

Značka CE odkazuje na směrnici 93/42 / EHS pro zdravotní výrobky.

Odpovědnost a záruka

Výrobce produktu odpovídá za bezpečnost a spolehlivost výrobku, pouze pokud:


- A. se výrobek používá výhradně ke stanovenému účelu použití.
- B. se provádí pravidelné kontroly funkčnosti.

Poškození při přepravě

Při dodání zkontrolujte, zda není výrobek nebo obal jakýmkoli způsobem poškozen. V této souvislosti pamatujte na lhůty pro ohlášení škod: je stanovena 2denní lhůta pro viditelné škody a 7denní lhůta pro skrytá poškození.

Sériové číslo

Typové označení chodítka Koval se nachází na spodním rámu. V případě dotazů uveďte sériové číslo chodítka.

 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00
 (03) 747 19 18
 koval@koval.si

Obrázky výrobky

Položka 1: Ruční souprava pro nastavení výšky



Položka 2:

Obrázek chodítka s rukojetmi


Nastavitelné rukojeti od 21 cm do 29 cm



PVC šroub pro
nastavení šířky –
od 35 cm do 54 cm

Připojitelné páčky k rukojetím

Elektrický pohon

 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00
 (03) 747 19 18
 koval@koval.si

Elektrický pohon

Třída ochrany: IPX 6

Typ zatížení: Tlačení

Nosnost: 1500 N

Rychlost 22,5 mm/s

Délka potažení: 402 mm

Instalační rozměr: 575 mm

Napětí 24V




Položka 3: Řídící jednotka s vestavěnou baterií




Třída ochrany: IPX4

Pracovní cyklus: Max. 10% nebo 2 min. nepřetržitého používání, pak 18 minut bez použití

Tlačítko nouzové zastavení

 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00

 (03) 747 19 18

 koval@koval.si

Řídící jednotka má dva LED indikátory, zelený a žlutý. Pokud svítí zelené světlo, baterie je nabitá a pokud svítí žluté světlo, je třeba baterii dobít. Závěrečný signál je zvukový - zvuk bzučáku. Jakmile zazní tento zvuk, je třeba baterii okamžitě dobít.


Položka 4: Kabel napájecího kabelu



Položka 5: kola

Čtyři kola o průměru 100 mm - všechna s brzdami.



 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00
 (03) 747 19 18
 koval@koval.si

Technické informace

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Šířka: | max. 72 cm |
| Délka: | max. 75 cm |
| Nastavení výšky: | 90 - 131 cm |
| Hmotnost bez obalu: | ca. 26,5 kg |
| Vnitřní nabíječka: | 100 V AC - 240 V AC (50/60 Hz) |
| Ochrana: | IPX4 |
| Nosnost: | 170 kg |


Ovládání výrobku

Chodítka je připraveno k použití ihned po vyjmutí z obalu a nastavení rukojetí.

VAROVÁNÍ

Zabraňte tomu, aby se baterie zcela vybila.

Používejte pouze uvnitř.

 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00
 (03) 747 19 18
 koval@koval.si

Řešení problémů

Nelze nastavit výšku chodítka, nebo se chodítka nepohybuje:

MOŽNÉ PŘÍČINY:
Baterie je vybitá.


ŘEŠENÍ:
Nabijte baterii.

Zadní kola jsou zablokována.


Uvolněte brzdy.

Opravy, servis a náhradní díly

V případě jakýchkoli technických problémů se obraťte na:

 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00

 (03) 747 19 18

 koval@koval.si