


NÁVOD K POUŽITÍ

PODAVAČ PŘEDMĚTŮ

710, 711, 713

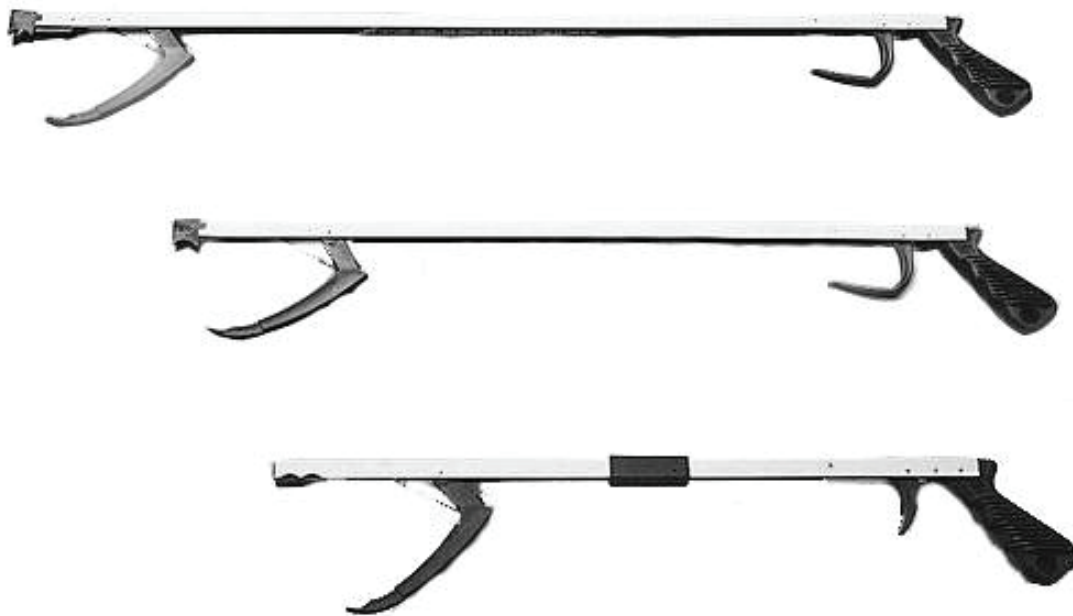

CE

POUŽITÍ

Podavač předmětů tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen uchopit předměty, které nejsou v dosahu jeho rukou. Podavač usnadňuje pacientům běžné úkony a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech a zvyšuje jejich soběstačnost.

POPIS

Konstrukce podavače je vyrobena z hliníku, na jedné straně doplněna ergonomickou plastovou rukojetí a na druhé plastovým úchopem s protiskluzovou úpravou a magnetkou.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	dosah (cm)	po složení (cm)
710	66	-
711	82,5	-
713	53	27,00

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním podavače si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podavače konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci nebo skládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.


Používejte podavač pouze k účelům, k jakým je určen.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části podavače, tj. podavač s čelistí, magnetkou a rukojetí.

UCHOPENÍ PŘEDMĚTU:


Stisknutím spouště (A) aktivujte mechanismus, který sevře čelisti (B) na konci ramene, díky čemuž lze uchopit předměty, které by normálně byly mimo dosah uživatele. Podavače jsou vybaveny také magnetickou špičkou (C) umožňující zachytit malé kovové předměty.

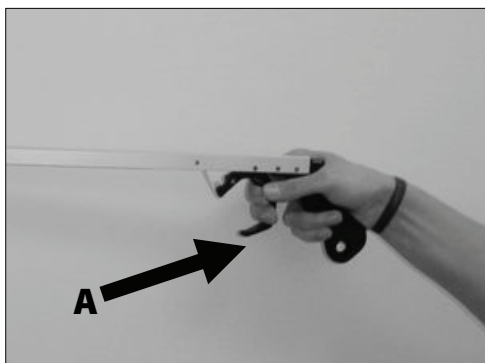

Stisknutí spouště

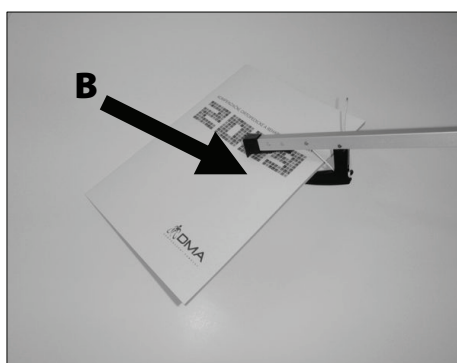


Sevření čelisti

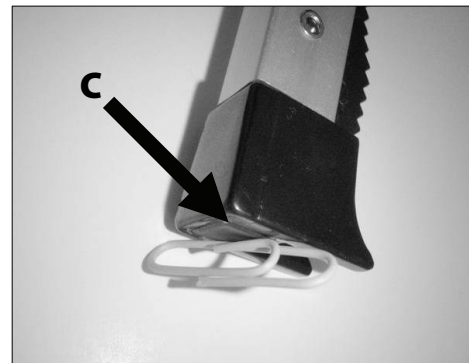


Magnetka

SLOŽENÍ PODAVAČE (POUZE TYP 713):

Pro složení podavače rozpojte oba díly směrem od sebe a složte je k sobě. Pro zajištění podavače ve složeném stavu použijte plastovou fixaci (D). Při rozkládání podavače postupujte opačně.

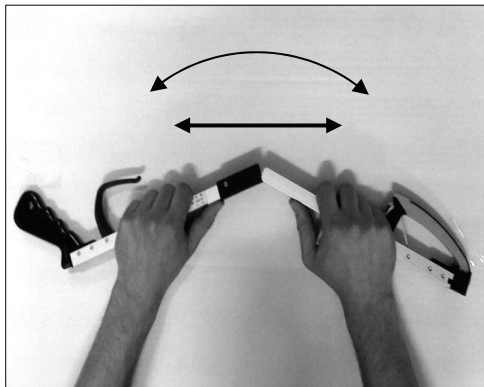

Rozpojení

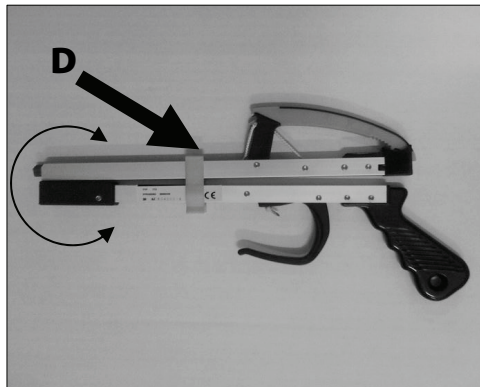

Složení

ÚDRŽBA

Podavač lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků a polohu a stav aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

