

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## BŘIŠNÍ PÁS ABDOMINAL BINDER



## Indikace:

Ochrana a stabilizace po operaci nebo v období po porodu.

## Popis výrobku:

Pooperační břišní pás vyrobený z prodyšných látek. Dokonale se přizpůsobí tvaru těla. Široké zapínání na háčky umožňuje regulovat kompresi, zajišťuje optimální stabilizaci a kompresi měkkých tkání. Ortéza může být použita pro ochranu a stabilizaci po operaci nebo těhotenství.

## Jak ortézu nasadit:

Pro zajištění správného fungování ortézy je nutné, abyste pečlivě vybrali správnou velikost. Pacient by si měl pro správné nasazení ortézy lehnout na záda. Nasadte ortézu tak, aby byla umístěna 2 cm nad kokcygeálními obratli - štítek ortézy (najdete jej uvnitř ortézy) by měl směřovat nahoru. Zadní část by měla přilnout k lumbosakrální oblasti. Zapněte pás a další pásky, které regulují dorzální kompresi. Ujistěte se, že komprese poskytuje optimální stabilizaci (částečně snižuje pohyb L-S páteře), ale nenarušuje dýchání. Doba používání ortézy by měla být specifikována lékařským odborníkem a proces by měl být doprovázen rehabilitačním cvičením.

## Ochrana a údržba:

Ortézu je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C.

Nechlórovat, nečistit chemicky, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit v horizontální poloze. Nežehlit.

## POZOR!



Tento výrobek je určen k individuálnímu použití každého pacienta. Pokud během používání výrobku pocítíte nepohodlí, pozorujete otok nebo podráždění pokožky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Správný výběr límce je velmi důležitý pro znehybnění krku pacienta a pohodlí při používání. Hlava pacienta musí být vždy v neutrální poloze.

## POZOR!



Konečné rozhodnutí o použití a výběru pomůcky musí učinit váš lékař nebo odborník.

## Velikost:

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56-71	69-84	81-96	94-109	107-122





**SPRZĘT  
MEDYCZNY**

**Výrobce:**

**mdh sp. z o.o.**  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)