

Qmed[®]
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ORTÉZA PRO VZPŘÍMENÝ POSTOJ SPINCARE EXTENSOR

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQH0L



Spincare Extensor je ortéza pro vzpřímený postoj vhodná pro širokou škálu terapeutických použití. Účinně pomáhá při rehabilitaci a léčbě v případech poranění klíční kosti a usnadňuje korekci vadného držení těla. Lze ji také použít jako preventivní pomůcku pro vytvoření zvyku správného držení těla.

Indikace:

Poranění klíční kosti, které nevyžaduje chirurgický nebo ortopedický zákrok, vady držení těla, které nevyžadují chirurgický zákrok, syndromy bolesti hrudní části páteře, kyfóza.

Popis výrobku:

Ortéza Spincare Extensor je vyrobena z pružných pásů. Látka, ze které je ortéza vyrobena, odvádí vlhkost a teplo.

Čtyři poloelastické výztuhy posilují zádovou část. Podložky umístěné na ramenních pásech zajišťují správné přilnutí a zabraňují zvlnění pásu, což je zásadní pro pohodlí uživatele. Speciální konstrukce a široká škála velikostí umožňují korigovat držení těla u pacientů různého věku.

Jak ortézu nasadit:

Rozepněte ortézu Spincare Extensor a přiložte ji na hrudní oblast tak, aby byla zádová část umístěna mezi lopatkové kosti. Nasadte si pásy na ramena, pod podpaží a vzadu je zkřížte. Poté je provlékněte poutkem na zádové podložce. Upevněte pásy na hrudi, pod okrajem hrudní kosti.

Ochrana a údržba:

Ortézu je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C.

Nechlórovat, nečistit chemicky, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit v horizontální poloze. Nežehlit.

Tabulka velikostí:

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod hrudníku (cm)	40,0-50,0	50,0-60,0	60,0-70,0	70,0- 80,0	80,0-90,0	90,00-100,00

Závěrečné rozhodnutí o aplikaci a výběru pomůcky by měl učinit zdravotnický odborník.

POZOR!



Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čisticími prostředky může mít za následek odření kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte gely nebo hřejivou masť. Po umytí vždy pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky a poškodit materiál výrobku.

POZOR!



Výrobek není nehořlavý. Nepoužívejte v blízkosti otevřených zdrojů ohně.





**SPRZĘT
MEDYCZNY**

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz