


NÁVOD K POUŽITÍ

ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU

Mixte

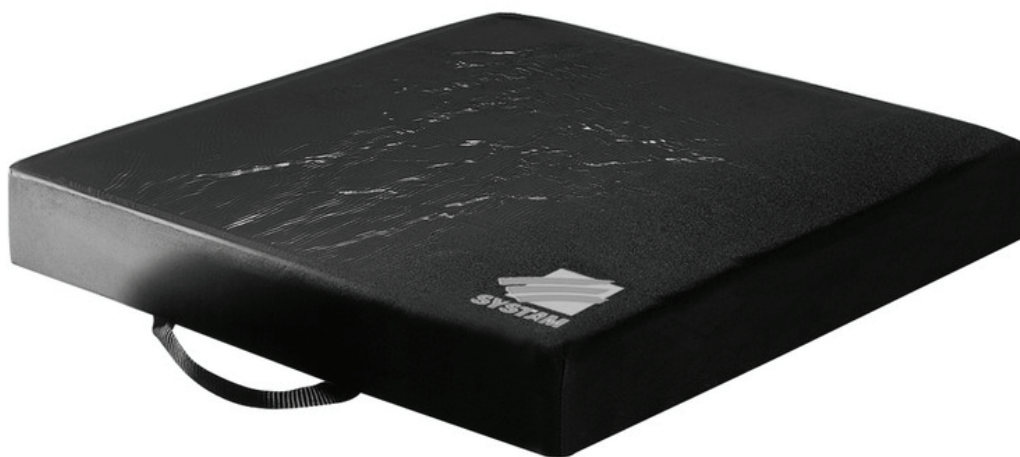

POUŽITÍ

Antidekubitní podložka do vozíku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů v oblasti hýždí. Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty.

POPIS

Podložka je anatomicky přetvarována a je složena z vysoce odolné polyuretanové (PU) pěny a vyskoelastického gelu. Podložka je standardně dodávána s elastickým mikrovláknovým, antialergickým, protiskluzovým ochranným potahem. V případě potřeby lze objednat s omyvatelným prodyšným potahem pro inkontinentní pacienty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠxHxV	MIN.EFEKTIVNÍ	MAX. EFEKTIVNÍ	OPTIMÁLNÍ	HMOTNOST
	(cm)	ZATÍŽENÍ (kg)	ZITÍŽENÍ (kg)	TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)	
MIXTE	40x40x6	30	90	-5 – 45	2,7

INDIKACE

Podložka je určena k dlouhodobému používání pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů, NORTON 16-14.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním podložky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podložky konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Zkontrolujte vždy správné a stabilní umístění podložky.

Před použitím se přesvědčte, zda velikost podložky odpovídá velikosti sedací plochy vozíku.

Podložku umístěte na vozík tak, aby anatomicky tvarovaná sedací část byla nahoře, protiskluzová část potahu dole a úchyt na potahu vepředu.

Podložka by měla být umístěna pouze na vodorovnou plochu.

Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci či jinému znečištění obalu doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Důsledně dbejte na to, aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět - v případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Podložku nepoužívejte k podložení jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast hýždí.

SKLADOVÁNÍ

Podložku skladujte v horizontální poloze.

Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

Podložka: 

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

Potah: 

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění použijte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

