

# NÁVOD K POUŽITÍ

ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU

# VISCOFLEX



CE



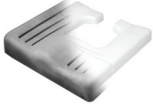
## POUŽITÍ

Antidekubitní podložka do vozíku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů v oblasti hýždí. Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty.

## POPIS

Podložka je anatomicky předtvarována a je složena z vysoce odolné vyskoelastické polyuretanové (PU) pěny s paměťovým efektem. Podložka je standardně dodávána s elastickým mikrovláknovým, antialergickým, protiskluzovým ochranným potahem. V případě potřeby lze objednat s omyvatelným prodyšným potahem pro inkontinentní pacienty. Model VISCOFLEX PLUS je navíc vybaven odnímatelným abdukčním klínem a model VISCOFLEX PRO je složen z dvou typů PU pěny pro lepší stabilitu a má speciálně vyměkčenou část pod kostrčí.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠxHxV	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ	MIN/MAX
	(cm)	TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)	EFEKTIVNÍ ZATÍŽENÍ (kg)
<b>Viscoflex</b> 	36x36x8	-5 – 46	± 30 / ± 70
	38x38x8	-5 – 46	± 30 / ± 70
	42x42x8	-5 – 46	± 40 / ± 100
	42x46x8	-5 – 46	± 40 / ± 120
	45x42x8	-5 – 46	± 40 / ± 120
	45x46x8	-5 – 46	± 60 / ± 130
	51x46x8	-5 – 46	± 60 / ± 150
<b>Viscoflex Plus</b> 	42x42x8	-5 – 46	± 40 / ± 100
	45x42x8	-5 – 47	± 40 / ± 120
	45x46x8	-5 – 46	± 60 / ± 130
<b>Viscoflex Pro</b> 	32x32x8	-5 – 46	± 30 / ± 70
	36x36x8	-5 – 46	± 30 / ± 70
	38x38x8	-5 – 46	± 30 / ± 70
	42x42x8	-5 – 46	± 40 / ± 100
	42x46x8	-5 – 46	± 40 / ± 120
	45x42x8	-5 – 46	± 40 / ± 120
	45x46x8	-5 – 46	± 60 / ± 130
	51x46x8	-5 – 46	± 60 / ± 150

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním podložky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podložky konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Zkontrolujte vždy správné a stabilní umístění podložky.

Před použitím se přesvědčte, zda velikost podložky odpovídá velikosti sedací plochy vozíku.

Podložku umístěte na vozík tak, aby anatomicky tvarovaná sedací část byla nahoře, protiskluzová část potahu dole a úchyt na potahu vepředu.

Podložka by měla být umístěna pouze na vodorovnou plochu.

Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci či jinému znečištění obalu doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Důsledně dbejte na to aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět - v případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Podložku nepoužívejte k podkládání jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast hýždí.

## SKLADOVÁNÍ

Podložku skladujte v horizontální poloze.

Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

Podložka: 

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

Potah: 

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění použijte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.