

NÁVOD K POUŽITÍ

VOZÍK MECHANICKÝ

228-24J (4PT)



CE

POUŽITÍ

Mechanický vozík je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí. Vozík slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.

POPIS

Rám vozíku je vyroben z duralových trubek a profilů vysoké pevnosti, což zaručuje jeho výborné užitkové vlastnosti a pevnost i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Vozík je vybaven plnými odnímatelnými postranicemi a odnímatelnými podnožkami s výškově nastavitelnými stupačkami. Výškově nastavitelné postranice vozíku jsou doplněny bočními plastovými kryty a pohodlnými područkami. Pohyb vozíku zajišťují rychloupínací pneumatická zadní kola 22x1^{3/8} s výpletem, která jsou opatřena ovládacími obručkami a bezpečnostními kryty drátů a přední plná kola 125x35, která jsou uložena v otočných vidlicích. Pro zajištění stability v klidové poloze je vozík vybaven ručními parkovacími brzdami zadních kol po obou stranách vozíku. Vozík je vybaven stabilizačními kolečky proti převrácení a výsuvnými madly pro doprovod. Veškeré čalounění vozíku (sedačka, zádová opěrka, područky) je lehce omyvatelné, vyrobené z ohnivzdorných materiálů, které zároveň svými vlastnostmi umožňují dlouhodobé používání vozíku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠÍŘKA (cm)	DÉLKA (cm)	VÝŠKA (cm)	ŠÍŘKA SEDAČKY (cm)	HLOUBKA SEDAČKY (cm)	VÝŠKA SEDAČKY (cm)	MAXIMÁLNÍ NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)
228-24J (4PT)	ŠS + 20	89	83	26, 31, 36	30	43	100	14

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním vozíku si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním vozíku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte vozík k sezení.

Vozík nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při skládání a rozkládání vozíku postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li vozík v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Stupačka je určena pro oporu dolních končetin, nikdy na ní nestoupejte celou vahou.

Neprojíždějte s vozíkem měkký terén (tráva, písek, bahno...).

Vozík nepoužívejte na klzkém, kopcovitém nebo velmi hladkém povrchu.

Nezdolávejte s ním příliš vysoké překážky a strmě nakloněné roviny.

Vždy přizpůsobte styl i rychlost jízdy terénu a okolním podmínkám.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části vozíku, tj. vozík s předními i zadními koly, podnožky se stupačkami, stabilizační kolečka, sedací polštář a madla pro doprovod.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ VOZÍKU

Postup při rozkládání vozíku:

1. Vozík naklopte směrem k sobě.
2. Volnou rukou stlačte trubku sedačky dolů a vozík částečně rozložte.
3. Vozík postavte zpět na všechna čtyři kola.
4. Stlačte obě trubky sedačky směrem dolů, až do úplného rozložení vozíku (obr.1).
5. Nasadte podnožky (postup viz níž - „Podnožky a stupačky“).
6. Pripevněte sedací polštář a po následném usazení na vozíku sklopte stupačky.



obr.1

Postup při skládání vozíku:

1. Odejměte sedací polštář.
2. Odklopte stupačky, popřípadě odejměte kompletní podnožky (postup viz níž - „Podnožky a stupačky“).
3. Vytáhněte sedačku nahoru, až do úplného složení vozíku (obr.2).




obr.2

POSTRANICE A PODRUČKY

Postup při nastavení výšky područky a vysunutí postranice:

1. Zmáčkněte aretační pojistku na boku úchyty postranice (obr.3).
2. Uchopením područky nastavte požadovanou výšku nebo postranici úplně vysuňte (obr.4).

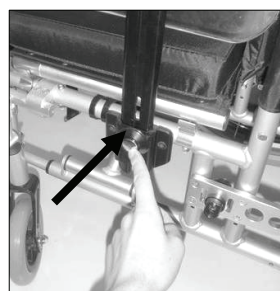

obr.3



obr.4

PODNOŽKY A STUPAČKY

Postup při odejmutí podnožky:

1. Přitáhněte aretační páčku na podnožce (obr.5).
2. Po následném uvolnění vykleňte podnožku do strany (obr.6).
3. Vysuňte podnožku směrem nahoru (obr.6).



obr.5



obr.6

Výškové nastavení stupačky:

1. Povolte jistící šroub držáku stupačky na zadní straně podnožky (obr.7).
2. Vysunutím nebo zasunutím vnitřní trubky držáku stupačky nastavte požadovanou polohu (obr.14).
3. Správnou výšku stupaček zjistíte tak, že trup by měl se stehny svírat úhel 90°.
4. Po nastavení nově zvolené polohy šroub opět utáhněte (obr.13).



obr. 7



obr.8

VÝSUVNÁ MADLA PRO DOPROVOD

Postup při nastavení výšky madel:

1. Povolte aretační páčku na zadní straně madel (obr.9).
2. Nastavte požadovanou výšku madel a páčku pevně dotáhněte (obr.10).
3. Povytažením a následným otočením páčky zvolte její polohu tak, aby nepřekážela.



obr.9



obr.10

KOLA

Postup při odejmutí zadního kola:

1. Vozík naklopte směrem k sobě.
2. Stiskněte plastovou krytku pojistky rychloupínacího zámku ve středu kola (obr.11).
3. Vytáhněte kolo (včetně osy) směrem k sobě (obr.12).



obr.11




obr.12

Pneumatiky je nutné hustit vždy s ohledem na hmotnost uživatele a kvalitu terénu.

ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ

Postup při nastavení těžiště vozíku:

1. Odejměte zadní kolo (postup viz výš - Postup při odejmutí zadního kola).
2. Povolte matici úchyty zadního kola umístěnou na vnitřní straně rámu (obr.13).
3. Posuňte úchyt horizontálně do požadované polohy a matici utáhněte (obr.14).

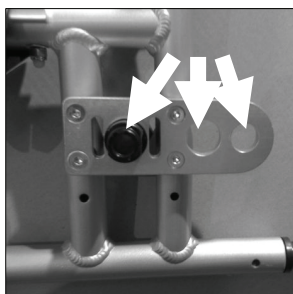

obr.13




obr.14

V zadní poloze je vozíček stabilnější, ale méně ovladatelný. Tato poloha je vhodná zejména pro pacienty po amputaci dolních končetin.

Postup při nastavení výšky a úhlu sedačky pomocí změny výšky zadního kola:

1. Odejměte zadní kolo (postup viz výš - Postup při odejmutí zadního kola).
2. Povolte a vyjměte šrouby upevňující adaptér těžiště k rámu (obr.15).
3. Zvolte požadovanou výšku kola (2 polohy) a šrouby dotáhněte (obr.16).

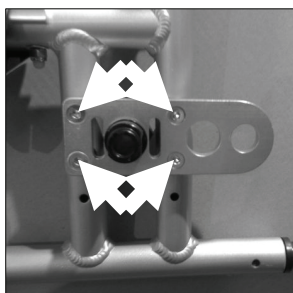

obr.15




obr.16

STABILIZAČNÍ KOLEČKA

Postup při nastavení výšky stabilizačního kolečka:


1. Zmáčknete aretační pojistku držáku stabilizačního kolečka (obr 17).
2. Nastavte požadovanou výšku kolečka posunem držáku nahoru/dolu (obr.17).
3. Výšku nastavte tak, aby se vozík nemohl převrátit vzad a zároveň kolečka nebránila v jízdě.
4. Nastavenou polohu zajistíte uvolněním aretační pojistky do původní polohy.

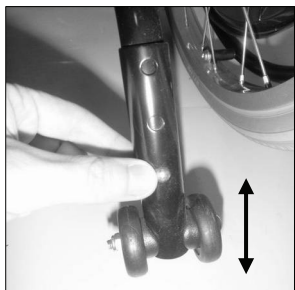

obr.17

Postup při odklopení stabilizačního kolečka:

1. Vytáhněte držák stabilizačního kolečka směrem dozadu (obr 18).
2. Držák otočte tak, aby bylo stabilizační kolečko nahoře (obr.18).
3. Nastavenou polohu zajistíte uvolněním držáku do původní polohy.

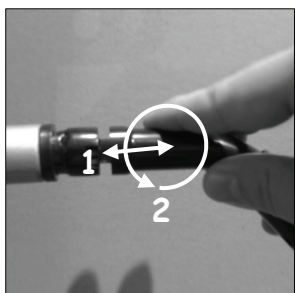


obr.18

BRZDY

Aktivace parkovací brzdy:

1. Uvedte vozík do klidové polohy.
2. Páku brzdy stlačte směrem od sebe (obr.19, obr.20).

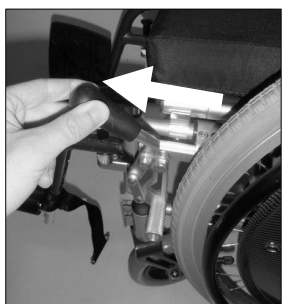

obr.19



obr.20

Ručních parkovacích brzd vždy využívejte při nasedání a vysedání z vozíku. Použití těchto brzd eliminuje nežádoucí pohyb vozíku při těchto úkonech. Polohu brzdy a tím i její účinnost lze nastavit posunutím úchyty brzdy po příslušné trubce rámu. Brzdy nikdy nepoužívejte k brzdění během jízdy!

KŘÍŽOVÁ VZPĚRA RÁMU

Centrální šroub křížové vzpěry musí být nastaven tak, aby byl zachován volný pohyb obou částí vzpěry, což zaručuje plynulé a snadné skládání a rozkládání vozíku. Nikdy nezkracujte délku středního šroubu vkládáním vymezovacích podložek

ÚDRŽBA

Čalounění vozíku je možné čistit běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Čistěte vždy celou plochu, kterou po odstranění nečistot důkladně opláchněte čistou vodou. Všechny kovové díly udržujte suché a čisté. Doporučujeme občas přeleštit vhodným leštícím prostředkem. Pravidelně kontrolujte všechny zajišťovací prvky (brzd, postranic, stupaček, kol), abyste se ujistili, že jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Pravidelně kontrolujte stav pneumatik, tlak v pneumatikách je třeba přizpůsobit hmotnosti uživatele. V případě důkladnější kontroly technického stavu nebo opravy, kontaktujte prosím naše servisní oddělení. Vozík skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

