


NÁVOD K POUŽITÍ

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

VISCO 1, VISCO 2, VISCOFLEX, COMBIFLEX AIR

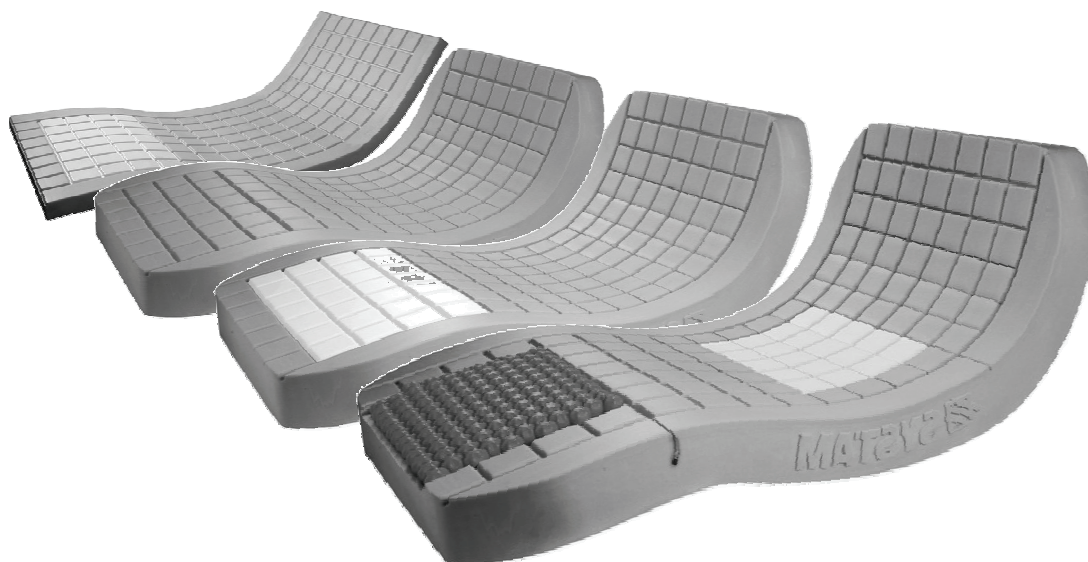

CE

POUŽITÍ

Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů. Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty.

POPIS

Matrace je složena z vysoce odolné viskoelastické polyuretanové (PU) pěny s paměťovým efektem, která automaticky přizpůsobuje svůj tvar namáhaným částem těla. Typ Visco 1 a Viscoflex je navíc vybavena vyměkčenou částí v oblasti pat a typ Combiflex AIR ještě odnímatelnou vzduchovou podložkou Polyair. Tyto díly lze vzájemně zaměnit. Matrace je standardně dodávána s paroprodyšným, protiskluzovým, omyvatelným ochranným snímatelným potahem. **Pro maximální efekt a opravdu účinnou prevenci je nutné pacienta na matraci pravidelně polohovat a měnit jeho pozici nejméně každé tři hodiny.** Matraci Visco 1 je navíc nutné podložit obyčejnou pěnovou matrací, minimálně 8 cm vysokou.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠxHxV (cm)	MIN.EFEKTIVNÍ ZATÍŽENÍ (kg)	MAX. EFEKTIVNÍ ZITÍŽENÍ (kg)	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)
VISCO 1	86,5x199x6	35	130	-5 – 50
VISCO 2	68x165x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	77x155x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	86,5x190x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	68x199,5x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	77x199,5x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	86,5x199,5x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	96x199,5x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	105,5x199,5x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	115x199,5x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	133,5x199,5x14	35	130	-5 – 50
VISCO 2	86,5x221,5x14	35	130	-5 – 50
VISCOFLEX	86,5x199,5x14	35	130	-5 – 50
COMBIFLEX AIR	96x199,5x14	35	130	-5 – 50

INDIKACE

Matrace jsou určeny k dlouhodobému používání pro pacienty s nejvyšším rizikem vzniku dekubitů, NORTON <14.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním matrace si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním matrace konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Zkontrolujte vždy správné a stabilní umístění matrace.

Před použitím se přesvědčte, zda velikost matrace odpovídá velikosti ložné plochy lůžka.

Matraci umístěte na vozík tak, aby protiskluzová část potahu dole.

U matrace Visco 1, Viscoflex a Combiflex AIR navíc zkontrolujte, zda vyměkčená bílá část s nižší tuhostí je umístěna po patami (viz obrázek na boku potahu).

Matrace by měla být umístěna pouze na vodorovnou plochu.

Pro správnou funkci doporučujeme používat matraci výhradně s originálním potahem.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci či jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za potah náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Důsledně dbejte na to, aby se mezi matrací a kontaktní částí pokožky nedostal žádný cizí předmět - v případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

URČENÍ A NASTAVENÍ TLAKU VE VZDUCHOVÉ ČÁSTI (Pouze u matrace Combiflex AIR)

Optimální tlak ve vzduchové podložce určíte dle následující tabulky:

1. Vzduchová část pod patami - přibližně na hodnotu 2
2. Vzduchová část pod hýžděmi - do 70 kg přibližně na hodnotu 3
- nad 70 kg přibližně na hodnotu 4

Položte pacienta na matraci, tak aby ležel na zádech a nohy/hýždě volně spočívali na vzduchové podložce. Pumpičkou pak nafoukněte podložku na zvolenou hodnotu.

SKLADOVÁNÍ

Matraci skladujte v horizontální poloze.

Matraci nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte matraci na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

Matrace: 

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

Potah: 

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění použijte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Matraci ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

BEZPEČNOST

Matrace vyhovují všem standardním protihořlavým normám.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.