

### SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytl nevěškeré informace.

### ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.

**Varování!** Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP



*Matrace antidekubitní  
pěnová s pamětí typ:*

*Combiflex Air*



*DODAVATEL :*

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4**  
**Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice**  
**tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335**  
***www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz***

Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

## POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Tato pěnová antidekubitní matrace s pamětí kombinovaná se vzduchovou podložkou je velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů. Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní matrací, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty. Matrace automaticky přizpůsobuje svůj tvar a je složena z vysoce odolné viskoelastické polyuretanové (PU) pěny s paměťovým efektem a odnímatelné vzduchové podložky Polyair. Matrace je standardně dodávána s paroprodýšným, antialergickým, protiskluzovým a omyvatelným ochranným potahem. Pro maximální efekt a opravdu účinnou prevenci je nutné pacienta na matraci pravidelně polohovat a měnit jeho pozici nejméně každé tři hodiny. Vzduchový díl pod nohama lze dle potřeby jednoduše zaměnit s dílem pod hýžděmi, popřípadě je možno matraci rozšířit ještě o jeden vzduchový díl a používat tak vzduchové díly dva.

## URČENÍ A NASTAVENÍ TLAKU VE VZDUCHOVÉ ČÁSTI

Optimální tlak ve vzduchové podložce určíte dle následující tabulky.

1. Vzduchová část **pod patami** - přibližně na hodnotu **2**
2. Vzduchová část **pod hýžděmi** - **do 70 kg** přibližně na hodnotu **3**  
- **nad 70 kg** přibližně na hodnotu **4**

Položte pacienta na matraci, tak aby ležel na zádech a nohy / hýždě volně spočívali na vzduchové podložce. Pumpičkou pak nafoukněte podložku na zvolenou hodnotu.

## INDIKACE

Matrace jsou určeny k dlouhodobému používání pro pacienty s nejvyšším rizikem vzniku dekubitů.

## VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Pomocí pumpičky s manometrem každé tři týdny pravidelně kontrolujte tlak ve vzduchové části.
- I mírné podfouknutí nebo přefouknutí může způsobit sníženou efektivitu.
- Před použitím se přesvědčte, zda velikost matrace odpovídá velikosti roštu lůžka.
- Matraci umístěte na rošt lůžka tak, aby její prožávaná vrchní část byla nahore, tj. protiskluzová část potahu dole.
- Vzduchový díl by měl být umístěn pod nohama nebo hýžděmi (popř. v obou částech).
- Matrace by měla být umístěna pouze na vodorovnou plochu polohovacího roštu lůžka.
- Pro správnou funkci doporučujeme používat matrace výhradně s originálním potahem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme užívání matrace pouze jednou osobou.
- Pokud dojde ke kontaminaci či jinému znečištění potahu doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za potah náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
- Důsledně dbějte na to, aby se mezi matrací, resp. potah., a kontaktní částí pokožky nedostal žádný cizí předmět. V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.
- Matrace je určena výhradně pro použití do lůžka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠxHxV (cm)	VAHA (kg)	MIN. / MAX. EFEKTIVNÍ ZATÍŽENÍ
Combiflex Air	90x200x14	14	35 / 110

## SKLADOVÁNÍ

Matraci skladujte v horizontální poloze.

Matraci nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte matraci na suchém a teplém místě.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

- Matrace: 

Omyvejte ručně pouze vlhkým hadříkem. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

- Potah: 

Perte maximálně na 95°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění použijte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Matraci ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

## BEZPEČNOST

Matrace vyhovují všem standardním protihořlavým normám.