

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY PRO VYBAVENÍ KOUPELNY



*Podložka do vany protiskluzová
typ:*

570



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY PRO VYBAVENÍ KOUPELNY



*Podložka do vany protiskluzová
typ:*

570



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Podložka do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svým protiskluzovým provedením usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Protiskluzová podložka je vyrobena z pórovité gumy, která je pro zamezení skluzu uživatele opatřena zdrsňenou sedací plochou. Ve spodní části je podložka doplněna protiskluzovými přísavkami, které zabraňují nežádoucímu posunutí po dně vany, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti.

Před použitím se přesvědčte, zda je podložka suchá a jsou-li z ní odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.

Poté podložku přiložte na zvolené místo a tlakem prostřednictvím přísavek zajistíte polohu a stabilitu.

Tabulka rozměrů :

Typ	Popis a Rozměry (cm)
570	barva bílá 68,5 * 38
570	barva růžová 68,5 * 38
570	barva modrá 68,5 * 38

ÚDRŽBA : Podložku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav protiskluzových přísavek ! Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme kombinovat s madlem na zeď nebo přes vanu !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Podložka do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svým protiskluzovým provedením usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Protiskluzová podložka je vyrobena z pórovité gumy, která je pro zamezení skluzu uživatele opatřena zdrsňenou sedací plochou. Ve spodní části je podložka doplněna protiskluzovými přísavkami, které zabraňují nežádoucímu posunutí po dně vany, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti.

Před použitím se přesvědčte, zda je podložka suchá a jsou-li z ní odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.

Poté podložku přiložte na zvolené místo a tlakem prostřednictvím přísavek zajistíte polohu a stabilitu.

Tabulka rozměrů :

Typ	Popis a Rozměry (cm)
570	barva bílá 68,5 * 38
570	barva růžová 68,5 * 38
570	barva modrá 68,5 * 38

ÚDRŽBA : Podložku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav protiskluzových přísavek. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme kombinovat s madlem na zeď nebo přes vanu !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.