

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA DO SPRCHY

540, 542 A, 545 D



CE

POUŽITÍ

Sedačka do sprchy je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Rám sedačky je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké. Je doplněn plastovým hygienickým sedátkem, pevnými područkami (model 542 A a 545 D) a opěrkou zad (545 D). Opěrné nohy umožňují výškové nastavení sedačky a jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka židle: 43,5 cm (540), 51 cm (542 A), 50 cm (545 D)

Nastavitelná výška sedu: 47-57 cm

Šířka sedu: 40 cm

Hloubka sedu: 40 cm

Nosnost: 130 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním sedačky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 130 kg.

Při nastavování výšky sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Při užívání sedačky musí být všechny nohy v kontaktu s podkladem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte sedačku k sezení.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části sedačky, tj. boční rámy, zadní vzpěru rámu, plastovou sedačku, plastovou opěrkou zad (545 D) a 6 šroubů s podložkami.




Obsah balení

SLOŽENÍ SEDAČKY

Vyjměte z krabice všechny části sedačky. Otočte sedačku dnem vzhůru a připevněte k ní zadní vzpěru (1), první a pak druhou část rámu (2,3). Jednotlivé části připevníte vsunutím do otvorů rámu sedačky (A). Všech 6 šroubů (4) zašroubujte do rámu sedačky a pevně utáhněte. Zmáčkněte pojistky (5) na zadní straně trubek zádové opěrky, nasadte zádovou opěrku (6) a pojistka samovolně zaklapne (pouze u modelu 545 D). Nyní je sedačka připravena k použití.

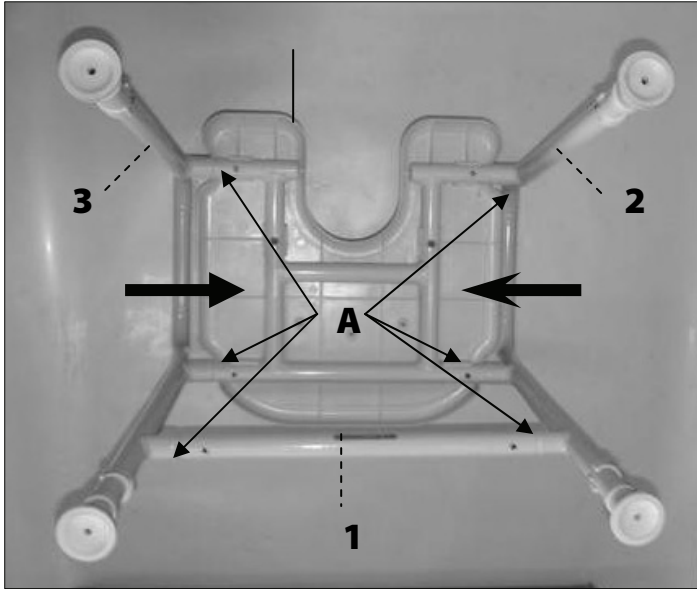

Složení jednotlivých částí

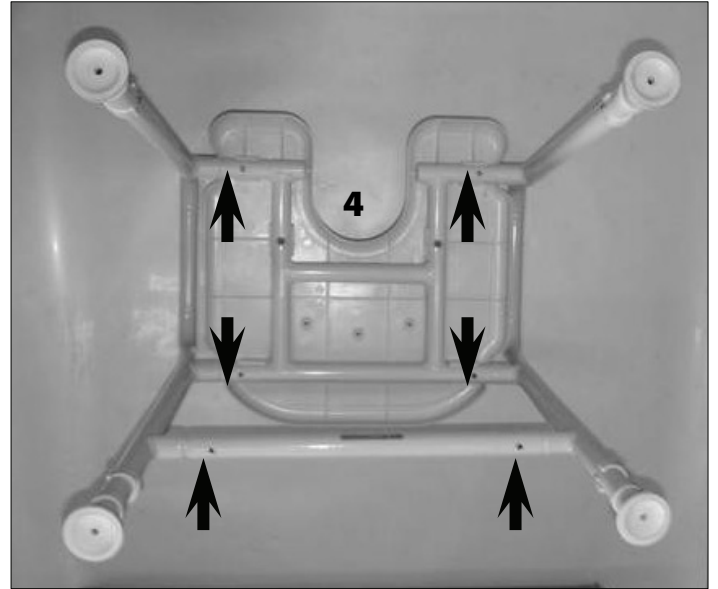


Umístění šroubů



Připevnění opěrky zad (pouze 545 D)

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDAČKY

Pro nastavení výšky sedačky vytáhněte aretační „E“ pojistku (6) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak ve zvolené poloze vraťte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

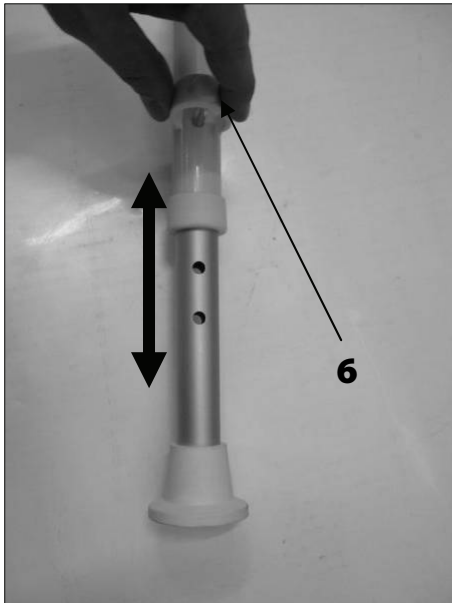

Nastavení výšky

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.