



# KOVAL

Péče o vás je naším posláním

## NÁVOD K POUŽITÍ

**Vysoké chodítko zesílené MAXI / 204 WHD**  
**Kód: 11992050, Ver. V2204**



KOVAL d.o.o.  
Loka pri Žusmu 9  
3223 Loka pri Žusmu



+ 386 3 747 19 14

✉ koval@koval.si

🌐 www.koval.si

**Informace, se kterými se prosím seznámte před použitím výrobku/ Jak zdravotnická pomůcka funguje**

1. Před použitím si pečlivě přečtěte příložený návod k použití.
2. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
3. Výrobek může používat pouze personál, který je obeznámen s jeho fungováním.
4. Údržbu, stejně jako bezpečnostní a technické kontroly, může provádět pouze autorizovaný servis nebo jiná odborná firma pověřená společností Koval.
5. Montáž, revize nebo opravy může provádět pouze autorizovaný servis nebo jiná odborná firma pověřená společností Koval.
6. Pokud technické úpravy, včetně vylepšení nebo revizí výrobků, neprovádí společnost Koval nebo jiná odborná servisní společnost pověřená společností Koval, považuje se záruka na tyto revize, jakož i na výrobky, na kterých byly tyto revize provedeny, za zrušenou

**Preventivní opatření**

Pečlivě si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.

Vždy se řiďte pokyny označenými nadpisem "VAROVÁNÍ".

**Zamýšlené použití**

Toto zařízení je určeno k tomu, aby pacientovi s postižením chůze (neurogenního, svalového nebo ortopedického charakteru) pomohlo obnovit ztracené pohybové funkce, tedy zvedání ze sedu do stoje a/nebo pohyb po zemi. Zařízení je určeno pro použití v interiérech.

**Předpisy a normy**

Vždy dbejte na dodržování platných norem nebo předpisů.

**Označení CE**

Označení CE odkazuje na směrnici 93/42/EHS pro léčivé přípravky a MDR 2017/745.

**Odpovědnost a záruka**

Výrobce výrobku odpovídá za bezpečnost a spolehlivost výrobku za předpokladu, že:

A: se výrobek používá výhradně k určenému účelu.

B: se provádějí pravidelně kontroly funkčnosti.

### **Škody způsobené při přepravě**

Po doručení zkontrolujte, zda nejsou výrobek a jeho obal poškozeny. Vždy se řiďte datem doručení: viditelná poškození je třeba nahlásit do 2 dnů po doručení a skryté vady do 7 dnů po doručení.

### **Sériové číslo**

Sériové číslo je uvedeno na štítku výrobku, který se nachází na levé straně základny chodítka.

### **Použití**

Používejte pouze ve vnitřních prostorách.

### **Zobrazení produktu**

Obrázek 1:  
Zobrazení páčky pro nastavení výšky






# KOVAL


Péče o vás je naším posláním

Obrázek 2:  
Zobrazení chodítka s rukojeťmi

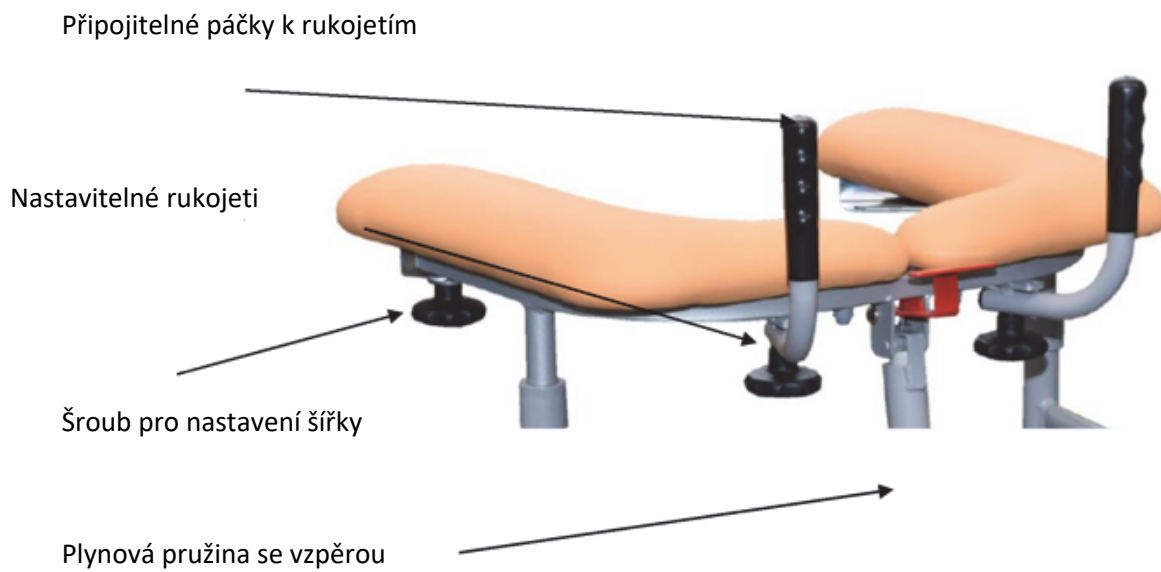

Obrázek 3:  
Upevnění plynové pružiny ze spodní strany

Kolečka 100 mm s brzdami

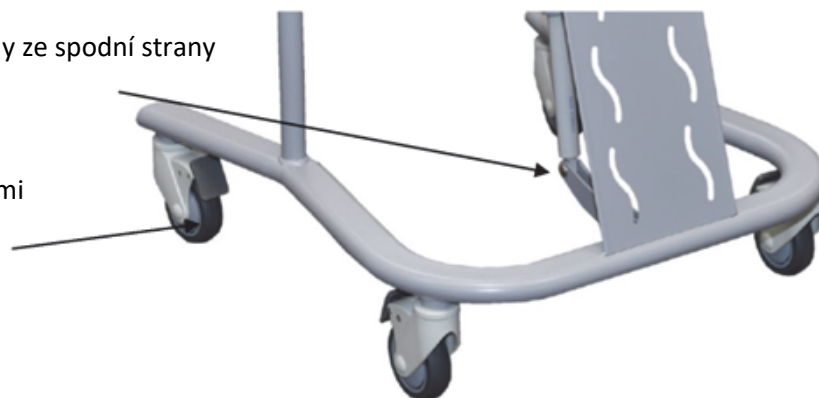



# KOVAL

Péče o vás je naším posláním

## TECHNICKÉ INFORMACE

Šířka:	max. 88 cm
Délka:	max. 75 cm
Nastavení výšky:	104 - 134 cm
Hmotnost bez obalu:	cca 34 kg
Nosnost:	220 kg

## POUŽITÍ

### Ovládání výrobku

1. Nelze nastavit výška chodítka:

*Možné příčiny:*

Plynová pružina je zablokována.

*Řešení:*

Povolte spodní upevnění plynové pružiny a otočte ji ve směru hodinových ručiček. Plynovou pružinu znovu připojte.

2. Chodítko se nehýbe:

*Možné příčiny:*

Zadní kola jsou zablokována brzdami.

*Řešení:*

Uvolněte brzdy.

## ÚDRŽBA

Výrobek doporučujeme pravidelně čistit a/nebo dezinfikovat mezi jednotlivými použitími, pokud je to nutné, nebo minimálně denně. Výrobek čistěte vlhkým hadříkem s teplou vodou a dezinfekčním čisticím prostředkem. Lze také použít dezinfekční ubrousky, které jsou napuštěné 70% (v/v) roztokem izopropylalkoholu. Područky jsou vyrobeny z kompozitní kůže, která se snadno udržuje a splňuje požadavky normy DIN 54020. Tento typ potahu lze otírat suchým nebo vlhkým hadříkem; v případě potřeby lze použít i prací prostředek na citlivé prádlo, který je však třeba otřít ihned po použití (skvrny je třeba odstranit co nejdříve, aby se zabránilo jejich absorpci materiálem). Nakonec je třeba materiál otřít teplou a čistou vodou.

## BEZPEČNOSTNÍ A TECHNICKÉ KONTROLY

Podle "zákona o zdravotnickém prostředku" by měly být jednou ročně prováděny bezpečnostní a technické kontroly.

## OPRAVY, SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

V případě technických problémů kontaktujte společnost Koval nebo jejího místního zástupce.