

NÁVOD K POUŽITÍ

STUPÍNEK K VANĚ

601, 602



CE

POUŽITÍ

Stupínek je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Stupínek je určen pro snadnější překonávání výškových rozdílů. Používá se např. jako stolička k vaně a sprchovému koutu.

POPIS

Konstrukce stoličky je vyrobena z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněna ve spodní části protiskluzovými nástavci, které dodávají vysokou stabilitu. Nášlapná část je z tvrzené gumy, která má protiskluzovou úpravu. Typ 602 má navíc podpůrné madlo, které je přichyceno čtyřmi šrouby ke konstrukci stoličky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška stoličky: 23 cm

Rozměr nášlapné plochy: 36x29 cm

Nosnost: 160 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním stupínku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním stupínku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Stupínek nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 160 kg.


Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části stupínku, tj. stupínek se čtyřmi protiskluzovými nástavci a podpůrné madlo se čtyřmi šrouby a matkami (pouze u modelu 602).

PŘIPEVNĚNÍ MADLA (POUZE TYP 602):

Madlo připevníte k stupínku šrouby a matkami dodanými jako součást balení.

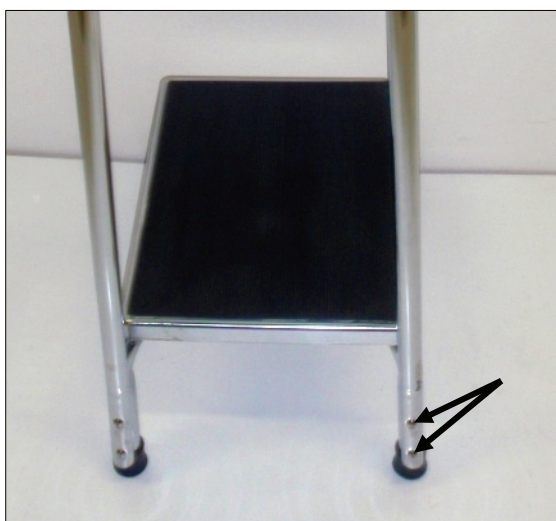

ÚDRŽBA

Stupínek nevystavujte dlouhodobému působení vlhkosti, po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Stoličku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

