

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.

Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ



Polohovací podložka:

P 911



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4

Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice

tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335

www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Antidekubitní polohovací podložka P911 je určena ke stabilizaci polohy pacienta v optimální 30° pozici, a to na obě strany. Je velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů. Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty. Podložka je anatomicky předtvarována a je vyrobena z vysoce odolné viskoelastické polyuretanové (PU) pěny s paměťovým efektem. Podložka je standardně dodávána s paroprodyšným, antialergickým, protiskluzovým a voděnepropustným ochranným potahem.

APLIKACE

- Tělo by mělo na podložce spočívat tak, aby oblast kříže byla umístěna v označené zóně (viz obr.1, obrázek shodný s nášivkou na podložce).
- Správnou 30° pozici těla zajistíte tak, že oblast mezi *trochanterem major (kyčlí)* a *os sacrum (kříž)* se musí celá dotýkat podložky v označeném místě (viz obr. 2).
- Dbejte na to, aby tělo bylo uprostřed lůžka a podložka z něho zároveň nesjížděla (obr. 3).



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Ujistěte se, že je noha v podložce ve správné poloze (viz obr 1-3).
- Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.
- Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
- Podložku nedoplňujte o žádnou jinou podložkou.
- Dbejte na to aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět. V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.
- Podložku nepoužívejte k podkládání jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast paty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ROZMĚRY DxŠxV (cm)	VÁHA (kg)	MATERIÁL PODLOŽKY	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)
P 911	99x55x15	3,25	viskoelastický polyuretan	-5 - 45

SKLADOVÁNÍ

Podložku skladujte v horizontální poloze.
Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.
Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

- Podložka:

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

- Potah:

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění použijte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podložku ani potah nespálujte a neodkládejte nikam do volné přírody.