

# NÁVOD K POUŽITÍ

## PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ

# P9700-9707



CE

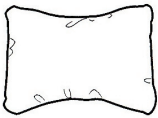
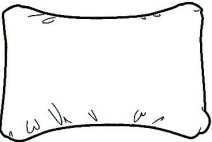
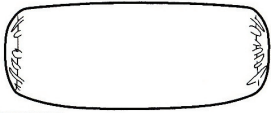
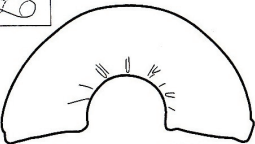
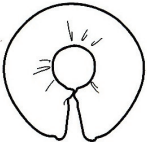
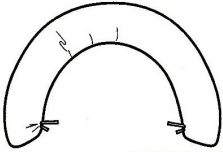
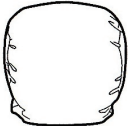

**POUŽITÍ**

Podložky pro polohování jsou součástí řady kompenzačních pomůcek, určených dlouhodobě ležící osoby upoutané na lůžko. Podložky jsou určeny ke stabilizaci polohy pacienta a jsou velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů.

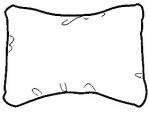



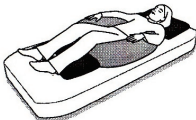

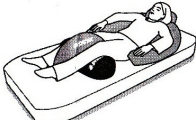
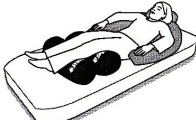
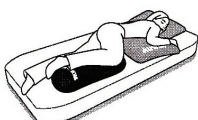
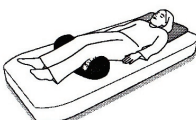

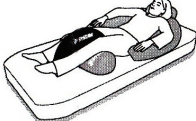
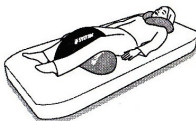

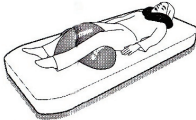
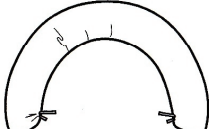
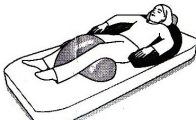
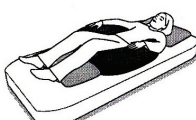
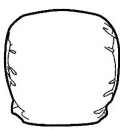
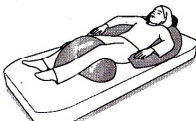
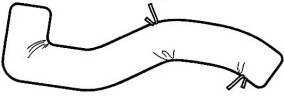



**POPIS**

Svým provedením podložky umožňují dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty. Podložky jsou vyrobeny z polystyrenových mikrokuliček. Podložky jsou standardně dodávány s vrchním snímatelným paroprodyšným, omyvatelným, voděnepropustným ochranným potahem a vnitřním bavlněným potahem,

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

	<b>P9700B1HW</b>	0,200 kg 0,4 lbs	35 x 26 cm 13,6" x 10"
	<b>P9701B1HW</b>	0,590 kg 1,3 lbs	56 x 40 cm 22" x 15"
	<b>P9702B1HW</b>	0,615 kg 1,3 lbs	60 x 20 cm 23" x 7"
	<b>P9703B1HW</b>	0,440 kg 1 lbs	62 x 32 cm 24" x 12,4"
	<b>P9704B1HW</b>	0,445 kg 1 lbs	50 x 50 cm 19" x 19"
	<b>P9705B1HW</b>	2,065 kg 4,5 lbs	135 x 85 cm 52,5" x 33"
	<b>P9706B1HW</b>	0,670 kg 1,5 lbs	58 x 40 cm 22,5" x 15"
	<b>P9707B1HW</b>	1,835 kg 4 lbs	180 x 55 cm 70,8" x 21,6"

**POUŽITÍ**

	P9700B1HW	
	P9701B1HW	 
	P9702B1HW	   
	P9703B1HW	 
	P9704B1HW	
	P9705B1HW	 
	P9706B1HW	
	P9707B1HW	  

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním podložky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podložky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci s podložkou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Podložku nedoplňujte o žádnou jinou podložku.

Dbejte na to, aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.

V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Podložku používejte výhradně pro oblast a účely, k jakým je určena.

## SKLADOVÁNÍ

Podložku skladujte v horizontální poloze.

Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

## ÚDRŽBA

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

Podložka:     

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

Potah:     

Perte maximálně na 90°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění používejte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě

K desinfekci používejte sterilizační „studené“ spreje s příměsí quartérního ammonia, glutaraldehydu apod.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

## UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.