

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Chodítko čtyřkolové 04-4200F

Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod k použití. Najdete v něm užitečné informace a pravidla týkající se bezpečnosti a efektivního používání zařízení.

Máte-li dotazy nebo připomínky, kontaktujte svého prodejce.

Děkujeme za zakoupení zařízení.

Před použitím je uživatel povinen se seznámit s návodem k použití. Dodržování zmíněných pravidel je velice důležité a zaručuje bezpečnost a dlouhou životnost zařízení.

Zařízení má certifikaci CE.



### Úvod

Čtyřkolové chodítko je vhodné pro uživatele, kteří mají pohybové omezení. Uživatel musí mít zachovanou funkci dolních končetin a být schopný chodítko před sebou tlačit. Chodítko je určeno pro uživatele, kteří neuzvednou bodové chodítko, ale jsou schopni mačkat brzdy pro zpomalování kolového chodítka.

### Popis produktu

Standardní vybavení

1. Madla
2. Přítlačné brzdy
3. Rychloupínáky
4. Zadní kolo s brzdou
5. Přední kolečko
6. Košík
7. Táček na sedátku
8. Držák berle



### Technické parametry

Celková výška [cm]	71-98
Velikost zadních kol [cm]	20
Typ obutí zadních kol	plné
Velikost předních kol [cm]	20
Typ obutí předních kol	plné
Hmotnost [kg]	9,8
Nosnost [kg]	130
Materiál	ocel
Barva rámu	modrá

### Obsluha

**Pro sestavení chodítka** jej vyjměte z krabice. Do otvorů v horní části rámu vsuňte madla s brzdami, aby boviden od brzdy byl vně chodítka. Trubku s madlem zajistěte rychloupínákem, který dotáhněte. Rozložení chodítka provedete tak, že zatlačíte na trubku pod sedátkem směrem dolů. Trubka lze v nejnižší pozici zaaretovat pojistkou proti složení. Pro složení chodítka postupujete opačně. Odklopte pojistku a trubku vytáhněte nahoru. Košík lze zavěsit na dva háčky na rámu pod sedátkem. Táček se může umístit na sedátko, kde jsou pro něj připravené díry, do kterých zapadne.

**Nastavení výšky madel** chodítka se provádí pomocí rychloupínáků. Rychloupínák povolte, posuňte madlo a dotáhněte. Pozor dbejte na to, aby madla byla nastavena stejně vysoko. Jinak může dojít k nestabilitě a pádu uživatele.

**Chodítka se používá** tak, že uživatel se chytí madel a tlačí chodítka před sebou. Chodítka mu pomáhá v rovnováze a poskytuje mu oporu. Potřebuje-li uživatel brzdit, přitlačí páky brzdy k madlům. Potřebuje-li uživatel chodítka zabrzdit aniž by musel brzdy držet, stlačí páky brzdy od madel dolů dokud se nezaaretují. Na táčku a v košíku lze převážet břemena apod. do hmotnosti 3 kg.

## **Bezpečnostní pravidla**

Před použitím tohoto zařízení je nutné se seznámit s pravidly uvedenými v tomto návodu k použití.

Před použitím je nutné se ujistit, že na zařízení nejsou žádná poškození, která by mohla ohrozit pacientův život, nastavit výšku madel dle potřeb uživatele a ujistit se, že jsou madla dotažená a nehýbou se.

Je zakázáno používat toto zařízení pro jiné účely, než pro které je určeno.

Zajistěte zařízení během přepravy, aby nedošlo k jeho poškození. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou manipulací se zařízením během přepravy.

Nesprávné nastavení zařízení může vést k nestabilitě.

Je zakázáno provádět jakékoli změny na zařízení, neboť by mohly vést k ohrožení života a ztrátě záruky.

Dodržujte bezpečnostní pravidla a doporučení popsána v tomto návodu k použití.

Výrobce vyrábí zařízení bez výrobních vad. Odpovědnost za vady je 24 měsíců. Je-li nutné vyměnit části zařízení, kontaktujte svého prodejce.

## **Údržba a čištění**

Zařízení by mělo být udržováno čisté a v souladu s doporučeními výrobce. Údržba a čištění se musí provádět pravidelně minimálně jednou měsíčně.

Pravidelné čištění a údržba zařízení jsou nezbytné pro zajištění správné funkce a bezpečnosti. Doporučuje se dbát na správnou údržbu, aby zařízení působilo esteticky. Je nutné se řídit následujícími pravidly:

1. Zařízení nesmí být mácháno ve vodě.
2. Je zakázáno provádět čištění, výměnu nebo údržbu částí zařízení, pokud je o něj opřený pacient.
3. Kovové a plastové části myjte ručně s pomocí prostředků určených k mytí plastu. Je nutné se seznámit s návodem k použití daného čistícího prostředku.

Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené špatným čistícím prostředkem.

## **Podmínky odpovědnosti za vady**

1. Výrobce nese odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Všechny výrobní vady objevené během této doby budou opraveny bezplatně.
3. Náklady na přepravu k výrobcí za účelem opravy zjištěných vad hradí prodejce. Zákazník musí dopravit zařízení do místa prodeje. Je nutné zařízení přepravovat a zabalit, aby nedošlo k dalšímu poškození. Jakékoli škody vzniklé nedostatečnou ochranou zařízení při přepravě, nejsou předmětem opravy. Zákazník nemůže požadovat odškodnění, je-li zařízení nesprávně označené nebo nesprávně pojištěné či nepojištěné.
4. Doba odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu pobytu zařízení v opravě.
5. Odpovědnost za vady nepokrývá úkony popsané v tomto návodu k použití, které má uživatel provádět na své vlastní náklady.
6. Zařízení musí být používáno v souladu s tímto návodem k použití. Nerespektování pravidel správného používání či provádění technických změn na zařízení vedou ke ztrátě záruky.
7. Jakékoli poruchy způsobené nesprávným používáním, údržbou či skladováním nejsou předmětem odpovědnosti za vady. Odpovědnost za vady se též nevztahuje na běžné opotřebení. Takové opravy hradí kupující.
8. Výrobce nenes odpovědnost za opravy provedené v neautorizovaných servisech. Takovéto opravy nebo individuální úpravy zařízení vedou ke ztrátě záruky.
9. Distributor nabízí placený pozáruční servis zařízení.
10. Případy, které zde nejsou uvedeny, se řídí platným občanským zákoníkem.
11. Odpovědnost za vady lze uplatnit u prodejce.

Datum poslední aktualizace: 25.9.2015

Výrobce: UAB Kasko group, A.Vivulskio st.12D, 03221, Vilnius, Lithuania, Tel.: 00 370 5 216 7425, [www.kid-man.com](http://www.kid-man.com)

Výhradní distributor pro ČR: SIV Kladno s.r.o., Vít. Nezvala 750, 27204 Kladno, tel.: 321003002, [www.siv.cz](http://www.siv.cz)