

NÁVOD K POUŽITÍ

Toaletní křeslo 04-7400

Před použitím zařízení si důkladně přečtete návod k použití. Najdete v něm užitečné informace a pravidla týkající se bezpečnosti a efektivního používání zařízení.

Máte-li dotazy nebo připomínky, kontaktujte svého prodejce.

Děkujeme za zakoupení zařízení.

Před použitím je uživatel povinen se seznámit s návodem k použití. Dodržování zmíněných pravidel je velice důležité a zaručuje bezpečnost a dlouhou životnost zařízení.

Zařízení má certifikaci CE.




Úvod

Toaletní křeslo pevné je vhodné pro uživatele, kteří mají pohybové omezení a mají problém s hygienou na toaletě. Toaletní křeslo je nepojízdné, má nastavitelné nohy, polstrovaný sed s dírou a polstrovaný sedák na kryt sedu.

Popis produktu

Standardní vybavení

1. Zádová opěrka
2. Loketní opěrky
3. Kryt sedu
4. Polstrovaný sed s dírou
5. Nastavitelné nohy
6. Kbelík

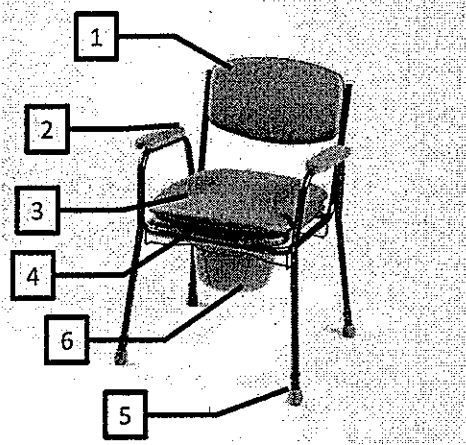

Technické parametry

Celková šíře [cm]	58
Celková výška [cm]	82-98
Šíře sedu [cm]	43
Hloubka sedu [cm]	45
Výška zad [cm]	35
Výška sedu [cm]	44-60
Hmotnost [kg]	8,6
Nosnost [kg]	130

Obsluha

Pro nastavení výšky sedu sejměte pojistku na noze, posuňte nohu, jak potřebujete, ale tak aby jste skrze otvor viděli otvor na vnitřní trubce a poté pojistku zasuňte do otvoru. Toto opakujte u všech nohou. Pozor všechny nohy je třeba nastavit na stejnou délku.

Před použitím sejměte kryt sedu a odklopte polstrovaný sedák s dírou. Přesvědčte se, že pod sedákem je kbelík bez víka případně víko sejměte a sedák s dírou zase přiklopte. Poté je možné toaletní křeslo použít.

Vyjmutí kbelíku z křesla provedete odklopením sedu s dírou a vyjměte kbelík.