

NÁVOD K POUŽITÍ

ZDRAVOTNÍ POLŠTÁŘE

C 100, C 120, C 150



CE

POUŽITÍ

Zdravotní ergonomické polštáře jsou velmi účinným prostředkem v prevenci i terapii při bolestech hlavy a krční páteře. Svým tvarem a provedením materiálu zabezpečují ergonomickou polohu krční páteře a hlavy během spánku, což umožňuje přirozenou relaxaci šíjového svalstva, a dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného váhou hlavy. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s polštářem, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty.

POPIS

Polštáře jsou anatomicky předtvarovány a jsou vyrobeny z vysoce odolné viskoelastické polyuretanové (PU) pěny s pamětovým efektem. Polštáře jsou standardně dodávány s antialergickým hygienickým ochranným potahem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠxHxV	VÁHA	MATERIÁL	MATERIÁL	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ
	(cm)	(kg)	POLŠTÁŘE	POTAHU	TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)
C 100	50x40x10	1,2	viskoelastický PU s pamětí	19% polyester, 81% bavlna	-5 - 45
C 120	50x32x10	1,1	viskoelastický PU s pamětí	54% polyester, 45% bavlna	-5 - 45
C 150	50x40x11/12	1,2	viskoelastický PU s pamětí	54% polyester, 45% bavlna	-5 - 45

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním matrace si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním matrace konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Ujistěte se, že je polštář na matraci správně umístěn (viz obr).

Polštář by měl být umístěn pouze na vodorovnou plochu.

Pro správnou funkci doporučujeme používat polštář výhradně s originálním potahem.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jedním člověkem.

Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Polštář nedoplňujte žádnou jinou podložkou.

Dbejte na to, aby se mezi polštář a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.


V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Polštář nepoužívejte k podložení jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast hlavy.

V případě dlouhodobě přetrvávajících bolestí kontaktujte svého lékaře.

APLIKACE

Polštář umístěte na matraci tak, jak je uvedeno na obrázku: Universální velikost polštářů je zvolena pro všechny morfologické typy, nicméně i přesto je potřeba několikadenní adaptace, než si tělo zbaví předešlých návyků. U typu C 150 je možné oboustranné použití díky dvěma výškám.

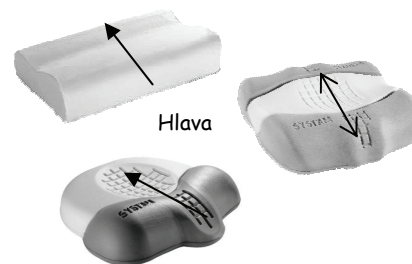

SKLADOVÁNÍ

Polštář skladujte v horizontální poloze.

Polštář nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte matraci na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

Polštář:

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

Potah:

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění používejte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Polštář ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

BEZPEČNOST

Polštáře vyhovují všem standardním protihořlavým normám.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

