

# NÁVOD K POUŽITÍ

VOZÍK MECHANICKÝ TRANSPORTNÍ

# 512 JBS



CE

## POUŽITÍ

Transportní vozík je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí. Vozík slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.

## POPIS

Skládací rám vozíku je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici. Vozík je vybaven bovdenovými brzdami pro doprovod s možností aretace, nastavitelnými otočnými područkami, sklopnou stupačkou a bezpečnostním pásem.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka vozíku: 53 cm

Hloubka vozíku: 89 cm

Výška vozíku: 93 cm

Šířka sedu: 33 cm

Hloubka sedu: 32 cm

Výška sedu: 50 cm

Hmotnost: 8,5 kg

Nosnost: 80 kg

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním vozíku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním vozíku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte vozík k sezení.

Vozík nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost je 110 kg.

Při skládání a rozkládání vozíku postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li vozík v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání vozíku musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

Stupačka vozíku je určena pro oporu dolních končetin, nikdy na ní nestoupejte a nepřenášejte váhu celého těla.

Neprojíždějte s vozíkem měkký terén (tráva, písek, bahno...).

Vozík nepoužívejte na klzkém, kopcovitém nebo velmi hladkém povrchu.

Nezdolávejte s ním příliš vysoké překážky a strmě nakloněné roviny.

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části vozíku (viz popis).


**ROZLOŽENÍ VOZÍKU**

Vybalte vozík z krabice a otevřete transportní tašku.


Vozík položte na podlahu, přidržete přední část sedačky a zvedněte zádoovou opěrkou, dokud se aretační tyčka nezaklapne do zámků.




2-1

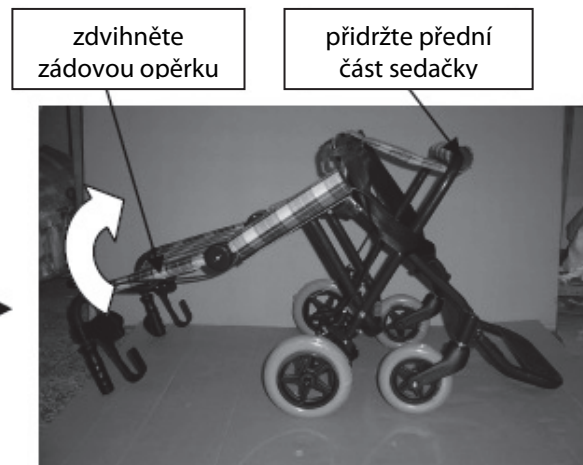

2-2

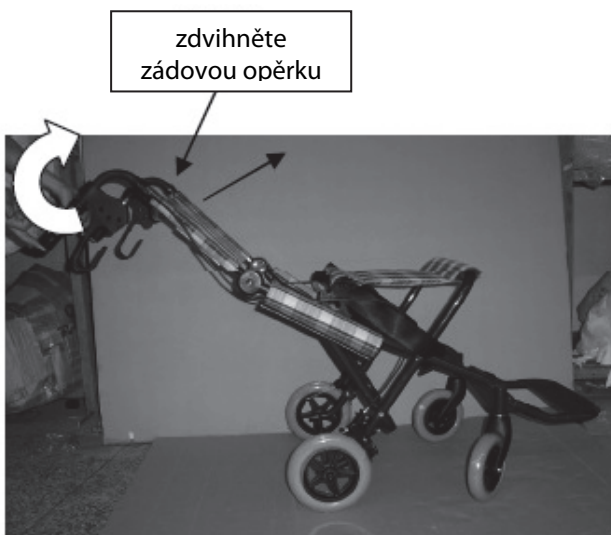

2-2

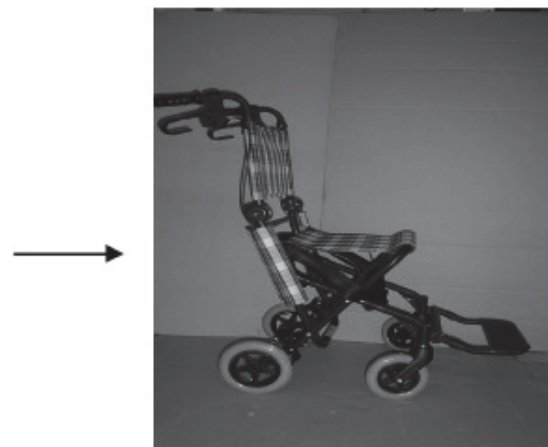


2-4



2-5


aretační tyčka musí být v zaklapnuta do zámků

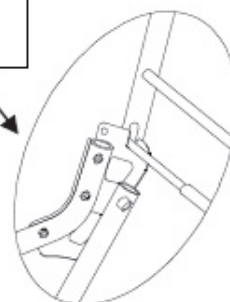


**Upozornění:** Před použitím vozíku se vždy přesvědčte, že je aretační pojistka v zámcích.

**NASTAVENÍ PODRUČEK**

Požadovanou výšku nastavte otáčením područky proti směru hodinových ručiček.

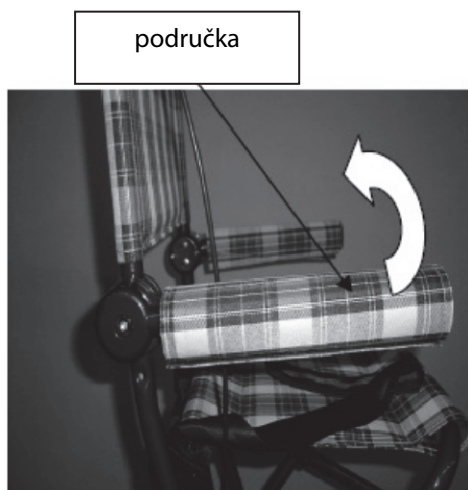


správně (nahoru)

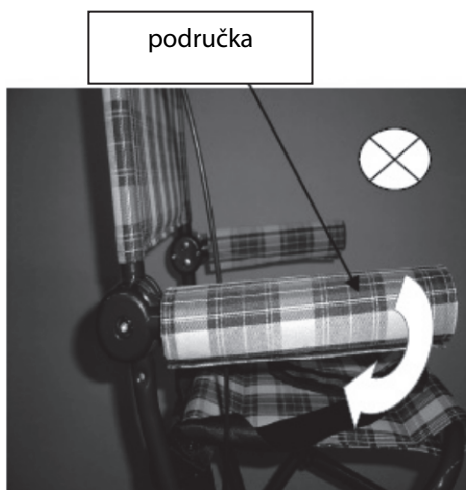


špatně (dolů)

**BRZDY**

Vozík přibrzdíte stlačením brzdových pák směrem nahoru.

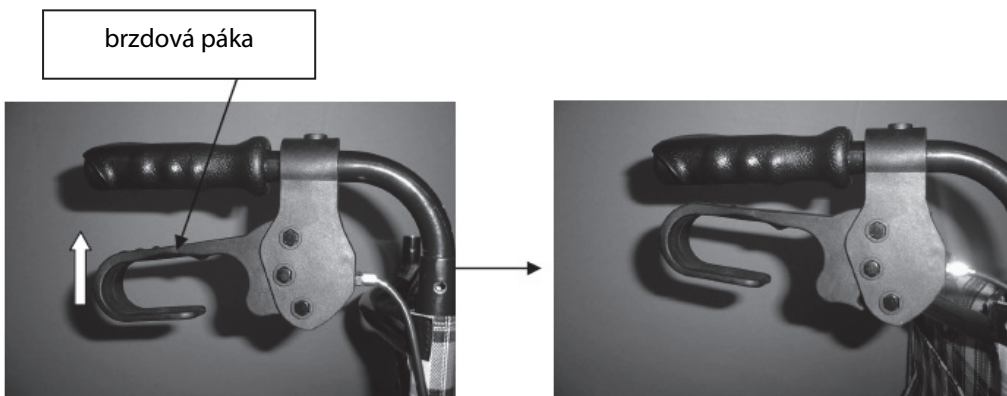


Při parkování vozík zabrzdíte pohybem brzdové páky směrem dolů. Tato pozice zůstane zaaretována. K odblokování stiskněte páku směrem nahoru.

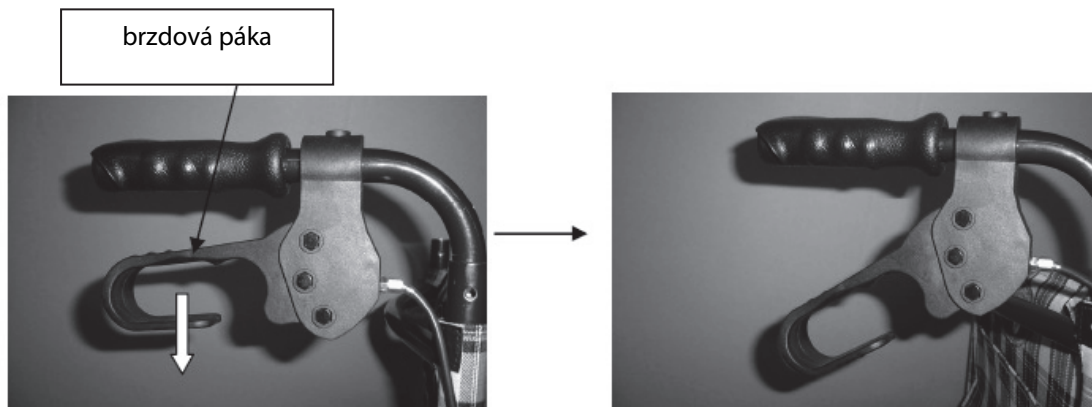


## STUPAČKA

Podle potřeby a využití můžete stupačku sklopit nebo odklopit.

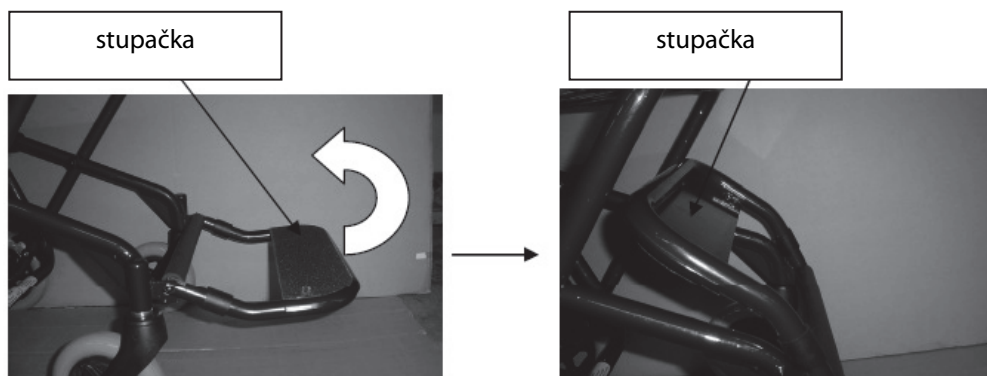

**Upozornění:** Při nasedání nebo vysedání z vozíku na stupačku nikdy nestoupejte, vozík by se mohl převrátit!

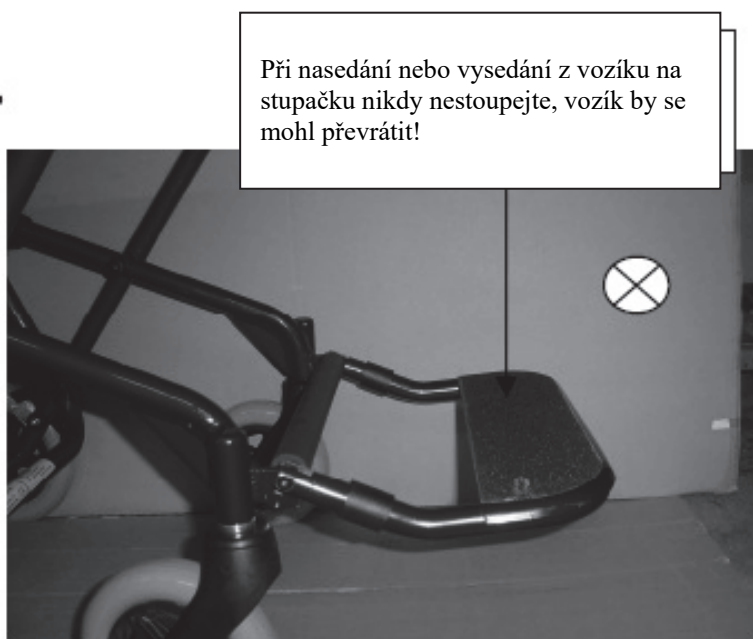

## ÚDRŽBA VOZÍKU

Čalounění vozíku je možné čistit běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Čistěte vždy celou plochu, kterou po odstranění nečistot důkladně opláchněte čistou vodou. Všechny kovové díly udržujte suché a čisté. Doporučujeme občas přeleštit vhodným leštícím prostředkem. Pravidelně kontrolujte všechny zajišťovací prvky (brzd, područek, stupaček, kol), abyste se ujistili, že jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. V případě důkladnější kontroly technického stavu nebo opravy, kontaktujte prosím naše servisní oddělení. Vozík skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy. Popsanou kontrolu doporučujeme provádět každý měsíc.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.