

# NÁVOD K POUŽITÍ

## ERGONOMICKÝ PÁS PRO PŘESUN

# EZ 900



CE

## POUŽITÍ

Manipulační pás pro přesun je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen se sám přesunout nebo změnit polohu. Svou konstrukcí eliminuje možné riziko pádu při přesunu a výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem.

## POPIS

Pás se skládá z vyztužené protiskluzové vnitřní vrstvy, je vybaven čtyřmi vertikálními a třemi horizontálními pevnými úchyty a fixuje se pomocí plastové přezky. Svým provedením ulehčuje pás přesun, otáčení, posazování, vstávání a chůzi pacienta. Lze také použít jako fixační pás. Doporučujeme kombinovat s přesouvacím prknem ADL 23, popřípadě kombinaci dvou pásů, kde ho používá i terapeut na svém těle, aby se pacient mohl pohodlně chytit (viz příklady použití).

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry: 128x15 cm

Pro obvod pasu: 100-125 cm

Hmotnost: 740g

Nosnost: 150 kg

Materiál pásu: 100% Nylon

Materiál vnitřní výztuhy: PVC

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním pásu si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním pásu konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci s pásem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění pásu, doporučujeme ho ihned dezinfikovat.

Dbejte na to, aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.

V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Pás používejte výhradně pro účely, k jakým je určena.


Před použitím se ujistěte, zda obě plochy, mezi kterými budeme pacienta přesunovat, jsou stabilní, zabrzděné a ve vodorovné poloze.

Před použitím překontrolujte všechny švy, chyty a popruhy.


Před použitím zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás pevně zapnutý.

Během přesunu pacienta dbejte zvýšené pozornosti na jeho hlavu, krční páteř a volné dýchací cesty.

Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 150 kg.

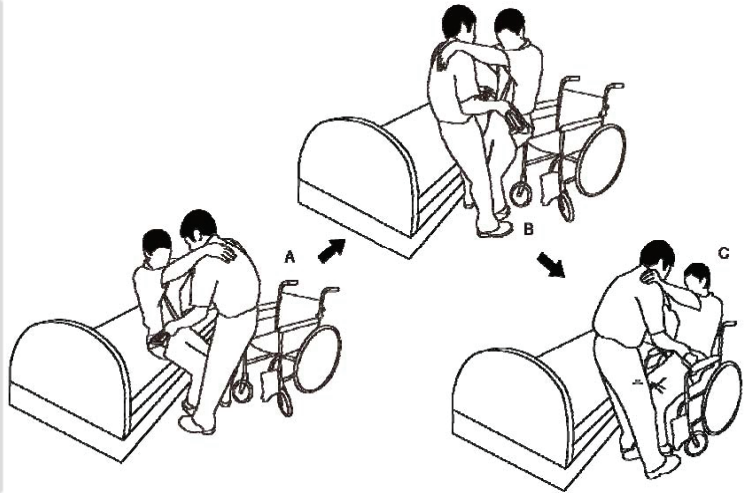**POUŽITÍ****Při vstávání a přesunu****Asistence při chůzi****Bezpečnostní pás**

## Kombinace s přesouvacím prknem ADL 23

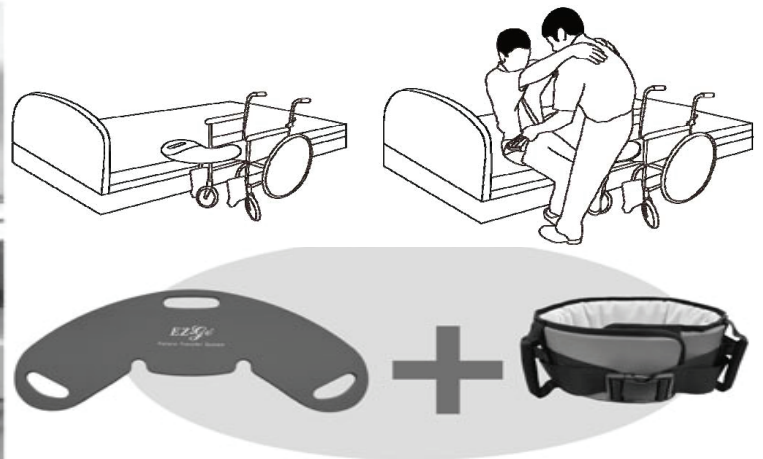

## SKLADOVÁNÍ

Pás skladujte v horizontální poloze.

Pás nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

## ÚDRŽBA

Nebělte a nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty. Podložku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro standardní čištění omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Podložku je možné prát (max. 60°C), pouze sponu bezpečnostního popruhu vložte do pracího sáčku. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě. Nesterilizujte při vysokých teplotách.



## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.