



CE

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

McWET

Sprchová a toaletní židle

Model 8013039 / 8013040 / 8013041

Obsah

Předmluva	4
Použití	4
Kontrola při převzetí	4
Dodávka	4
Přehled	5
Model: 8013039 / 8013040 / 8013041	5
Bezpečnostní pokyny	6
Pokyny pro uživatele	8
Sahání pro předměty	9
Správný postup při sahání po předmětech	9
Pohánění vozíku	10
Doprovod	10
Montáž	11
Brzda	12
Přítlačná brzda	13
Zajištění přítlačných brzd	13
Uvolnění přítlačných brzd	13
Řídicí kolečka s aretací	14
Nedělená podnožka	15
Odklopení nedělené podnožky	15
Opěrky rukou	15
Odklopení opěrky ruky	15
Sklopení opěrky ruky	15
Sedák	16
Sejmutí sedáku	16
Položení sedáku	16
Nasazení vložky do výřezu	16
Odstranění vložky z výřezu	16
Toaletní nádoba	17
Poháněcí kola 24"	18
Rychloupínací osa	18
Údržba	19
Čištění a péče	19
Polstry	19


Povrchová úprava	19
Dezinfekce	19
Recirkulace	20
Opravy	20
Náhradní díly	20
Likvidace	21
Údržba	21
Plán údržby	22
Propíchnutí pneumatiky	24
Výměna pneumatik	24
Nastavení přítlačných brzd	25
Jemné nastavení přítlačných brzd	25
Technické údaje	26
Model 8013039 / 8013040 / 8013041	26
Typový štítek	26
Ručení / Záruka	26
Záruční kupón	27


PŘEDMLUVA

Děkujeme za volbu výrobku naší společnosti.


Tento návod k obsluze vám má pomoci osvojit si manipulaci se sprchovou a toaletní židlí a zamezit úrazům.

Upozornění:

 Zobrazené varianty výbavy se od vašeho modelu mohou lišit.

 Tento návod k obsluze platí pro *model 8013039, 8013040 a 8013041*.

Pozor:

 Před prvním použitím sprchové a toaletní židle si přečtěte tento návod k obsluze.

Upozornění:

Děti by si tento návod k obsluze měly před první jízdou přečíst spolu s rodiči nebo dohlížející osobou či doprovodem.

POUŽITÍ

Tento produkt slouží osobám s omezenou mobilitou jako pomůcka při používání sprchy a toalety.

Sprchová a toaletní židle je určena k použití v interiéru. Je vyrobena z hliníkových trubek s odolnou povrchovou úpravou práškovým lakováním. K trvalému použití v médiích obsahujících soli jako jsou solankové koupele či mořská voda tato sprchová a toaletní židle však vhodná není.

- Model 8013039 má poháněcí kola 24" s pevnými osami.
- U modelu 8013041 jsou poháněcí kola 24" s rychloupínacími osami. Přídavná zadní kolečka jsou otočná a opatřena brzdou (8013040).


KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ

Výrobek celý vybalte a zkontrolujte zásilku, zda je kompletní a nevykazuje poškození způsobené dopravou. Pokud byste zjistili, že výrobek nebo zásilka má nějakou vadu:

1. neprodleně reklamujte u dopravce,
2. nechejte škodu/vadu zaprotokolovat,
3. neprodleně informujte svého prodejce.

DODÁVKA


Sprchová a toaletní židle se dodává v konstrukčních skupinách, které se dají snadno smontovat.

 Řiďte se pokyny v kapitole < *Montáž* >.

PŘEHLED

Model: 8013039 / 8013040 / 8013041

Přehled ukazuje nejdůležitější komponenty a ovládací prvky.

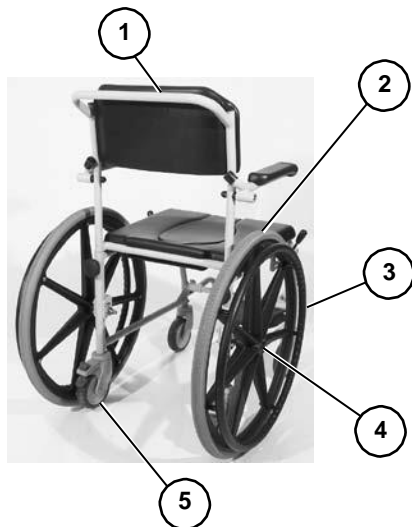

Pol. Označení

- 1 zádová opěrka
- 2 opěrka ruky
- 3 sedák
- 4 vložka do výřezu
- 5 nedělená podnožka
- 6 řídicí kolečko přední
- 7 přítlačná brzda

Pol. Označení

- 1 madlo pro doprovod
- 2 poháněcí kolo
- 3 obruč
- 4 rychloupínací osa
- 5 řídicí kolečko zadní - s brzdou

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Sprchová a toaletní židle je technickou pomůckou, u které je v každém případě nutné respektovat níže uvedené bezpečnostní pokyny:

- ☞ Před prvním použitím sprchové a toaletní židle si přečtete tento návod k obsluze.
- ☞ Sprchovou a toaletní židli je třeba zajistit proti neoprávněnému použití (zejména dětmi), např. pomocí aretačních brzd.
- ☞ Montáž by měl provádět odborník!
- ☞ Před použitím zkontrolujte všechny konstrukční díly, zda nejsou poškozené a pevně sedí. – Nebezpečí úrazu!
- ☞ Zdeformovanou sprchovou a toaletní židli nenarovnávejte a znovu nepoužívejte. – Nebezpečí úrazu!
- ☞ Ujistěte se, že rychloupínací osy poháněcích kol jsou pevně zaaretovány. – Nebezpečí úrazu!
- ☞ Před přesedáním na jiné sedadlo, před opuštěním židle nebo usednutím na ni zásadně zajistěte brzdy, abyste zabránili nechtěným pohybům židle.
- ☞ Dbejte na to, aby při použití bez poháněcích kol 24" stála vždy všechna čtyři kolečka pevně na zemi. – Nebezpečí úrazu!
- ☞ Opěrky rukou a kolečka udržujte v čistotě, bez olejů a tuků. – Nebezpečí úrazu!
- ☞ Vadné polstry a kolečka by se měly okamžitě vyměnit. – Nebezpečí úrazu!

- ☞ V případě otevřených ran používejte na polstry sedáku, zad, nohou a područek antiseptickou podložku!
- ☞ Neulevujte svým nohám pokládáním na nábytek nebo jiné předměty. – Opřením dozadu změníte těžiště a zvýšíte nebezpečí převrácení.
- ☞ Dávejte pozor, abyste se neporanili o kola!
- ☞ Sprchová a toaletní židle by se měla používat pouze za pomoci doprovodu.
- ☞ Přípustná je přeprava pouze jedné osoby!
- ☞ Sprchovou a toaletní židli používejte pouze na krátkých trasách. – Poškození zdraví při dlouhodobém používání, neboť židle nemá odpružení.
- ☞ Zajistěte, aby hýždě nebyly širší než sedák, a to (43 cm).
- ☞ Pro vlastní bezpečnost si sedejte hodně dozadu, na střed sedací plochy. – Nebezpečí převrácení!
- ☞ Při vstávání případně zavolejte další osobu.
- ☞ Opěrky rukou jako pomoc při vstávání nepoužívejte!
- ☞ Bezpodmínečně zamezte jednostrannému opření o levou nebo pravou opěrku ruky při vstávání.
- ☞ Při nepříznivé poloze kol hrozí nebezpečí převrácení sprchové a toaletní židle.
- ☞ Sprchovou a toaletní židli používejte pouze na rovném, pevném podkladu. – Nebezpečí převrácení!
- ☞ Židle se nesmí používat k:

– jízdě po nerovném, hrubém terému. – Velký valivý odpor, nebezpečí převrácení!

– jízdě do kopce a z kopce. – Nebezpečí úrazu!

– překonávání překážek (např. stupně, schody, výstupky). – Nebezpečí úrazu!

☞ Pneumatiky jsou z kaučukové směsi a na některých podkladech mohou zanechávat těžko odstranitelné nebo trvalé stopy (např. umělohmotné, dřevěné či parketové podlahy, koberce, podlahoviny).

☞ Sprchová a toaletní židle není vhodná k dlouhodobému používání v atmosféře obsahující soli, např. v solankových koupelích. Abyste zabránili poškození, musíte sprchovou a toaletní židli po takovém použití očistit normální vodou z vodovodu.

Pokyny pro uživatele


Na následujících stránkách naleznete všeobecné pokyny a návrhy pro manipulaci a používání sprchové a toaletní židle v každodenních situacích. Nové situace je třeba nacvičit s další osobou.

☞ K menším překážkám, např. stupňům/hranám, najíždějte vždy pomalu a kolmo (90°), dokud se řídicí kolečka téměř nedotknou překážky. Vozík krátce zastavte, potom překážku přejedte.



Pozor:

- ! Při jízdě vzad brzděte velmi opatrně.
 - – Prudké zabrždění pomocí obručí může způsobit převrácení!
- ☞ Vyhýbejte se zejména silnému brždění pomocí obručí, neboť teplo vzniklé třením mezi obručí a rukou může způsobit poranění ruky.
- ☞ Při nasedání a vysedání ze sprchové a toaletní židle odklopte podnožku.

Najíždění na překážky

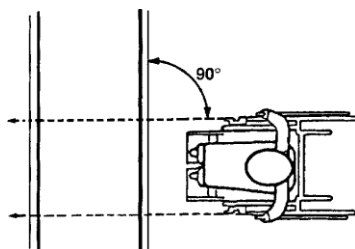


Překonávání překážek

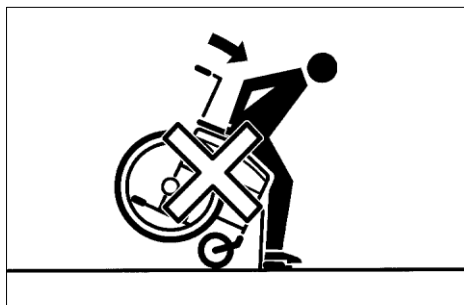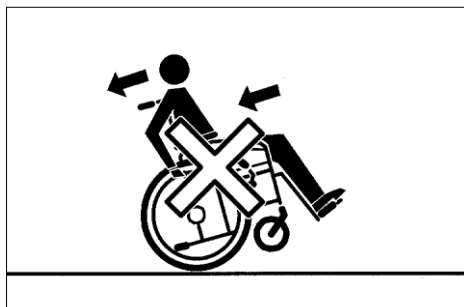

Sahání pro předměty




Vyhýbejte se extrémnímu naklánění trupu dopředu, do strany nebo dozadu při zvedání či odkládání těžkých předmětů.
– Nebezpečí převrácení a vyklopení!

- ☞ Při předklánění trupu hodně dopředu je třeba sprchovou a toaletní židli pohybovat dozadu tak dlouho, dokud řídicí kolečka ke zvýšení stability nesměřují.

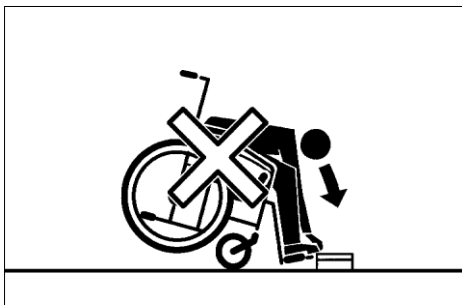


Správný postup při sahání po předmětech

- ☞ Najedzte co nejtěsněji k předmětu.
- ☞ Otáčením vozíku natočte přední řídicí kolečka dopředu. Zvýšíte tak stabilitu vozíku.
- ☞ Zajistěte aretační brzdy
- ☞ Opatrně uchopte předmět.

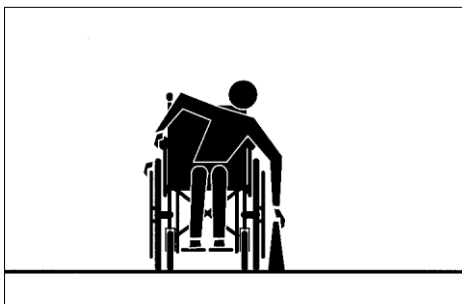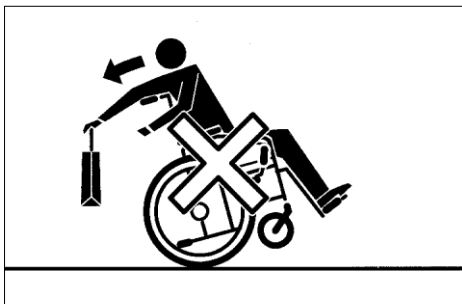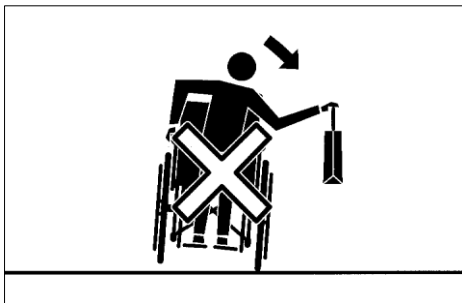

Pohánění vozíku

- ☞ Vozík pohánějte pokud možno prostřednictvím obruče. – Možné nebezpečí pohmoždění v oblasti brzdy!
- ☞ Zabraňte nekontrolovanému rozjezdu při cupitání! – Nebezpečí úrazu!
- ☞ Když máte odklopenou podnožku, nebrzdíte sprchovou a toaletní židli nohama. – Nebezpečí úrazu způsobené podvrtnutím nohou!
- ☞ Nesahejte do drátů ani na běhoun otáčejících se kol. – Nebezpečí poranění!
- ☞ Zabraňte trhavým pohybům při pohánění vaší sprchové a toaletní židle. – Nebezpečí převrácení!
- ☞ Vyhýbejte se přímé změně směru jízdy do opačného směru (např. z couvání na jízdu vpřed). – Nebezpečí úrazu v důsledku úplného zabrzdění s řídicími kolečky otočenými dovnitř.
- ☞ Při používání přídavných koleček 5“ vzadu dbejte na to, aby tato kolečka při provozu s koly 24“ mířila dozadu a byla zajištěná!

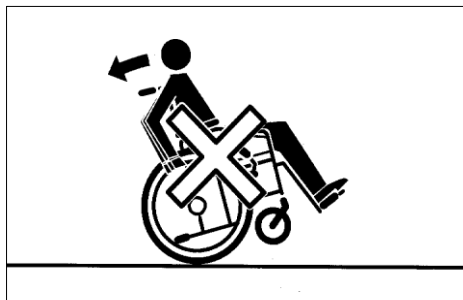

Doprovod

Před využitím pomoci doprovodné osoby upozorněte doprovod na všechny možné nebezpečné situace. Zkontroluje, zda konstrukční díly sprchové a toaletní židle, za které doprovod židli uchopuje, pevně sedí.

MONTÁŽ

Pozor:

- ! Úpravy, montáž nebo nastavování
- nechávejte zásadně provádět u prodejce.

Produkt dodáváme rozložený na konstrukční skupiny. Montáž provádějte takto:

1. Nejprve zasuňte zádové trubky do obou zadních částí rámu [1], potom pevně zašroubujte šrouby s kolečkem (2).

2. Namontujte kola 24" s osami a šroubovými spoji, které jsou součástí dodávky, do spodního otvoru v upínacím adaptéru [3].

☞ V případě potřeby lze upínací blok

Tím docílíte prodloužení vzdálenosti kol.

3. Namontujte přítlačné brzdy se svěracími díly vždy vpravo a vlevo na přestavovací kolejnici brzd [4].

☞ Řiďte se pokyny v kapitole < Nastavení přítlačných brzd >.



4. Umístěte sedák [5].

☞ Řiďte se pokyny v kapitole < Sedák >.

☞ V případě potřeby položte vložku do výřezu v sedáku (6).

5. Podnožku můžete vyklopit dopředu z rámu.

6. Následně zkontrolujte pevnost všech spojovacích prvků.

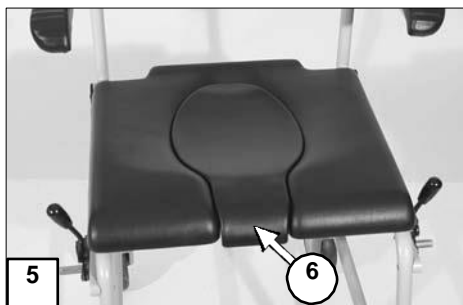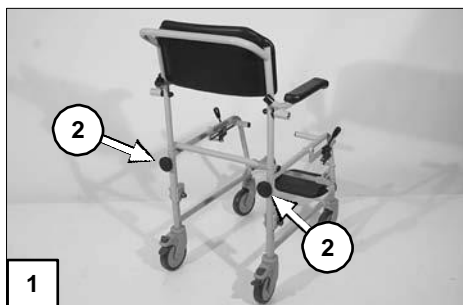

BRZDA

Zajištěním brzd [1] je sprchová a toaletní židle zabezpečena proti nechtěnému rozjezdu (aretační brzda).

Pozor:

Obsazenou židli se zajištěnými brzdami se nesmí nechat pohybovat.

- Abyste při brždění sprchové a toaletní židle nebo zajištění brzd při jízdě z kopce zabránili nechtěné jízdě do zatáčky, musíte zatáhnout obě brzdové páčky současně.
 - Podle spádu jízdní dráhy je třeba počítat s možností převrácení vozíku stranou.
- Neopírejte se tělem o boční brzdovou páčku (2).
- Brzdový účinek klesá při:
 - ojetém profilu pneumatik,
 - malém tlaku v pneumatikách,
 - mokrých pneumatikách,
 - uvolněné přítlačné brzdě.

Pozor:

- ! Při sníženém brzdném účinku nechejte vozík okamžitě opravit v odborném servisu.
- Sprchové a toaletní židle s polyuretanovými pneumatikami neodstavujte se zajištěnými přítlačnými brzdami.
 - Může dojít k trvalé deformaci běhounu pneumatiky.
- Sprchovou a toaletní židli pohánějte pokud možno pomocí obručí. – Možné nebezpečí zhmoždění v oblasti brzdy!



Přítlačná brzda

Páčky přítlačných brzd (1) umožňují postupné zbrzdění jízdní rychlosti (provozní brzda).

Provozní brzda

Tlačte rovnoměrně obě brzdové páčky jenom lehce dopředu, tím sprchovou a toaletní židli postupně zabrzdíte.



Zajištění přítlačných brzd

K zajištění sprchové a toaletní židle proti nechtěnému rozjezdu přepněte obě brzdové páčky dopředu až na doraz (2).

Upozornění:

Sprchovu a toaletní židli se zajištěnými brzdami se nesmí nechat pohybovat.



Uvolnění přítlačných brzd


Obě brzdové páčky přepněte dozadu až na doraz (1).

ŘÍDICÍ KOLEČKA S ARE- TACÍ

Zadní řídicí kolečka se dají zaaretovat [1].

Pozor:

Při zajištění pouze jedné brzdy volné kolo obíhá okolo kola zabržděného.
– Nebezpečí úrazu!

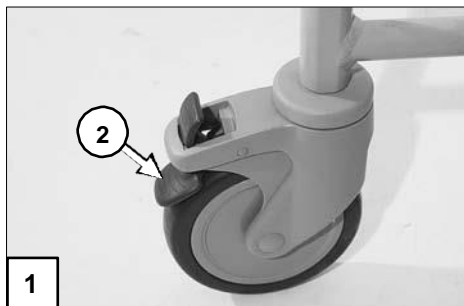


Zablokování řídicích koleček

K aretaci řídicích koleček sešlápněte velkou překlápěcí páčku nohou až na doraz (2).

Uvolnění řídicích koleček

K uvolnění řídicích koleček sešlápněte malou překlápěcí páčku nohou až na doraz (3).

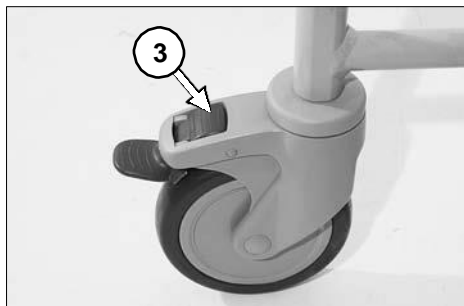

NEĎĚLENÁ PODNOŽKA

Nedělenou podnožku lze vyklopit dopředu z rámu [1].

Odklopení nedělené podnožky

Nejprve sundejte obě nohy z podnožky. Potom podnožku odklopte nahoru až na doraz [2].

Pozor:

- ! Odklopená nedělená podnožka není zaaretovaná a při přepravě sprchové a toaletní židle se může vyklopit dopředu. – V případě potřeby zajistěte!
- Při zatížení nedělené podnožky se sprchová a toaletní židle snadno převrátí dopředu. – Nebezpečí úrazu.



OPĚRKY RUKOU

Odklopení opěrky ruky

Opěrku ruky zvedněte nahoru až na doraz (3).

Sklopení opěrky ruky

Opěrku ruky sklopte dolů až na doraz do výchozí pozice (4).

Pozor:

- ! Při sklápění opěrky ruky nesahejte do oblasti dorazu na zádové trubce.
- – Nebezpečí zhmoždění!



SEDÁK

Sedák je za účelem čištění odnímatelný [1].

Sejmutí sedáku

Sedák uchopte za obě přední hrany a zvedněte ho nahoru z trubek rámu [2].

Potom sedák sejměte ze zadní příčné trubky [1].



Položení sedáku

Zadní vodící drážku na sedáku přitlačte na příčnou trubku rámu (3). Potom klipsy na spodní straně sedáku přitlačte na trubky rámu [4].

Pozor:



- ! Při pokládání nesahejte pod sedák. –
- Nebezpečí zhmždění!

Nasazení vložky do výřezu

Vložku umístěte podle tvaru do výřezu v sedáku (5).

Odstranění vložky z výřezu

Při použití toalety zvedněte vložku nahoru [2].

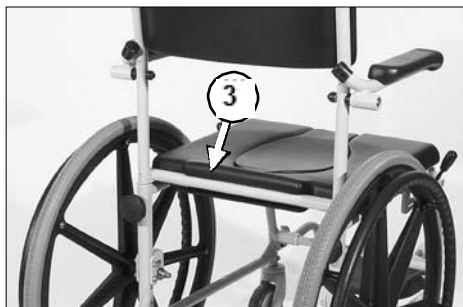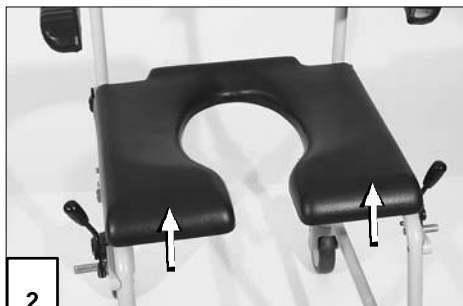

TOALETNÍ NÁDOBA



Toaletní sedák je opatřen vodicími lištami pro toaletní nádobu.


Toaletní nádoba se s víkem nebo bez víka zasune zezadu pod sedák do vodicích lišt.

Upozornění:

Poloha toaletní nádoby pod sedákem se při použití musí krýt s výřezem.

Pozor:

-  Po použití toaletní nádoby
-  a toaletní sedák důkladně očistěte a vydezinfikujte.


 Řiďte se pokyny v kapitole < *Dezinfekce* >.

POHÁNĚCÍ KOLA 24"

Poháněcí kola jsou uložena na rychloupínací ose.

☞ Při odnímání nebo nasazování nesmí na sprchové židli nikdo sedět.

Sprchová židle musí stát na rovném a pevném podkladu. Před demontáží kola zajistěte židli proti převrácení a rozjezdu.

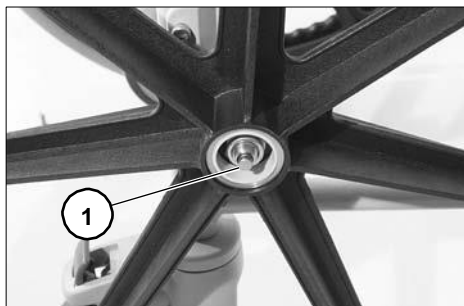

Rychloupínací osa

Poháněcí kola lze sundat a nasadit bez použití náradí.

– Nejprve odblokujte rychloupínací osu stiskem pružinového tlačítka (1), potom poháněcí kolo sejměte vytážením do strany.

K nasazení poháněcích kol odblokujte příslušnou rychloupínací osu stiskem pružinového tlačítka (1) a nasuňte ji až na doraz.

Pozor:


! Po nasazení poháněcího kola musí
● aretační tlačítko vyčnívat několik milimetrů z matice kola.

☞ Upozornění:

☞ Po každé montáži zkontrolujte zablokování tahem/tlakem na poháněcí kolo!

☞ Aretační čep udržujte v čistotě. Při znečištění pískem nebo zeminou nebo při zamrznutí vlhkého chladu může docházet k poruchám funkce.

☞ Pokud má poháněcí kolo příliš velkou vůli do strany nebo se rychloupínací osa nedá zablokovat, zajistěte okamžitě opravu u odborného prodejce.

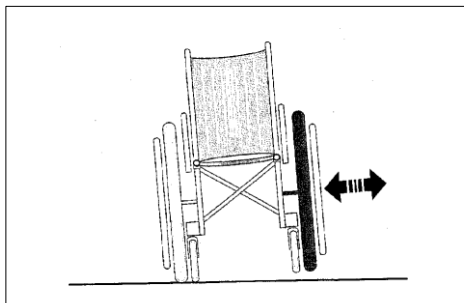

ÚDRŽBA

Stejně jako každý jiný technický produkt vyžaduje i sprchová a toaletní židle pravidelnou péči a údržbu. Níže uvedené pokyny pro péči a plán údržby popisují opatření, která je třeba provádět, aby vozík i po delším používání nabízel tyto vlastnosti:

- bezpečnost pro vás a pro ostatní,
- připravenost k provozu,
- zachování hodnoty.

Nedostatečná nebo zanedbaná péče a údržba vozíku znamená omezení odpovědnosti výrobce.

Čištění a péče

K ošetřování použijte čisticí a pečující prostředky bez obsahu silikonu na bázi vody.

- Řiďte se zde pokyny k použití od výrobce.

☞ Upozornění:

- ☞ K čištění sprchové a toaletní židle nepoužívejte vysokotlaký čistič!
- ☞ Čisticí prostředek by v každém případě měl mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič).
- ☞ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, např. ředidla, ani tvrdé kartáče atd.

Polstry

Polstry čistěte teplou vodou a mycím prostředkem.

Skvrny lze odstranit houbou nebo měkkým kartáčem.

☞ Upozornění:

Silné znečištění omyjte za použití běžného jemného pracího prášku.

Otřete čistou vodou a nechte uschnout.

Povrchová úprava

Kvalitním zušlechťením povrchů je zaručena optimální ochrana proti korozi.

- ☞ K péči o lak a chromované části doporučujeme běžné značkové prostředky k údržbě laku a čištění chromu.

- ☞ Pokud by povrchová vrstva byla poškrábaná apod., opravte poškozené místo naší lakovou tyčinkou, která je k dostání u odborného prodejce.

Příležitostné lehké namazání pohyblivých dílů olejem zajistí jejich dlouhou funkčnost.

- ☞ Řiďte se pokyny v kapitole < *Plán údržby* >.

Dezinfekce

Jestliže výrobek používá více osob (např. v pečovatelském ústavu), je předepsaná aplikace běžných dezinfekčních prostředků.

- ☞ Před dezinfekcí polstry a madla očistěte.
- ☞ Dezinfekce postřikem nebo otěrem je povolena s odzkoušenými a uznanými dezinfekčními prostředky.

☞ Řiďte se zde pokyny k použití od výrobce.

Seznam dezinfekčních prostředků a metod odzkoušených a uznaných Institutem Roberta Kocha naleznete na adrese:

< <http://www.rki.de> >.

☞ Při používání dezinfekčních prostředků se může stát, že podle okolností povrchy při jejich používání trpí, což může omezit dlouhodobou funkčnost konstrukčních dílů.

Recirkulace

Před každou recirkulací se vozík musí podrobit kompletní prohlídce.

☞ **Upozornění:**

Hygienická opatření nutná pro opětovné použití (recirkulaci) je nutné provádět podle platného hygienického plánu.

☞ Pokud prodejce na vašem vozíku provedl úpravy nebo podstatné změny bez použití originálních náhradních dílů, může to podle okolností znamenat, že vozík bude třeba znovu uvést do oběhu. To může mít za další následek, že prodejce bude případně muset provést nové hodnocení shody a zkoušky.

Opravy

Za účelem provedení opravy se s důvěrou obraťte na místního prodejce. V provádění prací se vyznají a mají školený personál.

Náhradní díly

Náhradní díly kupujte pouze u prodejce. Při opravě používejte pouze originální náhradní díly!

☞ **Upozornění:**

Konstrukční díly cizích firem mohou vyvolávat poruchy.

Pozor:

! Díly nebo konstrukční skupiny, které
● mají význam pro bezpečnost, smí montovat pouze odborný servis. – Nebezpečí úrazu!

Pro správnou dodávku náhradního dílu je v každém případě nutné uvádět příslušné sériové číslo vozíku (SN)! Toto číslo naleznete na typovém štítku.

U každé změny/ modifikace vozíku, kterou prodejce provedl, je třeba k návodu k obsluze vozíku přiložit doplňující informace jako např. pokyny pro montáž/ obsluhu, uvést datum změny a uvádět je při objednávkách náhradních dílů.

Jen tak nebudou u pozdějších objednávek náhradních dílů uvedeny žádné nesprávné objednávací údaje.

Likvidace

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na městském či obecním úřadě.

- Obal je recyklovatelný.
- Všechny kovové díly lze vrátit do sběru.
- Plastové díly jsou recyklovatelné.

Údržba

Níže uvedený plán údržby představuje vodítko k provádění údržbových prací.

- ☞ Nepředstavuje skutečný rozsah nutných prací zjištěných na vozíku.

Plán údržby

KDY	CO	POZNÁMKA
Před použitím	<p>Zkontrolujte bezvadnou funkci brzd</p> <p>Brzdovou nebo překlápěcí páčku stiskněte až na doraz. Zabržděná kola/kolečka se za provozních podmínek již nesmí otáčet. Pokud ano, nechejte brzdy opravit v autorizovaném odborném servisu.</p>	Kontrolu proveďte sami nebo s další osobou.
Před použitím	<p>Kontrola opotřebení přítlačné brzdy</p> <p>Pohněte brzdovou páčkou do strany</p>	Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby. Jakmile se vůle brzdové páčky zvětší, obratem vyhledejte odborný servis za účelem opravy. – Nebezpečí úrazu!
Před použitím	<p>Zkontrolujte pevné usazení všech konstrukčních dílů</p> <p>Upevnění zádových trubek. Upevnění poháněcích kol. Upevnění opěrek rukou, sedáku a nedělené podnožky.</p>	Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby.
Před použitím	<p>Zkontrolujte tlak v pneumatikách</p> <p>Standardní pneumatiky: 4 bar = 56 psi</p> <p>Vysokotlakové pneumatiky: 8,0 bar = 116 psi</p>	Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby. Použijte tlakoměr, nebo pokud není k dispozici, proveďte metodu „stisku palcem“ nebo podobnou.

KDY	CO	POZNÁMKA
Před použitím	Zkontrolujte profil pneumatik	Sami proveďte vizuální prohlídku. Při sjetém profilu pneumatiky nebo jejím poškození se obraťte na odborný servis za účelem opravy.
Před použitím	Zkontrolujte pevnost zádo- vých trubek Zkontrolujte trubky rámu, zda nejsou poškozené	Kontrolu proveďte sami nebo ji provede další osoba. Při deformaci nebo vzniku trhlin v oblasti svaru se urychleně obraťte na odborný servis za úče- lem opravy. – Nebezpečí úrazu!
Každých 8 týdnů (podle četnosti po- užívání)	Několika kapkami oleje ošetřete následující kon- strukční díly – Držák brzdové páčky.	Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby. Před olejováním zbavte tyto díly zbytků starého oleje. Dbejte na to, aby pře- bytečný olej neznečistil okolí (např. váš oděv).
Každých 8 týdnů (podle ujeté vzdá- lenosti)	Zkontrolujte pevnost všech šroubových spojů	Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby.
Každé 6 měsíce (podle četnosti po- užívání)	Zkontrolujte – čistotu, – celkový stav.	Viz kapitola < Údržba >. Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby.

Propíchnutí pneumatiky

Při propíchnutí pneumatik špičatými předměty jako jsou např. hřebíky, šrouby, skleněné střepy atd. poškozené místo opravte (záplatou) nebo vyměňte duši.

Pozor:

- ! Při výměně kola nesmí na sprchové
- a toaletní židli nikdo sedět. Sprchová židle musí stát na rovném a pevném podkladu. Před demontáží kola zajistěte židli proti rozjezdu.

Výměna pneumatik

Upozornění:

Pneumatiky vyměňujte vždy v páru.
– Dvě rozdílně sjeté pneumatiky mají negativní vliv na přímou jízdu sprchové židle.

Pozor:

- ! Před opravou pneumatiky otevřete
- ventilek, abyste vypustili stlačený vzduch, který je ještě v duši.

Upozornění:

Tlak vzduchu v pneumatikách je uveden na plášti pneumatiky.

Výměna pneumatik poháněcích kol

Pozor:


- ! Nadzvednutí a vytažení pláště se
- provádí příslušnými montážními pákami (příslušenství jízdního kola).

Nepoužívejte jako páku šroubováky ani jiné špičaté/ostře předměty!

Nastavení přítlačných brzd

Funkce brzd se musí podle < *Plán údržby* > a po každém novém nasazení poháněcích kol zkontrolovat a popř. se brzdy musí nově nastavit.

- Uvolněte svěrací šroub (1) jedné přítlačné brzdy.
- Potom příslušnou brzdu odpovídajícím posunutím přednastavte.

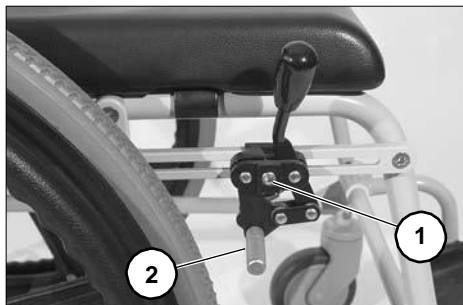

Přítlačná brzda:

- Čep nedotažené přítlačné brzdy (2) posuňte na cca 5 mm - 10 mm před poháněcí kolo a vyrovnejte do pravého úhlu s tímto kolem.
- Svěrací šroub (1) opět utáhněte.

Protilehlou přítlačnou brzdu nastavte výše popsaným postupem.

Přítlačné brzdy nastavte podle

- pneumatik poháněcích kol,
- tlaku vzduchu v pneumatikách a
- hmotnosti osoby

rovnoměrně. – Nebezpečí úrazu při jednostranném brzděném účinku!

Jemné nastavení přítlačných brzd

- Uvolněte svěrací šroub (1).
- Nepatrným posunem příslušné přítlačné brzdy se provede požadované jemné nastavení.
- Svěrací šroub (1) opět utáhněte.

Upozornění:

Zkontrolujte funkci a pevnost přítlačné brzdy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model 8013039 / 8013040 / 8013041

Všechny údaje v následujícím výčtu se vztahují na standardní provedení daného modelu.

Rozměrová tolerance +/-1,5 cm, +/-2°

Šířka (kolečka 5"):..... 54 cm
Šířka (kola 24"):..... 63 cm
Délka (kolečka 5"):..... 89 cm
Délka (kola 24"):..... 102 cm
Výška:..... 95,5 cm
Hloubka sedu:..... 42 cm
Výška sedu:..... 53 cm
Šířka sedu:..... 43 cm
Od sedáku po područku:..... 25 cm

Výška překážky (kolečka 5"):... 43,5 cm

Výška překážky (kola 24"): 45,0 cm

Max. zatížení..... 120 kg

Hmotnosti:

hmotnost (kolečka 5"): 13,0 kg

hmotnost (kola 24"):..... 17,5 kg

Typový štítek

Typový štítek se nachází na pravé spodní trubce rámu.

RUČENÍ / ZÁRUKA

Za tento výrobek přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonné ručení a záruku v souladu s naším prokázáním kvalitním servisem. V případě záručních nároků se s níže uvedeným ZÁRUČNÍM KUPÓNEM s vyplněnými potřebnými údaji o označení modelu, čísle dodacího listu s datem dodávky a sériovým číslem (SN) obraťte na vašeho prodejce.

Sériové číslo (SN) naleznete na typovém štítku.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení resp. záruky je v každém případě používání výrobku podle účelu určení, používání originálních náhradních dílů u prodejců a pravidelné provádění údržby a prohlídek.

U poškození povrchu a škod způsobených vytlučenými připojovacími zdířkami je záruka vyloučena.

Dále jsou vyloučeny škody na elektronice, které byly způsobeny nesprávným čištěním parními tlakovými čističi, popř. úmyslným nebo neúmyslným namočením komponent vodou.

Poruchy způsobované zdroji záření jako jsou mobilní telefony s vysokým vysílacím výkonem, hi-fi zařízení a jiné silné rušivé zářiče mimo specifikace normy nelze uplatnit jako nároky z ručení resp. záruky.

Pozor:

- ! Nerespektování návodu k obsluze,
- neodborně prováděná údržba a ze-



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EWG pro zdravotnické prostředky.

jména technické změny a doplňky (nástavby) bez našeho souhlasu vedou k zániku jak záručních nároků, tak k ručení za výrobek všeobecně.

 **Upozornění:**

Tento návod k obsluze je součástí výrobku a při změně uživatele nebo majitele se k němu musí přiložit.

Technické změny ve smyslu pokroku si vyhrazujeme.

Záruční kupón

Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a zašlete kopii.

Ručení / Záruka

Model:

Č. dodacího listu:

SN (viz typový štítek):

Datum dodávky:

Razítko prodejce:



PRODEJCE A SERVIS

Meyra ČR
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4

Tel. prodejna: +420 272 761 102

Tel. servis: +420 272 661 430

www.meyra.cz

VÝROBCE:

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf
Poštovní příhrádka 1 703 · D-32591 Vlotho
Tel. +49 (0)5733 922-311
www.meyra-ortopedia.de