

# Čtyřkolové chodítko Rolly Up

## Návod k použití



Chodítko Rolly Up je skládací čtyřkolové chodítko s možností nastavení jak výšky sedátka (délkou noh s kolečky) a tak i výšky rukojeti.

Jestliže se při užívání chodítka setkáte s jakýmkoliv problémem obraťte se s důvěrou na Vašeho prodejce.

### Návod k použití:

- 1) Sundejte všechny plastové obaly.
- 2) Postavte rám chodítka na rovnou podložku.
- 3) Do rámu chodítka zasuňte nohy s kolečky podle číselného označení. Dodržte přesně číslování! Pořadí čísel určuje stranu a přední/zadní polohu.
- 4) Nohy chodítka zafixujte ve zvolené poloze (určující výšku sedátka) 4 šrouby. Potom nastavte madla s rukojetí do požadované výšky a šrouby opět pevně utáhněte.

### Používání chodítka:

Obsluha chodítka je velmi jednoduchá. Chodítko tlačte před sebou, ke snížení rychlosti pohybu použijte brzdy. Před použitím sedátka se ujistěte, že je chodítko zabezpečeno proti nežádoucímu pohybu.

Brzdy: Přibrzdění se provádí stiskem brzdového oblouku na rukojeti. Zabrzdění provedte odtlačení oblouku brzdý až do mírného zaklapnutí. Odbrzdění provedte opětovným přitazením oblouku brzdý.

### Bezpečnostní pokyny:

Chodítko používejte, pokud možno, na rovných plochách a snažte se vyhnout všem nerovnostem jako jsou vpustě do kanálů a podobně. V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší chodítko nepoužívat.

Nosnost chodítka:	130 kg
Hmotnost:	6,5kg
Výška sedátka od země:	46-56cm
Výška rukojeti:	76-96cm (při změně nastavení délky noh s kolečky)

Údržba: K čištění chodítka používejte běžné čisticí a desinfekční prostředky.

Pravidelně kontrolujte technický stav chodítka.

Materiál: Hliníkový rám, plast, polyuretan.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Vyrábí: Movi SpA - Divisione Wimed, Itálie

Dodává: ORLANDINO s.r.o., Elišky Přemyslovny 433, Praha 5, Tel: 257 923 005

[orlandinosro@seznam.cz](mailto:orlandinosro@seznam.cz)

Datum poslední revize: 10. 11. 2016