




SPRCHOVACÍ ŽIDLE 2193 s U výřezem


Sprchovací židle je určena pro sprchování pro osob, které nevydrží dlouho stát a pro vozíčkáře. Sedátko i opěradlo jsou perforované pro snazší odtékání vody. U výřez pro lepší možnost hygieny.

Návod k použití

Zkontrolujte, zda nechybí žádná součástka znázorněná na obrázku

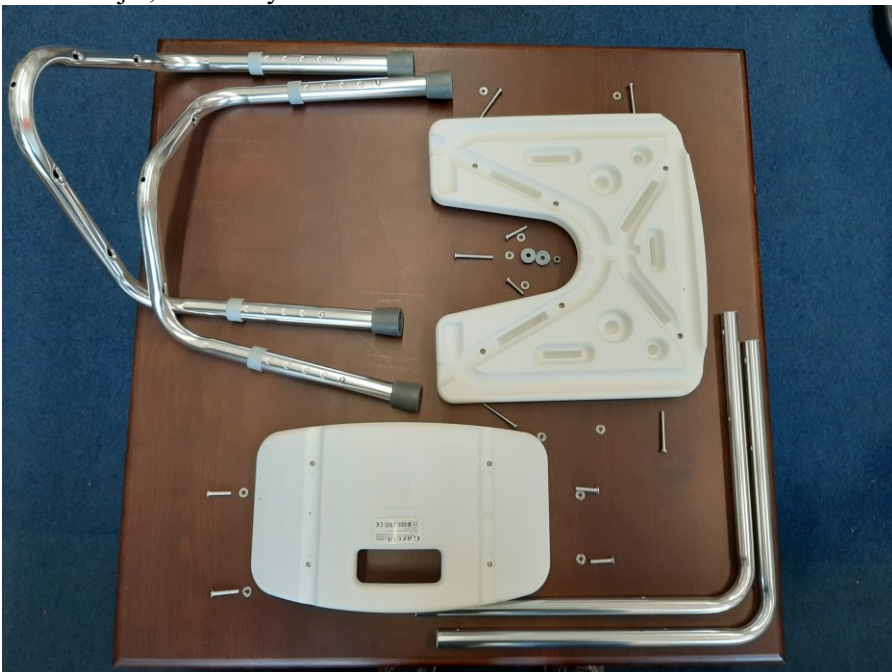

1. Položte sedák vrchní plochou na stůl.
2. Spojte nohy židle spolu k sobě jediným nejdelším šroubem a mezi trubky vložte 2 plastové distanční podložky s vykrojením pro trubku. Vložte podložku pod aretační matici a utáhněte. Přiložte na obrácený sedák viz obrázek.

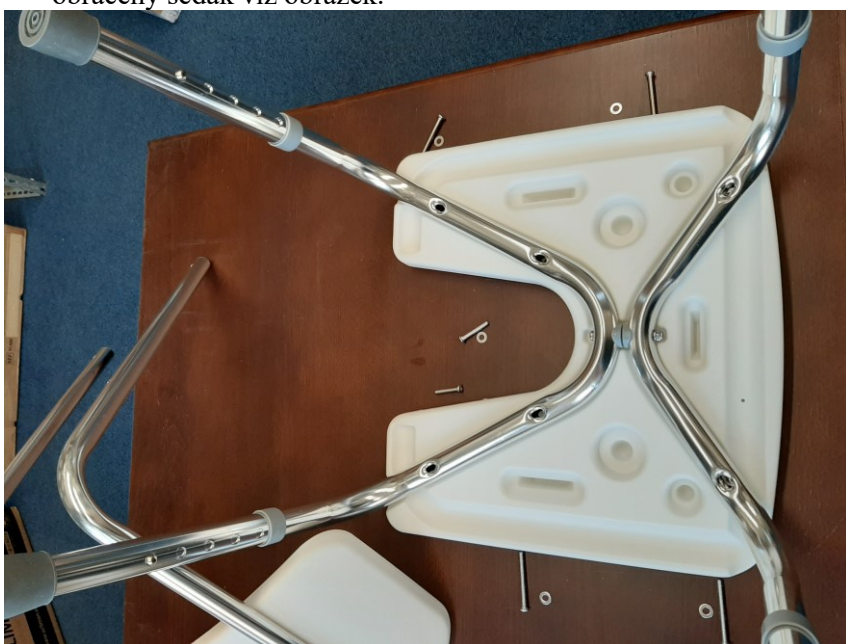

3. Přišroubujte krátkými šrouby skrz otvory nejbližší výřezu.
4. Připevněte opěrku zad k trubkám krátkými šrouby



5. Položte trubky s opěrkou zad na překřížené sešroubované nožičky a dlouhými šrouby připevněte k sedátku



Upozornění

Před použitím pomůcky si pozorně přečtete tento návod. S případnými dotazy ohledně používání pomůcky se obraťte na svého lékaře nebo na prodejce.

1. Nepřekračujte uvedenou maximální možnou hmotnost uživatele nebo maximální nosnost pomůcky.
2. Pomůcku sestavujte podle přiloženého návodu.
3. Před použitím zkontrolujte, zda je pomůcka stabilní a pevná a zda jsou všechny šroubky pevně utaženy.
4. Nepoužívejte pomůcku, je-li poškozená nebo opotřebovaná! Kontaktujte prodejce za účelem výměny poškozených nebo opotřebovaných částí.
5. Neskladujte výrobek při extrémních teplotách ($< 0^{\circ}\text{C}$ a $> 40^{\circ}\text{C}$) nebo u otevřeného ohně.
6. Pro čištění pomůcky používejte běžné neabrazivní čisticí prostředky. Utřete měkkým hadrem do sucha.
7. Požívá-li pomůcku více lidí (např. v ústavu), postupujte při desinfekci podle pokynů hygienika.

U pomůcek s nastavitelnou výškou zkontrolujte, zda jsou všechny nohy pomůcky nastavené na stejnou výšku.

1. Připevnění pomocí sponek: Zkontrolujte, zda sponka dokonale obepíná tyč a zda prochází na obou stranách otvory v tyči.
2. Připevnění pomocí kolíčků: Zkontrolujte, vykukuje-li celý kolíček ven z otvoru v tyči.
3. Připevnění pomocí černé svorky: Ujistěte se, že se svorka nemůže otáčet.

Materiál: hliník, polyethylen

Sedátko š x h	41x38cm
Nastavitelná výška sedátka	35-45 cm
Maximální hmotnost uživatele	110 kg
Hmotnost židličky	3,2 kg

Výrobce: WALKING STICKS INT, S.L., Carretera Segorbe, 2400 SEGORBE

Distribuce: Orlandino s.r.o., E Přemyslovny 433, 156 00 Praha 5, orlandinosro@seznam.cz