

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA DO SPRCHY

509 TRI



POUŽITÍ

Sedačky do sprchy jsou součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňují pacientům osobní hygienu, eliminují riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde k osobní hygieně není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavený sprchový kout.

POPIS

Rám sedačky je vyroben z vylehčených duralových trubek a je doplněn plastovým hygienickým sedátkem. Opěrné nohy umožňují nastavení výšky sedu a jsou opatřeny protiskluzovými nástavci.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním sedačky si přečtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Při montáži sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je sedačka suchá a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Sedačku nikdy nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 100 kg.


Při užívání sedačky musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.

Pro zachování maximální stability a bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jisticích prvků.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

MONTÁŽ SEDAČKY A NASTAVENÍ VÝŠKY SEDU

Položte plastovou sedačku horní stranou na podložku. Zasuňte všechny tři nohy do otvorů (A) a zajistěte je zacvaknutím „V“ pojistky (B). Pro nastavení výšky sedačky zamáčkněte z obou stran „V“ pojistku (C) a nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech nohou, které musí být nastaveny stejně.

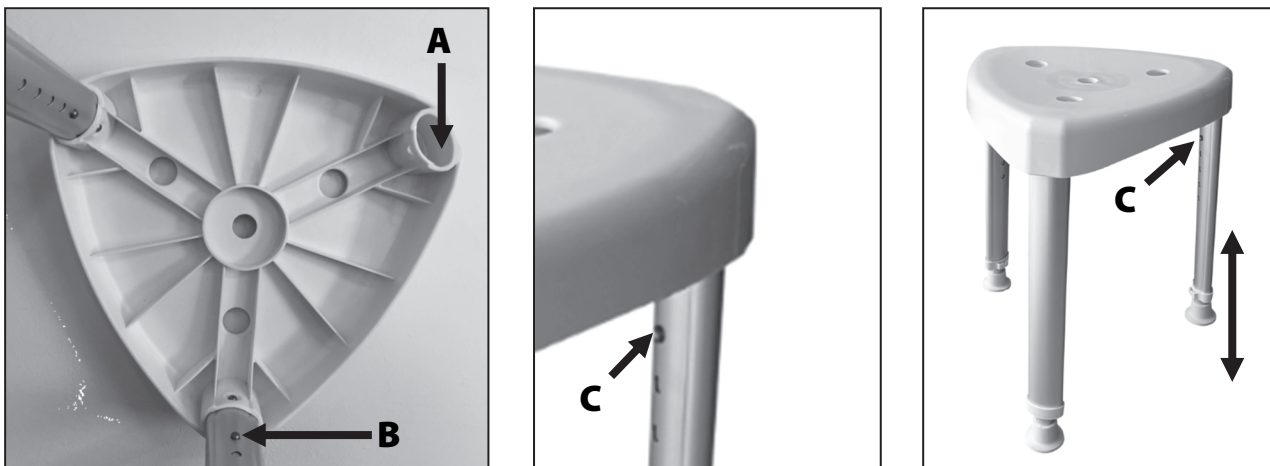

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.