



Chodítko s hliníkovým rámem a 4 kolečky o průměru 200 mm má košík s deskou na transport pokrmů, nápojů a dalších předmětů. Spojené brzdy na rukojetích umožňují přizpůsobit rychlost chůze potřebám uživatele. Bezpečné brždění může provádět i osoba se slabým úchopem jedné ruky. Výšku rukojetí je možné nastavit. Chodítko je skládací, jeho součástí je taška.

## Technické údaje:

Celková šířka chodítka ..... 57 x 77 cm  
Výška rukojetí ..... 86 – 97 cm  
Hmotnost ..... 6,6 kg  
Nosnost ..... 136 kg

## Návod k použití:

### A. První rozložení chodítka

1. Vyjměte rám z krabice a zasuňte přední kola, aretačními kolíčky upevněte.
2. Zasuňte zadní kola a madla s brzdami.
3. Nastavte a zajistěte výšku madel pomocí šroubů.
4. Připevněte tácek na okraj košíku.

### B. Složení chodítka

1. Odkolpte sedátko a za kovové madle zvedněte chodítko. Tímto se složí.

## Upozornění:

Chodítko používejte pokud možno na rovných plochách a snažte se vyhnout všem nerovnostem jako jsou vpustě do kanálů a podobně. Za mokra a sněhu pamatujte na to, že brzdy chodítka ztrácejí na účinnosti a hrozí nebezpečí úrazu a poškození chodítka. V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší chodítko nepoužívat.

Brzdy jsou nastavitelné a pro bezpečnost provozu je nutné kontrolovat, zda jsou obě nastaveny stejně. Chodítko se nesmí přetěžovat - maximální hmotnost uživatele je 136 kg.

## Údržba:

Pro setření prachu a nečistot používejte měkký vlhký hadřík, na silnější nečistotu použijte běžné čisticí prostředky.

**Materiál:** hliník, nylon, plast.

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

**Vyrábí:** Walking Stick International, S.L., Segorbe, Španělsko

**Dodává:** Orlandino s.r.o., Elišky Přemyslovny 433, Praha 5, Tel: 257 923 005

[orlandinosro@seznam.cz](mailto:orlandinosro@seznam.cz)

Datum poslední revize: 22. 11. 2020