



MA B100_B1110 02_A_CZE_03-2018

SPRCHOVACÍ LŮŽKO NEFTI

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. KÓDY	3
2. ÚVOD	3
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	3
4.1 Normy a referenční směrnice	4
5. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ	4
6. OBECNÝ POPIS	4
7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	5
8. POUŽITÍ	5
8.1 Použití modelu HYDRAULIC-BI100 (hydraulický/pneumatický)	5
8.2 Použití modelu ELECTRIC TIMOTION-BI110 (elektrický)	5
8.3 Použití sklopných postranic (BI100-BI110)	6
9. ÚDRŽBA	6
10. ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE	6
11. PODMÍNKY LIKVIDACE	6
11.1 S výrobkem nikdy nenakládejte jako s běžným domácím odpadem. Výrobek zlikvidujte ve sběrném dvoře s ohledem na recyklaci.	6
11.2 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku, jak požaduje evropská směrnice 2002/96/ES	6
11.3 Nakládání s použitými bateriemi (směrnice 2006/66/ES)	7
12. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ	7
13. NÁHRADNÍ DÍLY	10
14. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	10
14.1 Obecné specifikace	10
14.2 NEFTI BI100 parametry	11
14.3 NEFTI BI110 parametry	11
15. ZÁRUKA	11
16. OPRAVY	12
16.1 Záruční opravy	12
16.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	12
16.3 Výrobky, které nejsou vadné	12
17. NÁHRADNÍ DÍLY	12
18. DOLOŽKA O VÝLUCE ZE ZÁRUKY	12

CE Zdravotnický prostředek třídy I podle směrnice 93/42 / EHS a následných změn

1. KÓDY

BI100 Sprchovací lůžko **Nefti HYDRAULIC**, maximální nosnost (včetně vody) 180 kg

BI110 Sprchovací lůžko **Nefti ELECTRIC**, maximální nosnost (včetně vody) 200 kg

2. ÚVOD

Design a kvalita lůžek Nefti zajišťují maximální komfort, bezpečnost a spolehlivost. **Sprchová lůžka MOPEDIA Nefti vyráběná společností Moretti S.p.A** jsou navržena a vyrobená tak, aby splňovala všechny vaše potřeby pro praktické, správné a bezpečné použití. Tato příručka obsahuje instrukce pro správné používání tohoto zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím sprchového lůžka si přečtěte celý návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a poradí.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Sprchová lůžka MOPEDIA Nefti od společnosti Moretti S.p.A jsou určena pro péči o pacienty při mytí/sprchování v horizontální nebo skloněné poloze (maximálně 5°) s pomocí asistenta, který postupuje dle pokynů a provádí mytí. Lůžko nemůže být použito pouze jednou osobou.

VAROVÁNÍ!



- Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v tomto návodu
- Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli následky nesprávného použití tohoto výrobku a neoprávněných zásahů do rámu výrobku
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A tímto prohlašuje, na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a prodávané firmou Moretti S.p.A. a patřící do kategorie SKEMA jsou v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými ve směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dalšími jejími změnami. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že:

1. Dané zařízení splňuje základní požadavky přílohy I směrnice 93/42/EHS podle přílohy VII výše uvedené směrnice
2. Dané zařízení **NENÍ MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ**
3. Dané zařízení **NENÍ URČENÉ PRO KLINICKÉ VYŠETŘENÍ**
4. Dané zařízení se prodává v **NESTERILNÍM** balení
5. Dané zařízení by mělo být považováno za náležící do třídy I.
6. Dané zařízení **NELZE NEPOUŽÍVAT/INSTALOVAT** pro jiný účel, než který je výslovně uveden společností Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A udržuje a předkládá dokumentaci potvrzující shodu se směrnicí 93/42/EHS a další její změny příslušným orgánům

4.1 Normy a referenční směrnice

Pro zajištění bezpečnostních standardů pro uživatele, testuje a respektuje společnost Moretti S.p.A směrnici:
 - EN ISO 12182 (Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Všeobecné požadavky a metody zkoušení.)

5. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ




VAROVÁNÍ!

- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem, které by mohly zachytit končetiny a způsobit zranění

- Pro správné používání zařízení si, prosím, přečtěte tento návod, přičemž věnujte zvláštní pozornost údržbě a úkonům před každým použitím.
- Používání zařízení konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Udržujte zabalený výrobek od zdrojů tepla, obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení je určena opotřebením dílů, které nejsou opravitelné a/nebo vyměnitelné.
- Vždy věnujte pozornost dětem v blízkosti zařízení.
- Nepřekračujte nosnost, včetně vody na mytí.
- Neodklápějte postranice během přepravy, ani během mytí pacienta.
- Nečistěte agresivními výrobky, jako jsou čpavek, bělidla, kyseliny a brusné prostředky.
- Nezatěžujte okraje mycí plochy plnou vahou pacienta.
- Sprchová lůžka MOPEDIA Nefti musí být používána pouze proškoleným zdravotnickým personálem.

6. OBECNÝ POPIS

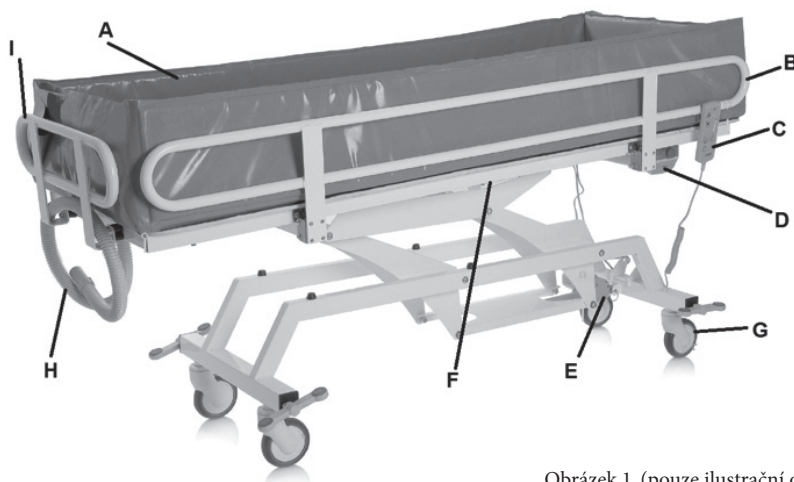

Obrázek 1 (pouze ilustrační obrázek)

- A. Omyvatelná matrace
- B. Sklopná postranice o 180 °
- C. Dálkový ovladač (pouze pro BI110)
- D. Řídicí jednotka s baterií (pouze pro BI110)
- E. Zdvih mycí plochy (hydraulický BI100, elektrický BI110)
- F. Náklon mycí plochy (plynová pružina BI100, elektrická BI110)
- G. Kola
- H. Odtoková trubka
- I. Hlavová/nožní postranice

7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Před mytím nebo přemístěním pacienta ověřte, že jsou kola zabrzděna a postranice jsou zvednuty;
- Během převozu se vyhněte překážkám, které by mohly způsobit převrácení.




VAROVÁNÍ!

- Zkontrolujte stav matrace a odtokové trubky, škody způsobené opotřebením mohou vést k úniku vody během mytí

8. POUŽITÍ

8.1 Použití modelu HYDRAULIC-BI100 (hydraulický/pneumatický)

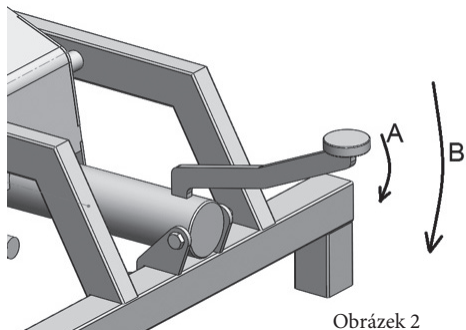

Obrázek 2

- Pro zvednutí mycí plochy, opakovaně stlačte zdvihový pedál, jako na obr. 2 (A). Pro spouštění lůžka důkladně stlačte zdvihový pedál (B)
- Pro nastavení sklonu mycí plochy odblokujte plynovou pružinu pomocí páky na středu mycí plochy a nastavte sklon (tuto operaci provádějte bez zatížení lůžka)

8.2 Použití modelu ELECTRIC TIMOTION-BI110 (elektrický)



Obrázek 3

- Před každým použitím ověřte, zda je baterie řádně zasunuta do speciálního místa řídicí jednotky, a že je nabitá, baterii nelze nabíjet během použití.
- Stiskněte tlačítko 1 pro zvýšení výšky mycí plochy
- Stiskněte tlačítko 2 pro snížení výšky mycí plochy
- Stiskněte tlačítko 3 pro zvýšení sklonu mycí plochy
- Stiskněte tlačítko 4 pro snížení sklonu mycí plochy

- Nouzové zastavení: na řídicí jednotce je červené tlačítko "STOP", jeho stiskem zablokujete všechny příkazy. Pro odblokování funkcí otočte červeným tlačítkem ve směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.

- Jak dobít baterie

POZNÁMKA: Zajistěte, aby bylo vypnuté červené nouzové tlačítko. Otočte jím a vytáhněte jej.

- Připojte nabíječku do zásuvky a poté na vstup řídicí jednotky (po odstranění příslušného ochranného krytu).
- Na nabíječce je LED dioda, která během nabíjecí fáze svítí oranžově. Nabíjejte baterii, dokud LED nezačne svítit zeleně.
- Před použitím sprchového lůžka nezapomeňte odpojit nabíječku.
- Před použitím sprchového lůžka nabíjejte baterie nejméně 6 hodin.

8.3 Použití sklopných postranic (BI100-BI110)

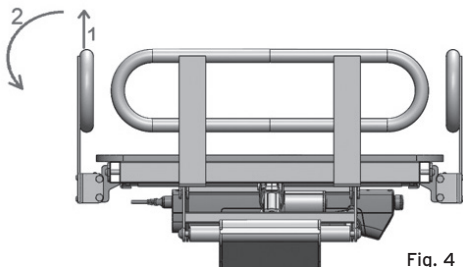


Fig. 4

- Oběma rukama zvedněte postranici pro odemčení (1);
- Nyní se může postranice volně otočit, při odklopení držte postranici po celou dobu pohybu, zabraňte nárazu (2)
- Chcete-li postranici vrátit, proveďte stejné operace v opačném pořadí.

9. ÚDRŽBA

Než jsou produkty Mopedia společnosti Moretti uvedeny na trh, jsou pečlivě zkontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme, aby byl výrobek zkontrolován nejméně každé 2 roky výrobcem či autorizovaným servisem. V případě oprav musí být použity pouze originální náhradní díly a originální příslušenství.

- Je velmi důležité, aby bylo sprchovací lůžko zkontrolováno před každým použitím. Zejména se ujistěte, že jsou všechny šrouby dobře utažené.
- Sprchovací lůžko by se mělo volně pohybovat v případě, že jsou kola odbržděna.
- Zkontrolujte brzdy kol.
- Je velmi důležité pravidelně ověřovat, zda jsou spojovací čepy/mechanické spoje a příslušné synchronní kroužky dobře umístěny.
- Mechanické části musí být mazány olejem pro zlepšení plynulosti a odolnosti proti opotřebení.
- Věnujte pozornost mechanismu zvedání/sklápění mycí plochy. Namažte, jak je uvedeno výše, každé 2 až 3 měsíce.

10. ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE

Pro čištění plastových a kovových součástí přístroje používejte vlhký hadřík a neutrální čisticí prostředek. Nepoužívejte výrobky, které mohou výrobek poškrábat.

11. PODMÍNKY LIKVIDACE

 **11.1 S výrobkem nikdy nenakládejte jako s běžným domácím odpadem.**
Výrobek zlikvidujte ve sběrném dvoře s ohledem na recyklaci.

 **11.2 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku, jak požaduje evropská směrnice 2002/96/ES**

Po skončení životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s normálním komunálním odpadem. Musí být doručen do městského sběrného dvora nebo prodejci, pokud tyto služby poskytuje. Likvidace tříděného odpadu snižuje environmentální a zdravotní důsledky nesprávné likvidace.

Dále materiály, které tvoří výrobek, mohou být recyklovány, což vede k úsporám energie a zdrojů. Aby bylo možné zvýraznit povinnou likvidaci tříděného zdravotnického elektrozařízení, je samotný výrobek označen příslušným symbolem.

11.3 Nakládání s použitými bateriemi (směrnice 2006/66/ES)

Symbol na výrobku znamená, že baterie nesmí být likvidovány jako běžný domácí odpad. Ujistěte se, že jsou baterie správně likvidovány; zabraňuje se tak možným následkům nesprávné likvidace na životní prostředí a zdraví. Recyklace pomáhá zachovat přírodní zdroje. Odvezte nefunkční baterie do vhodného recyklačního centra. Podrobnější informace týkající se likvidace vybitých baterií nebo samotného produktu vám poskytne obec, místní oddělení pro odstraňování odpadů nebo prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.

12. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

Sprchovací lůžko NEFTI je určeno k použití v elektromagnetických podmínkách specifikovaných v následujících tabulkách. Uživatel zařízení NEFTI se musí ujistit, že jsou tyto podmínky během používání lůžka splněny.


Tabulka 1

Návod a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise		
Zařízení NEFTI je určeno k použití v následujících elektromagnetických podmínkách. Klient nebo uživatel musí zajistit, aby bylo zařízení použito v těchto podmínkách.		
Testy emisí	Shoda	Elektromagnetické prostředí - průvodce
RF emise CISPR 11	Skupina 1	Přístroj NEFTI využívá RF energii pouze pro nabíjení baterie. Jeho RF emise jsou proto velmi nízké a se vši pravděpodobností neinterferují s okolními elektronickými zařízeními.
RF emise CISPR 11	Třída B	Zařízení NEFTI je určeno pro použití ve všech budovách včetně domů a budov napojených přímo na nízkonapěťovou veřejnou rozvodnou síť pro domácí použití.
Emise proudu harmonických IEC 61000-3-2	-	
Kolísání napětí/flickr IEC 61000-3-3	V souladu	

Tabulka 2

Návod a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise			
Zařízení NEFTI je určeno k použití v následujících elektromagnetických podmínkách. Klient nebo uživatel musí zajistit, aby bylo zařízení použito v těchto podmínkách.			
Testy odolnosti	Zkušební úroveň IEC 60601	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV vzduch	± 6 kV kontakt ± 8 kV vzduch	Informace pro použití zařízení a nabíjení baterie. Podlaha musí být dřevěná, betonová nebo keramická. Pokud je podlaha pokrytá syntetickým materiálem, musí být relativní vlhkost alespoň 30%.
Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů IEC 61000-4-4	±2KV pro elektrické vedení ± 1 kV pro linky I / O	±2KV pro elektrické vedení ± 1 kV pro linky I / O	Kvalita napájecí sítě musí při nabíjení baterie odpovídat komerčním či nemocničním standardům.
Rázový impulz IEC 61000-4-5	1 kV protifázové ±2 KV soufázové	1 kV protifázové ±2 KV soufázové	Kvalita napájecí sítě musí při nabíjení baterie odpovídat komerčním či nemocničním standardům.
Úbytky napětí, krátké přerušení a změny napětí na zdrojích napájení IEC 61000-4-11	<5% UT (> 95% vynechání UT) pro 0,5 cyklů 40% UT (60% UT vypadá) pro 5 cyklů 70% UT (30% UT vypadla) pro 25 cyklů <5% UT (> 95% UT vypadnout) po dobu 5 s.	<5% UT (> 95% vynechání UT) pro 0,5 cyklů 40% UT (60% UT vypadá) pro 5 cyklů 70% UT (30% UT vypadla) pro 25 cyklů <5% UT (> 95% UT vypadnout) po dobu 5 s.	Kvalita napájecí sítě musí při nabíjení baterie odpovídat komerčním či nemocničním standardům.
Elektromagnetická kompatibilita (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetická pole by měla být na hodnotách typického umístění v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí. (Platí jak pro používání zařízení, tak pro nabíjení baterie).
Poznámka: UT je síťové napětí střídavého proudu používané pro testování.			

Table 3

Návod a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost			
Zařízení NEFTI je určeno k použití v následujících elektromagnetických podmínkách. Klient nebo uživatel musí zajistit, aby bylo zařízení použito v těchto podmínkách.			
Testy odolnosti	Zkušební úroveň IEC 60601	Úroveň shody	Elektromagnetické prostředí
RF šířené vedením IEC 61000-4-6	3 V efekt. Od 150 KHz do 80 MHz	3 V efekt.	Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení by se neměla používat v blízkosti části [zařízení nebo systému], včetně kabelů, na vzdálenost menší než je doporučená oddělovací vzdálenost vypočtená z rovnice vztahující se k frekvenci vysílače. Doporučená oddělovací vzdálenost: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ od 80 MHz do 800 MHz $d = 2,3$ od 800 MHz do 2,5 GHz $d = 7,7 \text{ m}$ během procesu nabíjení kde "P" je maximální výstupní výkon vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače a "d" je doporučená vzdálenost v metrech (m). Síly polí z pevných RF vysílačů, které jsou určeny elektromagnetickým průzkumem lokality, by měly být nižší než úroveň souladu v každém kmitočtovém pásmu. V okolí zařízení označených tímto symbolem může dojít k rušení: 
Vyzařované RF IEC 61000-4-3	3 V/m Od 80 MHz do 2.5 GHz	3 V/m	
POZNÁMKA 1: U 80 MHz a 800 MHz použijte vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo. POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem struktur, objektů a lidí.			
a Intenzita pole pro pevné vysílače, jako jsou základnové stanice pro radiotelefony (mobilní a bezdrátové) a pozemní mobilní radiostanice, amatérské rádiové zařízení, AM a FM rádiové vysílače a televizní vysílače, nemusí být teoreticky přesně známa. Aby bylo možné vytvořit elektromagnetické prostředí způsobené pevnými RF vysílači, musí být na místě provedena kontrola. Pokud intenzita elektromagnetického pole naměřená na místě, kde se Nefti používá, přesahuje výše uvedenou úroveň shody RF, musí být provoz Nefti sledován. Pokud jsou pozorovány abnormality, mohou být nutná doplňková opatření, jako je například změna orientace nebo přemístění.			
b Intenzita pole v kmitočtovém pásmu od 150 kHz do 80 MHz by měla být menší než 3 V/m.			

Tabulka 4

Doporučená vzdálenost mezi přenosnými a mobilními rádiovými komunikačními zařízeními a NEFTI						
Zařízení NEFTI je určeno k provozu v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou RF rušení pod kontrolou. Klient nebo uživatel NEFTI může přispět k zabránění EM interference zajištěním minimální vzdálenosti mezi mobilními a přenosnými RF komunikačními zařízeními (vysílači) a nabíječkou NEFTI během nabíjení a vnitřním zařízením NEFTI během jeho provozu, jak je uvedeno níže. S ohledem na maximální výstupní výkon vysílačů.						
Testy	Vzdálenost ovlivňující frekvenci vysílače m					
Maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače W	Během nabíjení baterie	Během použití NEFTI	Během nabíjení baterie	Během použití NEFTI	Během nabíjení baterie	Během použití NEFTI
	od 150 kHz do 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	od 150 kHz do 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	od 80 kHz do 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	od 80 kHz do 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	od 800 kHz do 2,5 GHz $d = 1,2\sqrt{P}$	od 800 kHz do 2,5 GHz $d = 1,2\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.12	0.12	0.23	0.23
0.1	0.38	0.38	0.38	0.38	0.73	0.73
1	1.2	1.2	1.2	1.2	2.3	2.3
10	3.8	3.8	3.8	3.8	7.3	7.3
100	12	12	12	12	23	23
Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výstupní výkon není uveden výše, lze vypočítat doporučenou vzdálenost pro oddělení d v metrech (m) pomocí rovnice použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve Watech (W), jak je udává výrobce vysílače.						
POZNÁMKA 1: U 80 MHz a 800 MHz použijte vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo.						
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem struktur, objektů a lidí.						

13. NÁHRADNÍ DÍLY

Pro náhradní díly a příslušenství vždy využívejte hlavního katalogu MORETTI. POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOLEČNOSTI MORETTI. SPOLEČNOST MORETTI S.P.A. NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI INCIDENTY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEORIGINÁLNÍCH DÍLŮ.



14. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

14.1 Obecné specifikace


- Prášková lakovaná ocelová konstrukce, se specifickou antikorozií úpravou
- Otočná kola s integrovanými brzdami
- Zvedání mycí plochy
- Sklopná mycí plocha, pro odvod vody
- Odklopné postranice o 180 °
- Vodotěsná omyvatelná PVC matrace s polstrováním a postranicemi (25cm)
- 1,5 m dlouhá odtoková trubka
- V souladu s EN ISO 12182
- Max. nosnost BI100: 180 kg (včetně vody)
- Max. nosnost BI110: 200kg (včetně vody)
- Tlačítko nouzového zastavení (pouze u BI110)

14.2 NEFTI BI100 parametry

Rozměry a nosnost

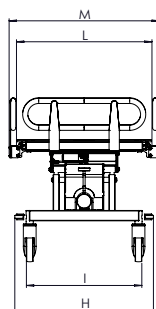
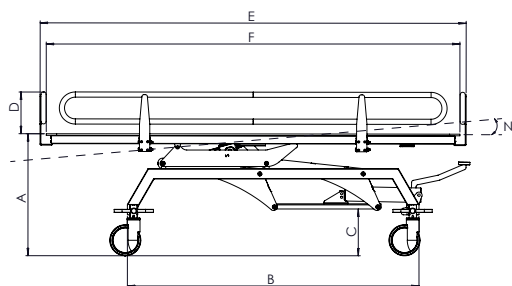


Rozměry v cm

A	B	C
59-93	141	23
D	E	F
20	206	200
H	I	L
67	56	66
M	N	 MAX nosnost
73	0°-5°	180 Kg

14.3 NEFTI BI110 parametry

Rozměry a nosnost

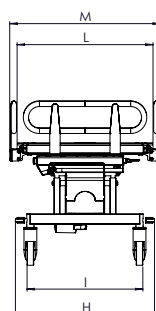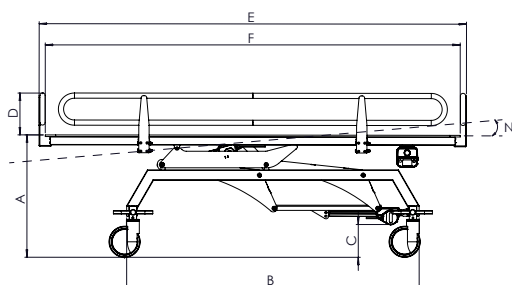

Rozměry v cm

A	B	C
59-99	141	16
D	E	F
20	206	200
H	I	L
67	56	66
M	N	 MAX nosnost
73	0°-5°	200 Kg

15. ZÁRUKA

Společnost Moretti poskytuje na každý produkt záruku po dobu 2 (dvou) let od data nákupu, s výjimkou níže uvedených omezení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím, změnami výrobku nebo jiným použitím, které není v souladu s návodem k použití. Správné používání výrobku je popsáno v návodu k použití. Společnost Moretti S.p.A neodpovídá za žádné škody nebo úrazy způsobené nesprávným použitím/nesprávným používáním zařízení, které není v souladu s návodem k použití. Záruka společnosti Moretti se nevztahuje na škody a vady výrobků způsobené: přírodní katastrofou, neoprávněnou údržbou nebo opravou; na škody způsobené problémy s elektrickým napájením (pokud jsou k dispozici), použitím součástí, které společnost Moretti neposkytuje, na škody způsobené selháním při plnění pokynů pro použití, neoprávněnými změnami, poškozením při přepravě (odlišné od původního dodání společností Moretti) nebo selháním při údržbě zařízení dle návodu k použití. Na součásti, které jsou vystaveny opotřebením, se záruka nevztahuje, pokud je škoda způsobena běžným používáním výrobku.

16. OPRAVY

16.1 Záruční opravy

Pokud se na produktu Moretti v průběhu záruční doby objeví materiálové nebo výrobní vady, domluví se společnost Moretti s klientem, zda se na defekt vztahuje záruka. Společnost Moretti může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit výrobek u konkrétního prodejce společnosti Moretti nebo ve svých prostorách. Pokud jsou opravy kryty zárukou, náklady na práci, které vzniknou při opravě výrobku, nese společnost Moretti. Opravy a výměny neobnovují záruční dobu.

16.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, může být vrácen k opravě pouze v případě, že je předem odsouhlasen zákaznickou službou společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu vzniklé opravami, na které se záruka nevztahuje, nese klient nebo prodejce, a to v plném rozsahu. Opravy výrobků, na něž se nevztahuje záruka, jsou zaručeny po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku.

16.3 Výrobky, které nejsou vadné

Klient bude informován, pokud Moretti dospěje k závěru, že výrobek, který obdržel a prohlédl, není vadný. Produkt bude klientovi vrácen na jeho náklady.

17. NÁHRADNÍ DÍLY

Originální náhradní díly společnosti Moretti jsou zaručeny po dobu 6 (šesti) měsíců od data dodání.

18. DOLOŽKA O VÝLUCE ZE ZÁRUKY

Není-li v záruce výslovně uvedeno jinak, společnost Moretti neposkytuje žádné prohlášení, záruku ani podmínku, výslovnou nebo implicitní, včetně jakéhokoli budoucího prohlášení, záruky nebo podmínky prodeje, vhodnosti pro daný účel a nulové interference. Společnost Moretti nezaručuje, že používání tohoto produktu bude nepřerušované a bez problémů. Doba trvání jakékoli záruky dle zákona je omezena na záruční lhůtu, v mezích zákona. Některé státy a země nepovolují omezení trvání záruky nebo vyloučení náhodných nebo nepřímých škod ve vztahu ke spotřebitelským produktům. V uvedených státech a zemích se určité vyloučení záruky či její omezení nemusí na uživatele vztahovat. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

DODAVATEL:



PRAHA

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8, tel./fax: 266 313 652

BRNO

Minská 100, 616 00 Brno - Žabovřesky, tel./fax: 541 240 393

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice, tel./fax: 387 432 502

OPAVA

Pivovarská 7/71, 746 01 Opava, tel./fax: 553 775 226

www.ortoservis.cz

ortoservis@ortoservis.cz

Společnost Ortoservis s.r.o., Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 72014, IČO 26121760

VÝROBCE:



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20136 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY