

## TOALETNÍ KŘESLO POJÍZDNÉ 2230



Pojízdné toaletní a sprchové křeslo pro pacienty s omezenou hybností nebo pro přesun pacienta uvnitř budovy. Použité materiály jsou výhradně vysoce kvalitní, na dotyk příjemná umělá hmota a nerez.

Sedák je dvojdílný, umožňující odejmutí nádoby. Loketní opěrky jsou odklopné. Odnímatelný kryt sedáku je ze syntetického materiálu. Po odejmutí toaletní nádoby lze s vozíkem nacouvat nad běžné WC.

### Návod k použití

1. Před použitím zabrzdíte křeslo pomocí brzd u koleček Vytáhněte jistící kolík jedné područky a sklopte ji
2. Posadte pacienta na křeslo, zvedněte područku a zkontrolujte zda seablokovala ve správné poloze.
3. Otočte podnožky tak aby seablokovaly ve správné poloze, sklopte stupátka aby si na ně pacient mohl položit nohy.

### Upozornění

1. Toaletní křeslo používejte jen na rovném a pevném povrchu.
2. Toaletní křeslo je určeno pro použití v interiéru
3. Před každým posazením pacienta zkontrolujte zda je křeslo zabrzděno.
4. Nezvedejte křeslo za područky, jestliže v něm pacient sedí.

### Údržba :

Pro setření prachu a nečistot používejte měkký vlhký hadřík, na silnější nečistotu použijte mýdlovou vodu .

Pro desinfekci používejte běžné desinfekční prostředky.

### Technické údaje

Hmotnost křesla : .....	12 kg
Maximální hmotnost uživatele : .....	110 kg
Rozměry sedátka : .....	44 x 44 cm
Celková šíře	53 cm

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě

Záruka: Výrobce poskytuje záruční lhůtu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození výrobků způsobené neodborným nebo nesprávným používáním.

Vyrobeno pro Walking Stick International, S.L., Segorbe, Španělsko

Dovozce: **Orlandino s.r.o.**,

Elišky Přemyslovny 433, 156 00 Praha 5, [orlandinosro@seznam.cz](mailto:orlandinosro@seznam.cz)