

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška 79 cm až 91,5 cm (s krokem 2,5 cm)

Výška sedátka 54 cm

Šířka sedátka 45 cm

Celková šířka 67 cm

Celková délka 70 cm

Velikost koleček Přední 198 mm – Zadní 178 mm

Celková hmotnost 7,9 kg

Maximální zatížení košíku 5 kg

Maximální hmotnost uživatele 130 kg

Orientečná výška uživatele 160 až 190 cm

Tento výrobek byl testován nezávislou francouzskou organizací (CERAH) a je v souladu s normou NF EN ISO 11199-2.

Tento návod prosím pečlivě uschověte.

CZ

Vybrali jste si chodítka New Design značky Thuisne.
Před použitím si prosím vždy pozorně přečtete uvedené pokyny.

Toto chodítko vám doporučil zdravotnický odborník pro lepší a bezpečnější mobilitu v interiéru i exteriéru.

Nepoužívejte ho, trpíte-li závažnými poruchami rovnováhy, slabostí nebo horečnatostí horních končetin.

Chodítko ND je lehké pojízdné 4kolové chodítko s pláténým čalouněným sedátkem, lze ho snadno složit jednou rukou bez nutnosti ohýbání se a je snadno přenosné. Po složení stojí ve svislé poloze. Lehce se zvedá a snadno s ním překonáte překážku, jako je například obrubník chodníku.



- Toto chodítko je určeno pro používání v interiéru i exteriéru na pevném a rovném povrchu bez velkých nerovností (díry, vyjeté koleje, atd.).
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda vám byl výrobek dodán v bezvadném stavu.
- Sestavení chodítka ND by měl provést specializovaný prodejce.

ROZLOŽENÍ/SLOŽENÍ

Odstraňte obal. Položte chodítko na bok.

Viz foto č. 1.

1. Bok 1.: upevnění koleček

Umístění zadního kolečka:

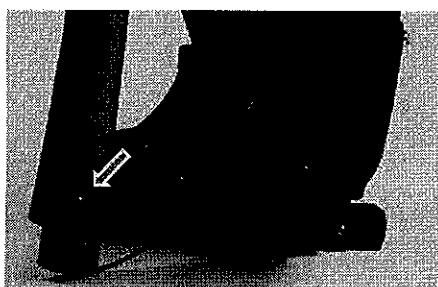


Foto č. 1

Vyšroubujte matku, sejměte ji a dále roztahněte držáky zádního kolečka tak, aby otvory byly v zákrytu. Matku umístěte zpět a zkontrolujte, zda je utažena nadraz. Viz foto č. 2.

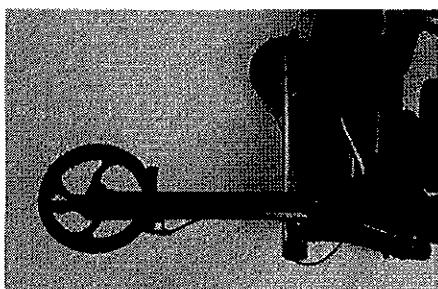


Foto č. 2

Umístění předního kolečka:

Vyšroubujte matku, sejměte ji a dále roztahněte držáky předního kolečka, aby otvory byly v zákrytu. Viz foto č. 3

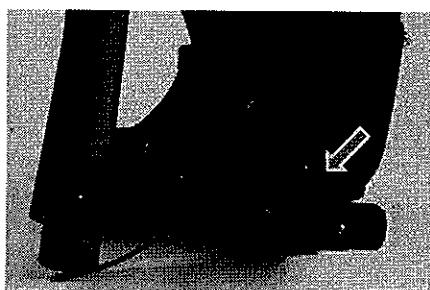


Foto č. 3

Matku umístěte zpět na přední kolo a zkontrolujte, zda je utažena nadraz. Viz foto č. 4

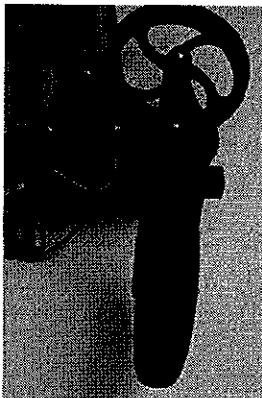


Foto č. 4

2. Bok 2.

Položte chodítko na druhý bok a postup opakujte jako u prvního.

3. Rozložení chodítka

Postavte chodítko na kolečka a roztahněte rukojeti do stran.
Viz foto č. 5

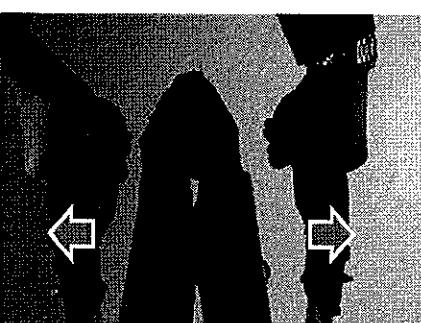


Foto č. 5

Tlačte na postranní trubky sedátka, dokud upevňovací pojistka nezaskočí. Pozor: Buďte opatrní, nebezpečí skřipnutí. Viz foto č. 6

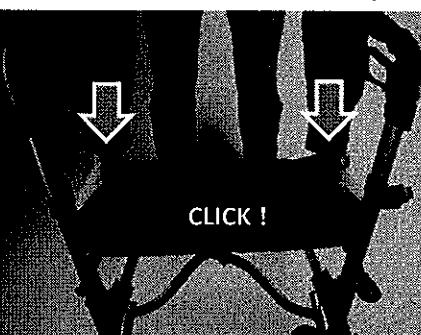


Foto č. 6

4. Umístění zádové opěrky

Zasouvejte okraje opěrky směrem dolů do držáků chodítka určených k tomuto účelu. Viz foto č. 7

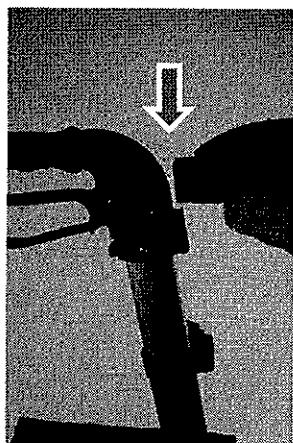


Foto č. 7

Správně umístěná opěrka. Viz foto č. 8

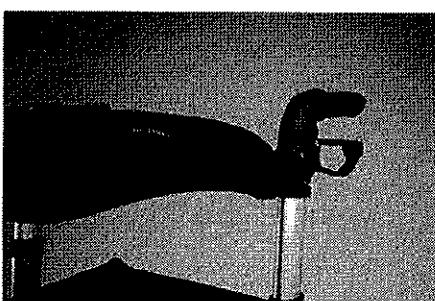


Foto č. 8

Upevněte opěrku přišroubováním šroubu. Viz foto č. 9

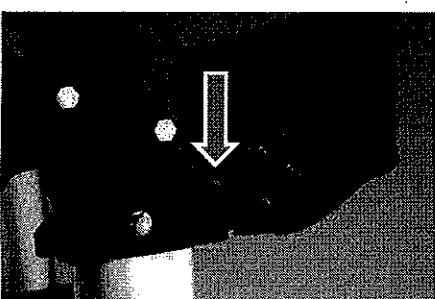


Foto č. 9

5. Nastavení výšky rukojetí

- Nastavte výšku rukojetí stisknutím aretační pojistky.
- Rukojeti musí být pečlivě upevněné ve stejné výšce na obou stranách, přibližně ve výšce zápěstí uživatele, který má paže podél těla, nohy mírně rozkročené a uvolněná ramena.

Viz foto č. 10



Foto č. 10

Před použitím zkontrolujte, zda je aretační pojistka ve správné poloze, tj. zcela vyskočená. Viz foto č. 11

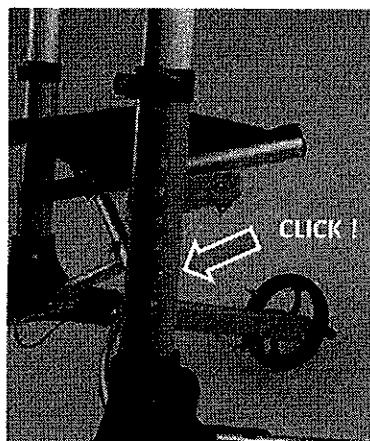


Foto č. 11

6. Umístění měkkého košíku:

Měkký košík musí být namontován na předeek chodítka na obě trubky nacházející se po obou stranách sedátka. Maximální zatížení košíku je 5 kg. Viz foto č. 12



Foto č. 12

Chodítko ND je připraveno k použití.

POUŽÍVÁNÍ

1. Složení chodítka

Chodítko se složí pouhým zatažením za popruh sedátka. Po složení stojí ve svíslé poloze.

Viz foto č. 13 a č. 14



Foto č. 13

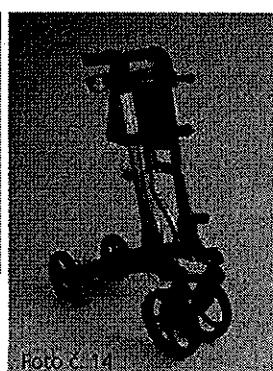


Foto č. 14

Pro snazší přenášení lze složit držáky zadních koleček (případně i přední kola).

2. Brzdový systém

Rychlé brzdění:
Brzdění se provádí opřením se o rukojet a přitáhnutím brzdové páčky směrem nahoru.
Viz foto č. 15.

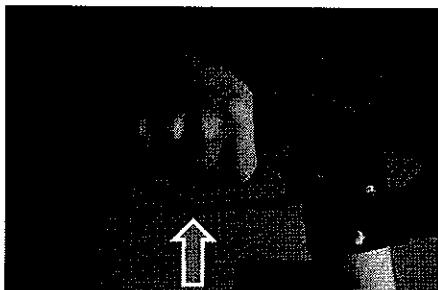


Foto č. 15

Parkovací brzda:
Pro zabrzdění chodítka, např. než se posadíte, tlačte brzdové páčky dolů, dokud se nezamknou, pocítíte zavaknutí.
Viz foto č. 16.

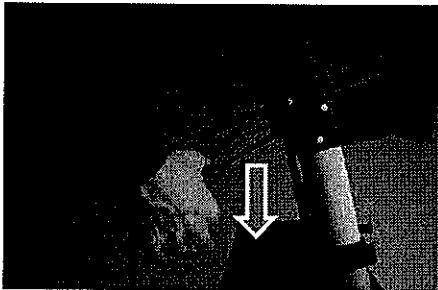


Foto č. 16

Chcete-li dále pokračovat v cestě, uvolněte brzdy vytažením brzdových páček směrem nahoru.

Nastavení brzd:

Napnutí brzdového lanka je přednastaveno z továrny, ale po určité době používání bude pravděpodobně třeba provést seřízení.

- Příliš utažená brzda:**
Uvoľněte zajišťovací matku (1) a otočte seřizovacím šroubem (2) ve směru hodinových ručiček.
- Nedostatečné brzdění:**
Uvoľněte zajišťovací matku (1) a otočte seřizovacím šroubem (2) proti směru hodinových ručiček.

Po provedení optimálního nastavení nezapomeňte zajišťovací matku znova utáhnout.

Viz foto č. 17 a č. 18

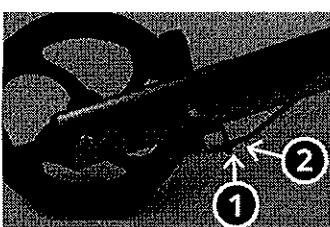


Foto č. 17



Foto č. 18

3. Držák hole a adaptér na překonávání obrubníků:

Toto chodítko je vybaveno držákem hole (A) a adaptérem na překonávání obrubníků (B) pro snazší překonávání překážek.
Viz foto č. 19

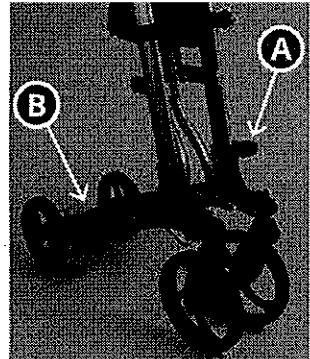


Foto č. 19



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pravidelně kontrolujte, zda je chodítko v dobrém stavu, např. správné seřízení brzd, vůle dílů, stabilitu, případné poškození nebo špatně upevněné součástky.
- Pozor na riziko skřípnutí při manipulaci s chodítkem.
- Sedátko: než usednete na sedátko, zkontrolujte, zda se chodítko nachází na stabilním a rovném povrchu.
- V zájmu vaší bezpečnosti je nutné před usednutím, aby brzdy byly v parkovací poloze.
- Na sedátko usedejte vždy vzpřímeně; nenaklánějte se na stranu a nesedejte si šikmo.
- Sedátko chodítka je určené pouze pro krátký odpočinek a nelze ho používat jako židli.
- Při použití musí být chodítko vždy zcela rozložené.
- Chodítko vystavené slunci, teplu nebo chladu může přebírat okolní teplotu. Zkontrolujte teplotu jeho povrchových částí, zejména než usednete na sedátko.
- Na rukojeti nezavěšujte tašky ani jakýkoliv jiný předmět, který by mohl narušit rovnováhu chodítka.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Chodítko ND musí být uloženo na krytém suchém a větraném místě.
- Chodítko ND lze čistit ručně jemným mýdlem nebo čisticím prostředkem pro domácnost.

V případě pochybnosti rolátor nepoužívejte a kontaktujte svého specializovaného prodejce.

Můžete si u něho zakoupit originální náhradní díly.

ZÁRUKA

Na tento výrobek je poskytována **2letá** záruka na materiálové a výrobní vadu, počínaje datem dodání uživateli.

V případě závady, na kterou se tato záruka vztahuje, bude výrobek dle našeho uvážení buď opraven, nebo vyměněn.

Záruka se nevztahuje na případy použití nebo údržby, které nejsou v souladu s danými požadavky, ani na opotřebené díly.

ŽIVOTNOST

Odhadovaná životnost tohoto výrobku je minimálně 5 let (vyjma opotřebených dílů: kolečka, rukojeti, brzdy, textilie sedátka, měkký košík) v závislosti na tom, zda jsou dodržovány pokyny ohledně jeho používání, údržby a bezpečnosti popsáne v této příručce.

LIKVIDACE

Kovové díly jsou recyklovatelné.

Likvidace musí být provedena v souladu s platnými předpisy.

Pro informace o společnostech pro zpracování odpadů ve vašem regionu se prosím obraťte na příslušné.