

Návod k použití

STABILO II M (motorové)

Chodítko je zdravotní pomůcka určená pro nácvik chůze, k rehabilitaci dolních končetin a jako pomocník při chůzi, zvedání se a usedání osob se sníženou pohyblivostí. Chodítko je tvořeno kovovou lakovanou konstrukcí s čtyřmi kolečky. Je vybaveno podpažní opěrou (deskou), o kterou se uživatel může opřít a dále madly pro ruce. Výšku chodítka lze nastavit. Chodítko nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje 3,5° (na rampách a schodištích). Chodítko není určeno k přepravě nepohyblivých osob nebo nákladů.

Nastavení výšky:

Výšku chodítka je možno nastavit dle potřeby uživatele v rozsahu 930 – 1350mm. Na hlavním sloupku je umístěn elektrický aktuátor, který je ovládán spínači na madlech chodítka. Jedním tlačítkem se ovládá pohyb nahoru a druhým pohyb dolů. Chodítko Vám pomůže se zvednout i sednout.

Technické parametry:

Výška opěrné plochy:	nastavitelná v rozsahu 930 – 1350 mm
Kolečka:	průměr 125mm
Nosnost chodítka:	150 kg

Sestavení chodítka:

Chodítko standardně dodáváme připravené k použití.

Nabíjení baterie chodítka: Motor je napájen baterii, kterou po vybití(ozve se přerušovaný tón) připojíte přiloženým napájecím kabelem k síti 230V. Po připojení se rozsvítí zelená kontrolka na kontrolboxu (spodní roh) a baterie se nabíjí. Úplné nabití baterie trvá 12hod.

Skladování, údržba a ošetřování:

Chodítko musí být skladováno v suchém a čistém prostředí bez vlivu chemických látek. Všechny díly chodítka udržujte čisté a suché. Vhodné je občas přeleštit díly suchým hadrem. Při větším znečištění je nutné díly otřít vlhkým hadrem a ihned pečlivě vytřít do sucha.

Záruka:

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením a skladováním.

Výrobce:

Zdravopro s.r.o., Táborská 195, 391 37, www.zdravopro.cz, tel: 605151379

① Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Datum revize návodu: květen 2018

