

Bandáž zápěstí PROHAND

Katalogové číslo: DRQF0F

edice 03.2012

Návod k použití

POPIS PRODUKTU:

Stabilizační ortéza z prodyšné a elastické pleteniny. Design výrobku poskytuje vhodnou kompresi v zápěstí ovlivňující stabilitu kloubu zápěstí a odlehčení svalové vazivové struktury. Bandáž zápěstí podporuje efektivní proces doléčování a ochrany zápěstí při sportovní činnosti nebo povolání, které mají za následek jeho velké zatížení. Ortéza je univerzální pomůckou pro pravé a levé zápěstí. Jedna, univerzální velikost.

APLIKACE A POUŽITÍ:

Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Poprvé je třeba ortézu použít pod dohledem kvalifikovaného zdravotnického personálu, který pacienta informuje o dalším léčebném postupu.

INDIKACE:

- Léčba po zranění zápěstí,
- Prevence přetížení zápěstí,
- Záněty a další bolestivé syndromy,
- Degenerativní změny v oblasti zápěstí,
- Ochrana zápěstí před opakovaným zraněním při návratu do práce a po sportovních úrazech.

ÚDRŽBA:

Perte ručně při teplotách do 35° C jemnými pracími prostředky. Nechlorujte, nečistěte chemicky, neždímejte, před sušením jemně vytlačte. Sušte daleko od zdrojů umělého tepla. Nežehlete.

POZNÁMKA:

Dlouhé skladování na slunci, ve vlhkém nebo kyselém prostředí oslabuje polyamidová vlákna a produkt tak může ztratit své specifické vlastnosti.

ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí / zakoupení výrobku a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než prodávajícím (pokud není tato činnost popsána v návodu). Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.



POZOR!

Nedodržování osobní hygieny, používání nesprávných čistících prostředků může způsobit oděření nebo jiné komplikace spojené se zvýšenou potivostí a rozvojem bakteriální flóry. Nepoužívejte ortézu na rozežívající masti. Vezměte prosím na vědomí, že zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a poškodit materiál z něhož byl produkt vyroben.

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O POUŽITÍ A VÝBĚRU POMŮCKY JE NA ODBORNÉM LÉKAŘI NEBO TERAPEUTOVI

VÝROBCE: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24, Polsko, Tel. + 6748384 fax + comp/m.4842,. 48426365221,
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EWG pro medicínské produkty.

Qmed®

Active Line
by życie stało się łatwiejsze



• Certified Management System
• DIN EN ISO 9001
• DIN EN ISO 13485

