

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ

100, 100 WHD



CE

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojeťmi. Chodítko je vybaveno bovdenovými brzdami s možností aretace, sedátkem, jídelním táčem a nákupním košíkem. Model WHD má zvýšenou nosnost i rozměry pro bariatrické pacienty.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška madel: 76-98 cm

Výška sedátka: 61,5 cm

Šířka sedátka: 37.5 cm , 50 cm (WHD)

Celková šířka: 58 cm, 70 cm (WHD)

Hmotnost: 11 kg, 13.5 kg (WHD)

Nosnost: 130 kg, 150 kg (WHD)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte chodítko k sezení.

Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 130 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li chodítko v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

Chodítko není určeno pro transport sedících uživatelů.



OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítko s madly, jídelní táč, nákupní košík a 2 šrouby k zajištění nastavení výšky madel.




SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA

Rozevřete rám chodítka a vyjměte zaslepovací špunty (A) z držáků výsuvných madel. Nainstalujte oba šrouby (B-D) do držáku tak, jak je uvedeno na obrázku a nechte je povolené.

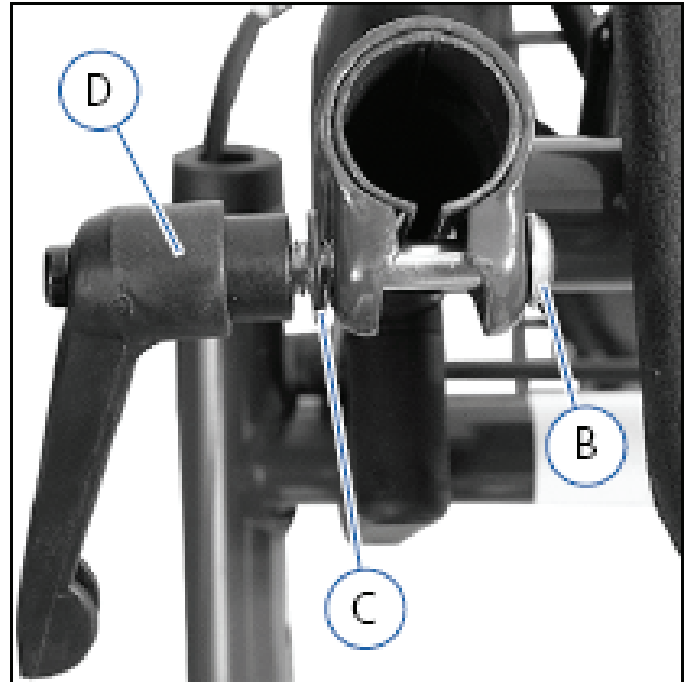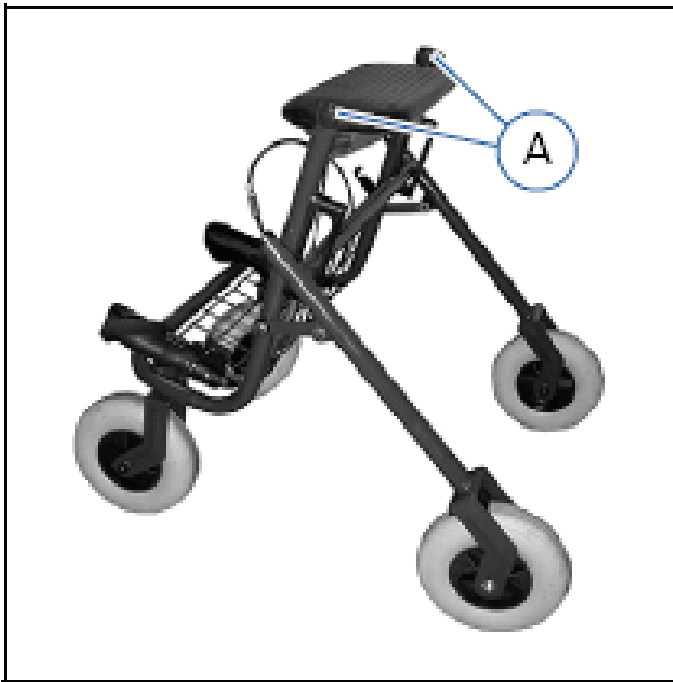


Zasuňte obě madla do držáku, nastavte potřebnou výšku a šroubem tuto pozici zaaretujte. Bovdenová lanka by měla vézt zevně rámu i madel (viz obr.)

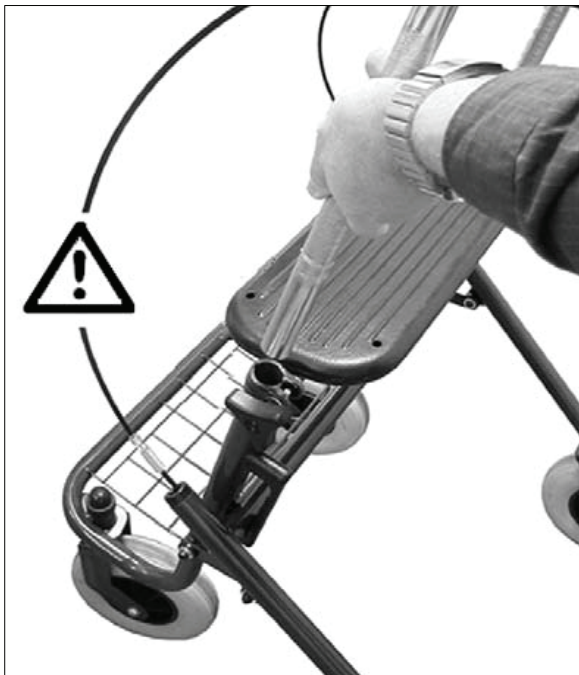


BRZDY

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (A) směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačení páky brzdy směrem dolů, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě brzdy!

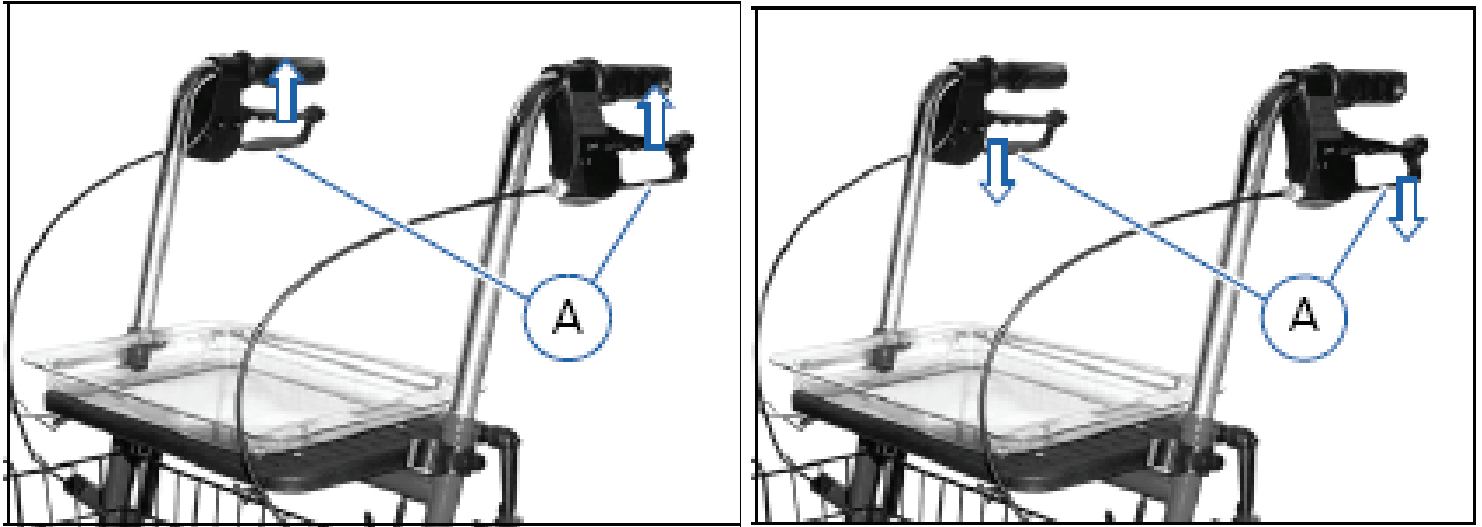


Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrzdění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů bovdenového lanka.

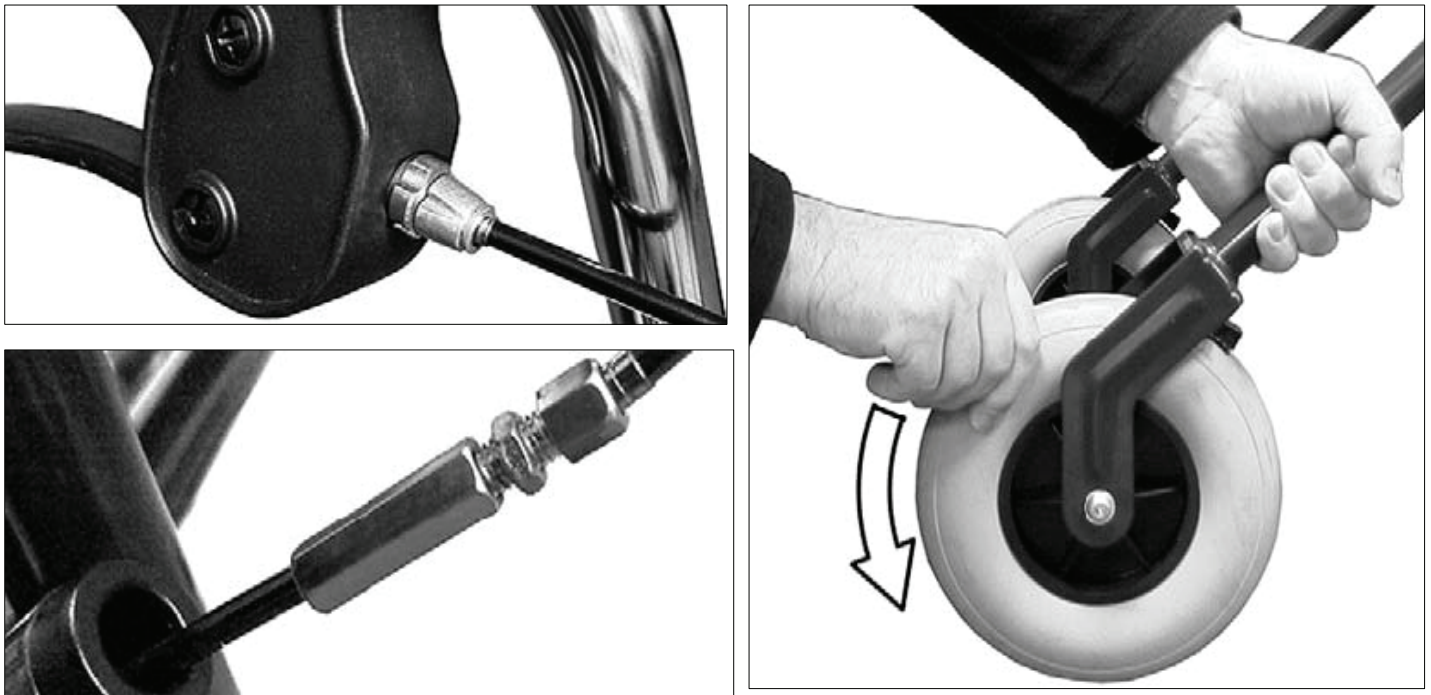

TRANSPORTNÍ A SKLADOVACÍ POLOHA

Uvolněním aretační pojistky (C) a vytažením zadního rámu nahoru lze chodítka jednoduše složit do transportní polohy (A). Při rozložení postupujte opačným způsobem (A-C)

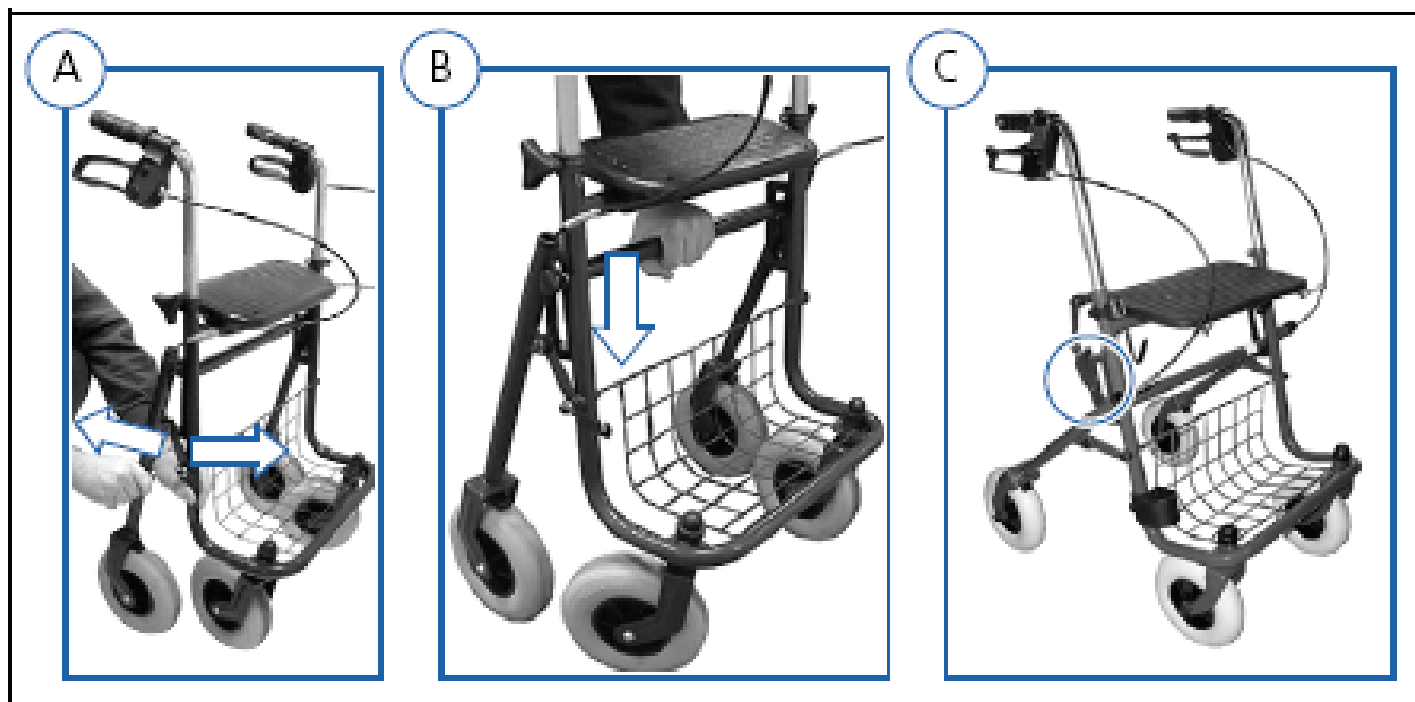

ÚDRŽBA

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bovdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

