

# NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ

# 103



# CE

## **POUŽITÍ**

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

## **POPIS**

Skládací odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečkami, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojeťmi. Chodítka je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace, odnímatelnou opěrkou zad, polstrovaným sedátkem a nákupní taškou.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Nastavitelná výška madel: 80-95 cm

Výška sedátka: 51,5 cm

Šířka sedátka: 45cm

Celková šířka: 62,5 cm

Průměr koleček: 20 cm

Hmotnost: 7,5 kg

Nosnost: 114 kg

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte chodítka k sezení.

Chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 114 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li chodítka v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.


Chodítka není určeno pro transport sedících uživatelů.

## **OBSAH BALENÍ**

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka s madly, 4 kolečka, bowdenové brzdy, nákupní tašku, sedátka, opěrkou zad a 2 šrouby s maticí s plastovou krytkou k zajištění nastavení výšky madel.

## SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA


Rám chodítka vyjměte z krabice a stlačením přední a zadní části od sebe rám rozložte. Vložte vidlici s kolečkem do otvorů A až pojistka B zaklapne. Tento postup opekujte u všech čtyřech koleček. Přiložená madla vložte do otvorů (C), nastavte požadovanou výšku madel a zvolenou pozici upevněte pomocí šroubu a matice s umělohmotnou krytkou (1). Šrouby pečlivě dotáhněte. Bowdenová lanka by měla vézt zevně rámu i madel. Opěrku zad zasuněte do otvorů (D) zmáčknutím pojistek (2). Nyní je chodítko připraveno k použití.

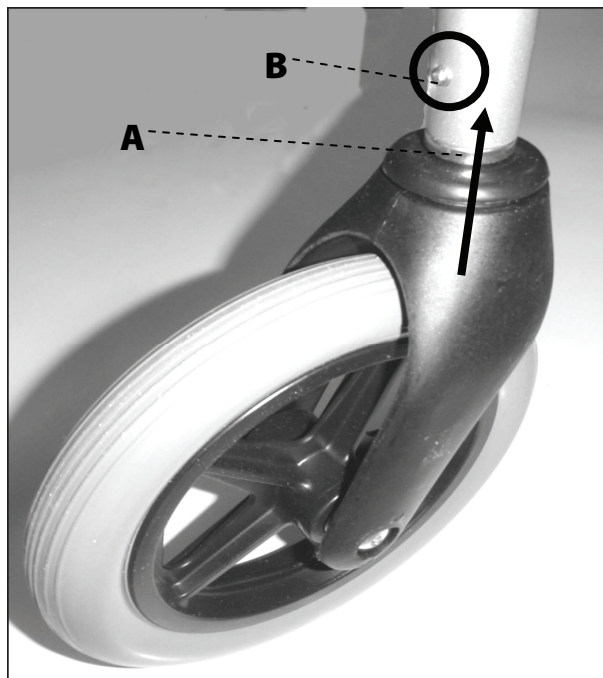


Přípevnění vidlic s kolečky.



Madla zasuněte do otvorů A, opěrku zad do otvorů B.

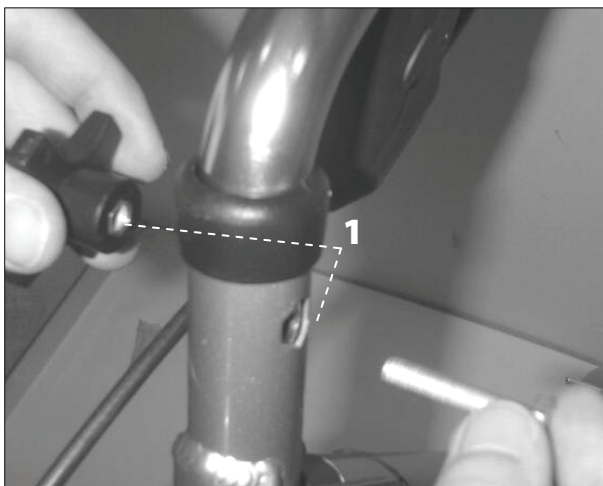

Madla upevněte pomocí šroubu a matice.

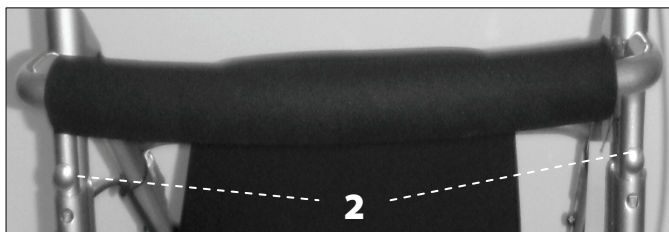

Zamáčkněte pojistky na opěrce.

Při skládání chodítka nadzdvihněte sedátko a uvolněte pojistku (C) rám složte směrem k sobě.





Pojistka




Složení chodítka

## BRZDY

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (A) směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačením páky brzdy směrem dolů, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě brzdy !!!

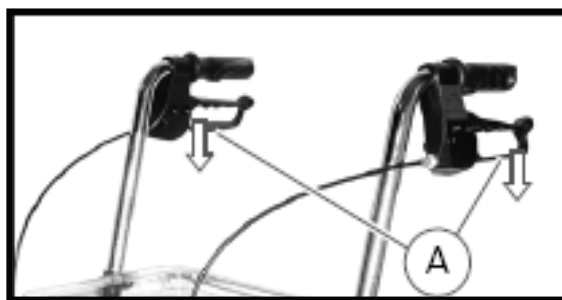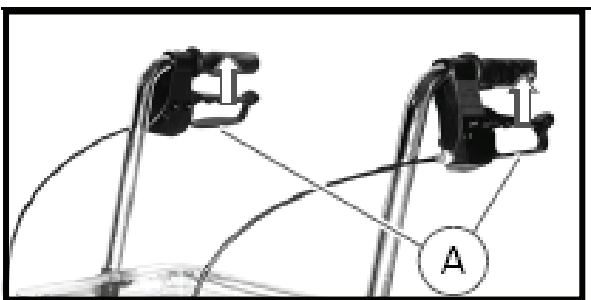

Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrzdění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřidte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.

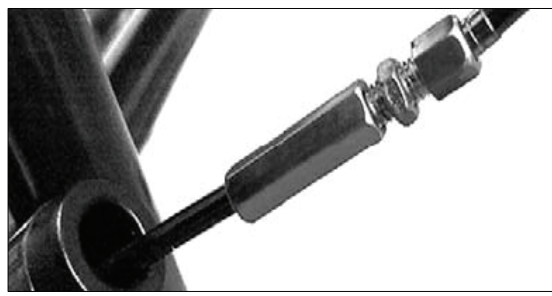

**ÚDRŽBA**

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.





