

NÁVOD K POUŽITÍ

KŘESLO KOMBINOVANÉ DO SPRCHY

808, 808 C



CE

POUŽITÍ

Kombinované křeslo do sprchy je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní sprchu a standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS

Rám křesla je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn omyvatelným vyměkčeným sedátkem s výřezem, vyměkčenou opěrkou zad, plastovou toaletní nádobou (ACC/5A), dvoudílnými odklopnými a odnímatelnými podnožky s výškově stavitelnými stupačkami, odklopnými polstrovanými područkami a madly pro tlačení. Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky s nášlapnou brzdou. Model 808 je vybaven rychloupínacími zadními poháněcími loukoťovými plnými koly s obručemi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka křesla: 65,5 cm (808), 55,5 cm (808 C)

Šířka sedu: 44,5 cm

Hloubka sedu: 42,5 cm

Výška sedu: 54 cm

Nosnost: 110 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost je 110 kg.

Při skládání a rozkládání křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.


Křeslo není určeno pro transport osob v exteriéru a jako náhrada transportního vozíku.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám křesla, čtyři otočné vidlice s kolečky, dvě odnímatelné podnožky se stupačkou, opěrka zad s područkami, sedák s oddělitelnou centrální částí, plastová toaletní nádoba s víkem ACC/5A, dva aretační šrouby k připevnění opěrky zad a dvě zadní poháněcí kola s rychloupínací osou (u modelu 808).

SLOŽENÍ KŘESLA

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Vyšroubujte šrouby (1) na zadní straně, spodní část opěrky zasuněte do otvorů v rámu (A) a šrouby (1) dotáhněte. Vytáhněte aretační „E“ pojistku (2), zasuněte kolečko do otvoru v rámu (B), nastavte požadovanou výšku křesla a pojistku zasuněte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou. U modelu 4145 připevněte zadní kola stisknutím plastové krytky pojistky rychloupínacího zámku ve středu kola (2) a kola zasuněte a zacvakněte do úchyťů. Nasadte podnožky na úchyty v přední části rámu (C) a otočte směrem dovnitř až zapadne bezpečnostní pojistka (4) (podnožky odklopíte uvolněním této pojistky). Pro nastavení výšky stupačky povolte a opět utáhněte šroub (5). Nyní je křeslo připraveno k použití.

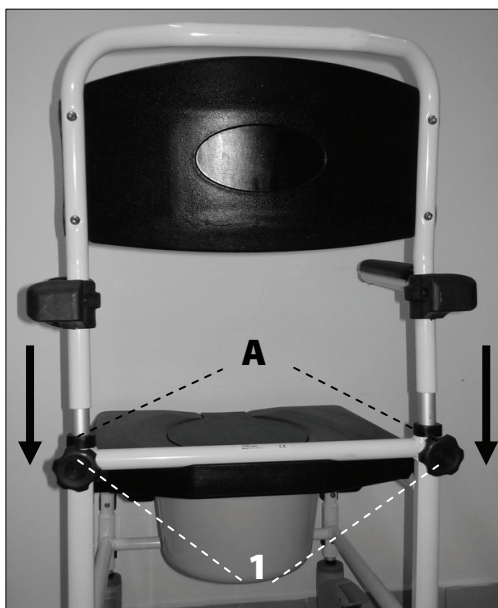


Nasazení opěrky zad

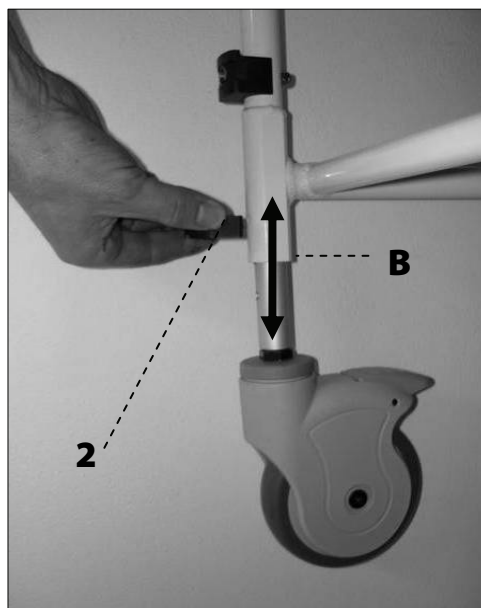

Přípevnění koleček a nastavení výšky sedu



Přípevnění zadních kol

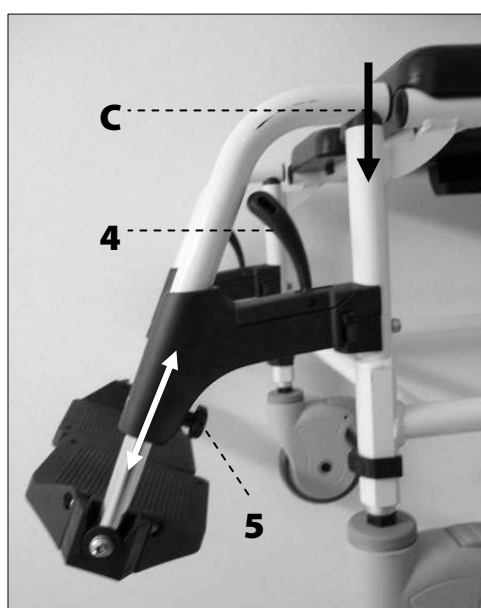

Přípevnění a nastavení výšky stupaček

MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU

Pro použití křesla sundejte centrální oddělitelnou část a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak lze vysunout z držáků pod sedákem směrem dozadu.



Vysunutí/zasunutí plastové nádoby

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a brzd, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

