

NÁVOD K POUŽITÍ

KŘESLO DO SPRCHY KLOZETOVÉ

4140, 4145



CE

POUŽITÍ

Víceúčelové klozetové křeslo do sprchy je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní sprchu a standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Rám křesla je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn omyvatelným vyměkčeným sedátkem s hygienickým výřezem a odnímatelnou centrální částí, vyměkčenou opěrkou zad, plastovou toaletní nádobou s víkem ACC/5A, jednoduchou odklopnou stupačkou, odklopnými polstrovanými područkami a madly pro tlačení. Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou opatřena nášlapnou brzdou. Model 4145 je vybaven rychloupínacími zadními poháněcími loukoťovými plnými koly s obručkami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka křesla: 55 cm (4140), 62 cm (4145)

Šířka sedu: 43 cm

Hloubka sedu: 43 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 130 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 130 kg.

Při skládání a rozkládání křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechna kola v kontaktu s podkladem.

Křeslo není určeno pro transport osob v exteriéru a jako náhrada transportního vozíku.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám křesla s kolečky a odklopnou stupačkou, opěrkou zad s područkami, sedák s odnímatelnou centrální částí, plastovou toaletní nádobu s víkem ACC/5A, dva aretační šrouby k připevnění opěrky zad a dvě zadní poháněcí kola s rychloupínací osou (u modelu 4145).

SLOŽENÍ KŘESLA

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Vyšroubujte šrouby (1) na zadní straně, spodní část trubek opěrky zad zasuňte do otvorů v rámu křesla (A) a šrouby (1) dotáhněte. U modelu 4145 připevněte zadní kola stisknutím plastové krytky pojistky rychloupínacího zámku ve středu kola (2), kola zasuňte a zacvakněte do úchyťů. Nyní je křeslo připraveno k použití.



Nasazení opěrky zad



Připevnění zadních kol

MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU


Pro použití křesla k toaletě sundejte centrální odnímatelnou část a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak lze vysunout z držáků pod sedákem směrem dozadu.



Vysunutí/zasunutí plastové nádoby

NASTAVENÍ VÝŠKY A ODKLOPENÍ STUPAČKY

Povolte jistící šroub držáku stupačky (3), vysunutím nebo zasunutím vnitřní trubky držáku stupačky nastavte požadovanou polohu a šroub opět utáhněte. Správnou výšku stupaček zjistíte tak, že trup by měl se stehny svírat úhel 90°. Stupačku lze odklopit tahem nahoru.

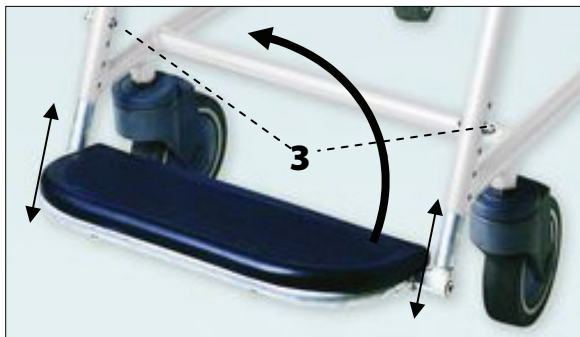

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu a stav všech jistících prvků, koleček a brzd, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Po každém použití nebo následném očištění křeslo řádně osušte.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.