

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTAVEC NA WC S MADLY

580



CE

POUŽITÍ

Nástavec na WC je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS

Nástavec je vyroben z odolného plastu a je doplněn odklopnými madly z ocelových trubek s polstrovanými područkami. Výšku nástavce lze snadno přizpůsobit.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška: 8, 12, 16 cm

Šířka madel: 58 cm

Nosnost: 120 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním nástavce si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 120 kg.

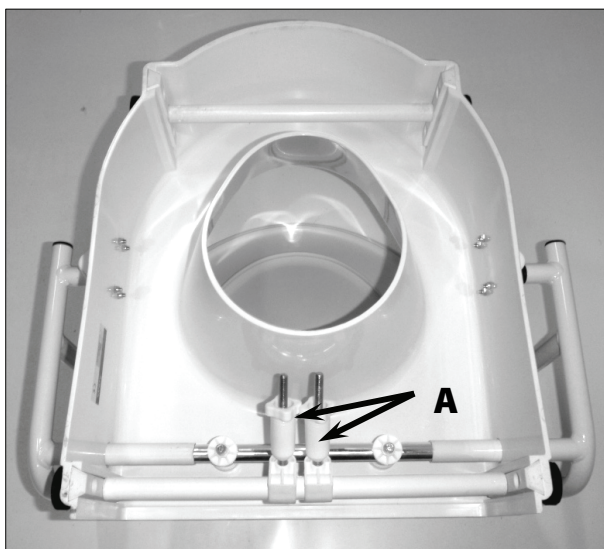
Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části nástavce, tj. nástavec s prkénkem a odklopná madla.

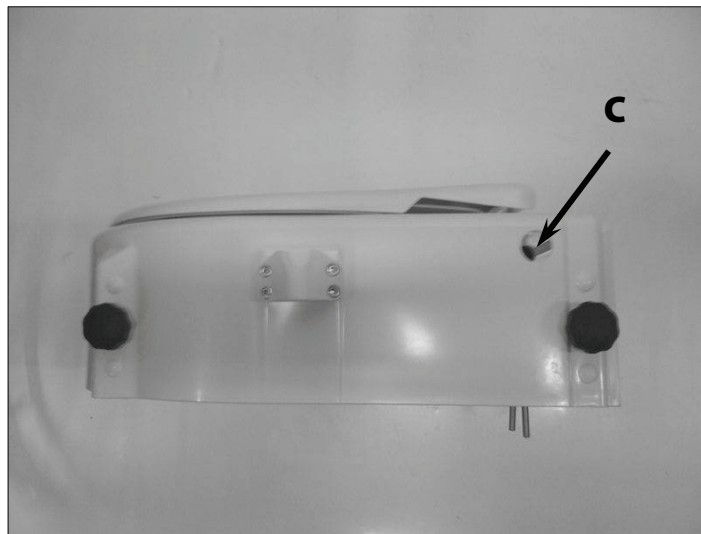
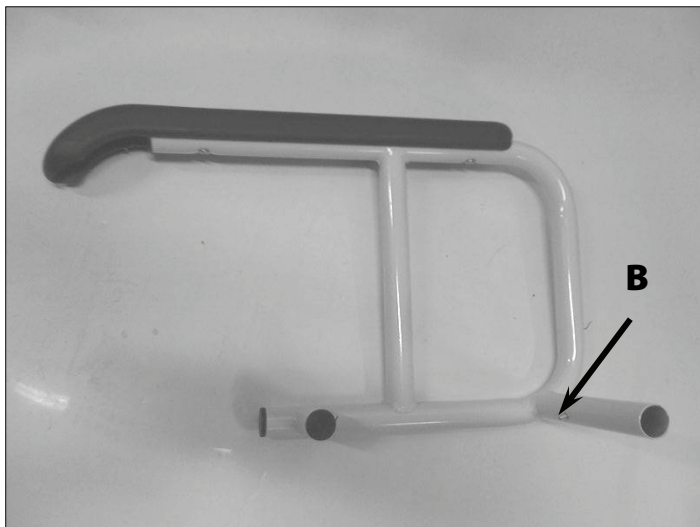
PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE

Nástavec umístěte na WC tak, aby byl v co nejtěsnějším kontaktu s mísou a připevněte pomocí dvou šroubů (A) v zadní části, které přijdou na místo vyšroubovaného prkénka.

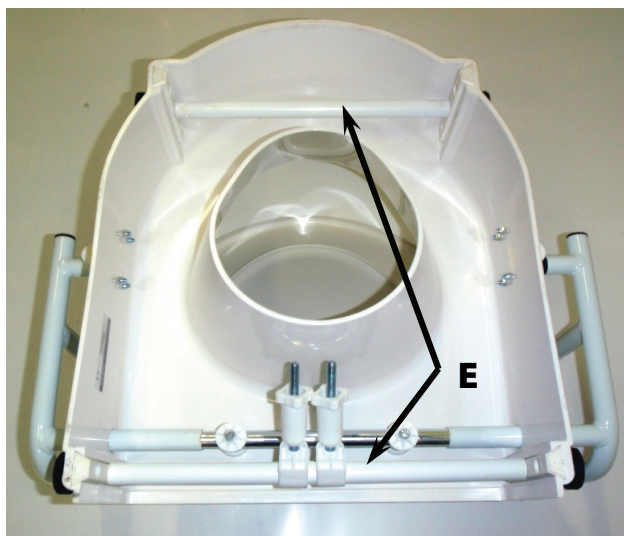
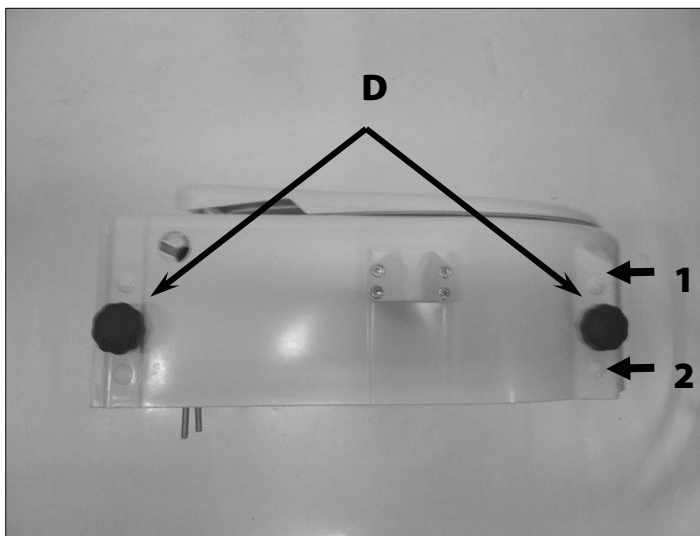


PŘIPEVNĚNÍ ODKLOPNÝCH MADEL:

Zamáčkněte pojistky (B) a madla nasadte do bočních otvorů po stranách nástavce (C).

**NASTAVENÍ VÝŠKY NÁSTAVCE:**

Nástavec je přednastaven na střední výšku 12 cm. Pokud ji chcete zvýšit nebo snížit, povolte všechny čtyři aretační šrouby (D) a nastavte obě podpůrné hrazdy (E) do požadované polohy (1=výška 8 cm, 3=výška 16 cm). Vyjměte plastovou krytky příslušných otvorů a šrouby opět zašroubujte.

**ÚDRŽBA**

Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1 min - 85°C).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.