

# Čtyřkolové chodítko odlehčené 10044



## Návod k použití

Blahopřejeme Vám ke koupi našeho výrobku, který Vám umožní samostatné procházky a nákupy. Sami se přesvědčíte, že chodítko vyniká snadným a pohodlným používáním. Chodítko Vám usnadní život. Chodítko je skládací a tak ho lze snadno přepravovat i v automobilu.



### Návod k použití:

- 1) Sundejte všechny plastové obaly.
- 2) Postavte chodítko na rovnou podložku.
- 3) Rozložte chodítko tak, aby došlo k zablokování rámu v krajní poloze.
- 4) Zasuňte područky do rámu chodítka a nastavte požadovanou výšku rukojeti a zablokujte dotažením příslušného šroubu (je v sáčku v košíku).

### Používání chodítka:

Chodítko tlačte před sebou, ke snížení rychlosti pohybu použijte brzdy.

Používáte-li hůl, můžete ji před použitím chodítka připevnit do držáku na boku chodítka (držák na objednávku).

Před použitím sedátka se ujistěte, že je chodítko zabezpečeno proti nežádoucímu pohybu.

### Bezpečnostní pokyny:

Chodítko používejte, pokud možno, na rovných plochách a snažte se vyhnout všem nerovnostem jako jsou vpustě do kanálů a podobně. V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší chodítko nepoužívat.

Chodítko se nesmí přetěžovat.

### Technické parametry:

Nosnost - maximální hmotnost uživatele je 136 kg.

Hmotnost 7 kg

Výška rukojetí 80-89cm

Šířka chodítka 58cm

### Údržba:

K čištění chodítka používejte běžné čisticí a desinfekční prostředky.

Pravidelně kontrolujte technický stav chodítka.

Materiál: Hliníkový rám, ocel, plast, polyuretan.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě.

### Vyrábí:

**Movi SpA - Divisione Wimed Itálie**

Datum poslední revize: 19. 9. 2019

### Dodává:

**ORLANDINO s.r.o.**, Elišky Přemyslovny 433, Praha 5

Tel: 257 923 005, [orlandinosro@seznam.cz](mailto:orlandinosro@seznam.cz)