

Čtyřkolové chodítko Rolly Alu



Návod k použití

Blahopřejeme Vám ke koupi našeho výrobku, který Vám umožní samostatné procházky a nákupy. Sami se přesvědčíte, že chodítko vyniká snadným a pohodlným používáním. Chodítko Vám usnadní život. Chodítko je skládací a tak ho lze snadno přepravovat i v automobilu.



Návod k použití:

- 1) Sundejte všechny plastové obaly.
- 2) Postavte chodítko na rovnou podložku.
- 3) Rozložte chodítko tak, aby došlo k zablokování rámu v krajní poloze.
- 4) Zasuňte područky do rámu chodítka a nastavte požadovanou výšku rukojeti a zablokujte dotažením příslušného šroubu (je v sáčku v košíku).

Používání chodítka:

Obsluha chodítka je velmi jednoduchá.

Chodítko tlačte před sebou, ke snížení rychlosti pohybu použijte brzdy. Používáte-li hůl, můžete ji před použitím chodítka připevnit do držáku na boku chodítka.

Před použitím sedátka se ujistěte, že je chodítko zabezpečeno proti nežádoucímu pohybu.

Bezpečnostní pokyny:

Chodítko používejte, pokud možno, na rovných plochách a snažte se vyhnout všem nerovnostem jako jsou vpustě do kanálů a podobně. V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší chodítko nepoužívat.

Technické parametry:

Nosnost - maximální hmotnost uživatele je 150 kg.

Hmotnost 7 kg

Výška rukojetí 81-92cm

Šířka chodítka 63,5cm

Údržba:

K čištění chodítka používejte běžné čistící a desinfekční prostředky.

Pravidelně kontrolujte technický stav chodítka.

Materiál: Hliníkový rám, plast, polyuretan.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Vyrábí:

Movi SpA - Divisione Wimed Itálie

Datum poslední revize: 10. 9. 2019

Dodává:

ORLANDINO s.r.o., Elišky Přemyslovny 433, Praha 5

Tel: 257 923 005, orlandinosro@seznam.cz