

ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO KIEV B



Blahopřejeme Vám ke koupi našeho výrobku, který Vám umožní samostatné procházky a nákupy. Sami se přesvědčíte, že chodítko vyniká snadným a pohodlným používáním. Chodítko Vám usnadní život. Chodítko je skládací a tak ho lze snadno přepravovat i v automobilu. Jestliže se při užívání chodítka setkáte s jakýmkoliv problémem obraťte se s důvěrou na Vašeho prodejce.



Návod k použití:



- 1) Sundejte všechny plastové obaly (nezapomeňte na obaly na kolečkách).
- 2) Postavte chodítko na rovnou podložku.
- 3) Zatlačte na horizontální nosník směrem dolů dokud neuslyšíte jemné klapnutí.
- 4) Vyšroubujte aretační šrouby pro nastavení rukojeti. Ty nastavte na potřebnou výšku a zašroubujte..

Košiček na nákupy volně zavěste na dva háčky na rámu chodítka.

Používání chodítka:

Obsluha chodítka je velmi jednoduchá.

Černá páčka na rukojeti slouží k přibrzd'ování chodítka při chůzi tak, aby poskytovalo dobrou oporu. Stříbrné tlačítko na brzdě slouží jako parkovací brzda, která se používá při zastavení. Tlakem na tlačítko při plně zmáčknuté černé páčce dojde k zabrzdění chodítka. Jestliže chcete pokračovat v chůzi, přitlačte černou páčku směrem k rukojeti, tím chodítko vypne parkovací brzdu a je připraveno na další cestu.

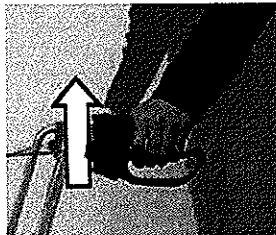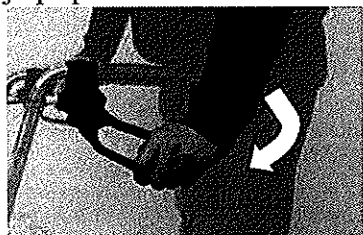

Po skončení chůze opět můžete chodítko snadno složit pro lepší transport.

Bezpečnostní pokyny:

Chodítka používejte pokud možno na rovných plochách a snažte se vyhnout všem nerovnostem jako jsou vpustě do kanálů a podobně. Za mokra a sněhu pamatujte na to, že brzdy chodítka ztrácejí na účinnosti a hrozí nebezpečí úrazu a poškození chodítka.

V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší chodítka nepoužívat.

Brzdy jsou nastavitelné a pro bezpečnost provozu je nutné kontrolovat, zda jsou obě nastaveny stejně.

Chodítka se nesmí přetěžovat - maximální možná hmotnost přepravovaných předmětů je 5 kg a maximální hmotnost uživatele je 280kg.

Údržba:

Čištění chodítka provedete snadno s použitím jemného saponátového přípravku.

Jestliže budete chodítka správně používat bude sloužit k Vaší plné spokojenosti.

Technické údaje

Materiál: rám - duralové trubky, držadla – měkčený plast

Nastavitelná výška rukojetí 85-93 cm

Hmotnost 14 kg

Šíře celkem 63 cm

Šíře sedátka 56 cm

Maximální hmotnost uživatele 280 kg

Materiály:

Rám: ocel

Kola: PU

Rukojeti: měkčený plast

Sedátko: zpevněný PP

Opěrátka: EVA

Výrobce:

Intermed S.r.l.

Itálie

Dovozce:

Orlandino s.r.o.

Elišky Přemyslovny 433

156 00 Praha 5

IČ 27217647

Poslední korekce: 3.8.2020