

POUŽITÍ

Podpěra na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci použít standardní mísu WC. Podpěra usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny, eliminuje možné riziko pádu a výrazným způsobem zvyšuje jeho soběstačnost. Využití má zejména tam, kde stavební úpravy neumožňují instalaci madel.

POPIS

Šířkově i výškově nastavitelný ocelový rám podpěry je doplněn duralovými rameny s plastovými područkami. Výškově nastavitelné nohy ramen jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním podpěry si pečlivě přečtěte návod k použití.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podpěry konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

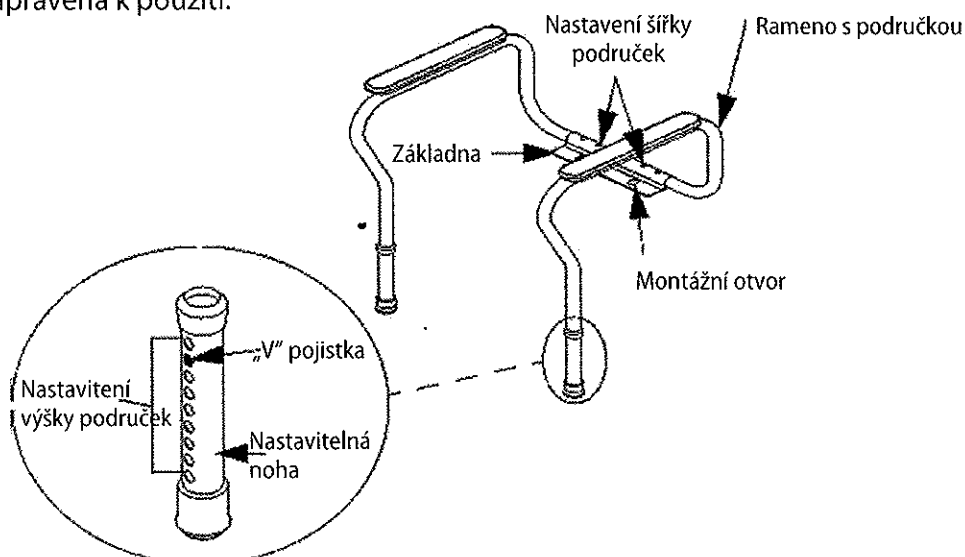
Při manipulaci nebo skládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Před každým použitím překontrolujte stav a správné zajištění všech jisticích prvků.

Podpěru nikdy nepřetěžujte a nepřekračujte její maximální nosnost 80 kg (viz štítek na produktu).

INSTALACE A NASTAVENÍ PODPĚRY

Odmontujte toaletní prkénko s víkem z mísy WC. Nasadte základnu rámu (1) na mísu tak, aby se její otvory vzájemně překrývali s otvory na míse a skrz ně přimontujte prkénko s víkem zpět. Ujistěte se, že jsou šrouby řádně dotaženy a základna se nehýbe. Stiskněte „V“ pojistku v zadní části ramena (2), které vložte do bočního otvoru základny tak, aby se pojistka opět bezpečně zaklapla ve zvolené poloze zpět. Zvolte optimální šířku područek a stejný postup opakujte u druhého ramena. Výšku podpěry nastavte zmáčknutím „V“ pojistky na každé noze a vysunutím nohy nahoru nebo dolů tak, aby obě područky byly ve vodorovné poloze, kterou bezpečně zajistíte zpětným zaklapnutím pojistek. Překontrolujte zaklapnutí všech pojistek a dotažení šroubů základny. Podpěra je připravena k použití.

**ÚDRŽBA**

Podpěru lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce.