

NÁVOD K POUŽITÍ CHODÍTKA



ČTYŘBODOVÉ PEVNÉ JMC-C 3201/3202

3201 (bronz)



3202 (stříbrná)



ČTYŘBODOVÉ KROKOVACÍ JMC-C 3211/3212

3211 (bronz)



3212 (stříbrná)



ČTYŘBODOVÉ DVOUFUNKČNÍ FS 913L

913L BR (bronz)



913L SL (stříbrná)



DVOUKOLOVÉ JMC-C 3016W5

3016W5 BR (bronz)



3016W5 SL (stříbrná)



POUŽITÍ

Chodítko je určeno pro osoby se zdravotním postižením pohybového ústrojí a pro osoby, které potřebují oporu při chůzi, a může být použito pro ty, kteří se učí chodit po nemoci nebo úrazu. Slouží jako pomoc pro udržení rovnováhy a přenášení váhy těla při nemocech ortopedických a po úrazech. Je určeno výhradně pro použití na rovných plochách uvnitř budov.

Technika chůze se liší dle typu chodítka:

Pevné – chodítko nadzvednout, posunout dopředu a následovně dosunout končetiny.

Krokovací – nadzvednout a posunout dopředu postupně jednu a pak druhou stranu chodítka a dosunout končetiny.

Dvoufunkční – možno používat jako pevné anebo krokovací.

Dvoukolové – lehce nadzvednout zadní část chodítka, popojet, chodítko postavit a dosunout končetiny.

ÚVOD

Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy (viditelné a hmatatelné poškození, např. praskliny). Pokud tomu tak je, kontaktujte prosím prodejní místo. Poškozený výrobek nepoužívejte! Upozorňujeme, že při používání poškozeného výrobku může dojít k úrazu!

Důležité je, abyste si přečetli tuto příručku, která obsahuje důležité informace.

Máte-li dotazy ohledně používání výrobku, kontaktujte nás.

Rádi bychom také zdůraznili, že pokud si nejste jistí o vhodnosti používání této pomůcky vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben ze zesíleného eloxovaného hliníku. Rukojeti z měkké pěny zajišťují stabilní uchopení u a komfort použití. Výška chodítka může být přizpůsobena výšce uživatele díky nastavitelným nohám. Pryžové násadce zabraňují uklouznutí. Po složení zabírá málo prostoru, což usnadňuje uskladnění a přepravu. Dvoufunkční typ má možnost aretace kloubového mechanismu - je možno měnit funkci chodítka z krokovacího na pevné. Dvoukolový typ je vybaven plnými předními koly o průměru 5".


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	JMC-C 3201/3202	JMC-C 3211/3212	FS 913L	JMC-C 3016W5
celková šířka (cm)	50	52	46	62
vnitřní šířka (cm)	45	47	44	44
celková hloubka (cm)	48	48	47	49
výškové nastavení (cm)	80-96	80-96	78-96	81-98
hmotnost (kg)	2,7	2,8	2,4	3
nosnost (kg)	136	136	100	136

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ CHODÍTKA

Chodítko rozložte rozevřením boků chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zapadne bezpečnostní pojistka (b), chráněná plastovou krytkou, umístěná na horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka zmáčkněte bezpečnostní pojistku (b) a tlačte boky chodítka směrem k sobě.

- a. Rukojeti
- b. Bezpečnostní pojistka pro složení chodítka
- c. Aretační krokování (pouze typ FS 913L)
- d. Aktivace krokování (pouze typ FS 913L)
- e. Výškové nastavení - pojistka
- f. protiskluzové násadce
- g. kolečka (pouze model JMC-C 3016W5)

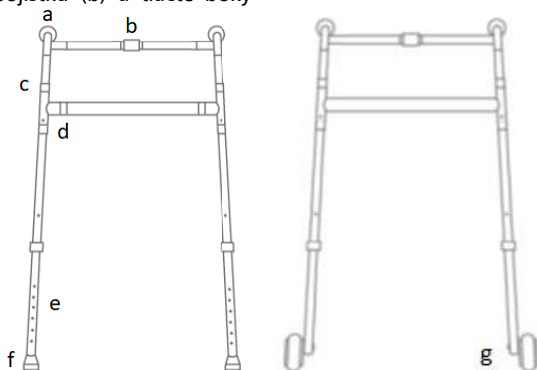

JMC-C 3016W5

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

Výška by měla být nastavena na takové úrovni, aby uživatel opřený na madlech, stál vzpřímeně, na kolik mu to jeho zdravotní stav dovolí, s rukama v klidové poloze a lokty mírně pokrčenými. Není dovoleno opírat se o chodítko celou hmotností těla.

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy (e). Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze. Nastavení je možné v intervalech po 2,5cm.

Ujistěte se, že všechny nohy jsou nastaveny na stejnou výšku.

ZMĚNA FUNKCE KROKOVÁNÍ – pouze u modelu FS 913L

- Statická funkce - vyjměte aretační svorky umístěné na vodorovné vzpěře rámu (d), a vložte je do otvorů na svislém rámu (c).
- Krokovací funkce - aretační svorky vložte zpět do otvorů na vodorovné vzpěře rámu (d).

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Chodítko smí používat pouze jedna osoba zároveň.
- Při prvním použití může být nutná asistence třetí osoby, bez ohledu na zdravotní stav uživatele.
- Není dovoleno stoupat a zavěšovat se na chodítko.
- Není dovoleno žádným způsobem upravovat chodítko, protože to může způsobit nehodu.
- Nepřekračujte maximální nosnost chodítka.
- Chodítko je určeno pro použití na rovném povrchu s max. sklonem 5%
- Není dovoleno používat chodítko na mokré, kluzkém nebo písčitém povrchu.
- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy konstrukce. Veškeré opravy musí být provedeny kvalifikovaným servisem či výrobcem.
- Není dovoleno montovat na dvoukolové chodítko další kolečka. Chodítko nemá brzdy. Taková úprava může být příčinou úrazu.
- Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků!
- Neskladujte při minusových teplotách a velmi vysoké vlhkosti.

Upozornění: Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody či úrazy způsobené použitím výrobků v rozporu s touto instrukcí a účelem použití.

ÚDRŽBA

Nejméně jednou za 3 měsíce je nutno provést vizuální kontrolu všech jistících částí výrobku s důrazem na:

- spojovací součástí (závěsy, klouby)
- aretační pojistky pro nastavení výšky a funkce krokování
- stabilitu a vzhled rámu (praskliny apod.)

Rám chodítka je potřeba pravidelně čistit vlhkým hadříkem, s použitím běžných šetrných čistících prostředků (např. mýdlo). Není dovoleno používat prostředky, které obsahují rozpouštědla, benzín, ředidla, bělicí prostředky a prostředky způsobující mechanické narušení povrchu. Po očištění chodítka vždy řádně osušte.

Doporučujeme pravidelnou kontrolu protiskluzových násadců. V případě opotřebení proveďte výměnu za nové.

ZÁRUKA A SERVIS

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

Důležité upozornění: Firma Distrimed s.r.o., výhradní dovozce výrobků značky Timago do ČR prohlašuje, že námi dovážené výrobky splňují veškeré normy platné v České republice. Tyto výrobky, určené pro ČR, se dají identifikovat dle výrobního čísla na výrobku, a jsou dodávány s návodem k použití, na kterém je uveden jako dovozce firma Distrimed s.r.o. Výrobky, které byly do ČR dovezené jinou cestou, nemusí splňovat veškeré normy platné v ČR, a výhradní dovozce nebude poskytovat na tyto výrobky záruční ani pozáruční servis.

	Referenční číslo		Výrobce
	Sériové číslo		Datum výroby
	Číslo skupiny		Zástupce v Evropské Unii
	Poznámka		Prosím přečtěte si návod
	Označení, že výrobce provedl posouzení shody výrobku v souladu s požadavky směrnice EU pro zdravotnické prostředky.		

Symbyly

Datum poslední revize návodu: 1.3.2018

Výrobce: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko

Výhradní dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827,
info@distrimed.cz, www.distrimed.cz