

TECHNICKÉ PARAMETRY:	Model: AR-028
Rám: hliníkový, skládací	Celkové rozměry š x d: 62-70cm
Nastavení výšky horních rukojetí: 101-116 cm Výška spodních rukojetí: 67cm	Šířka po složení: 25cm
Kola: průměr 8" (20cm), přední kola v otočných vidlicích	Kola plná, bezúdržbová, protiskluzová z PVC
Hmotnost: 8,9kg	Maximální hmotnost uživatele: 136kg
Standardní vybavení: brzda s parkovací funkcí	Nylonová nákupní taška 40x33x9cm, sedák 40x25cm, opěrka, držák hole/berle



ZÁRUKA A SERVIS

- 1) Záruku na tento produkt, zakoupený na území České republiky, zajišťuje firma Distrimed s.r.o. - distributor výrobků značky ARMEDICAL S.C. v ČR.
- 2) Pokud zjistíte, že produkt nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce, kde byl nákup proveden, nebo firmu Distrimed s.r.o., tel.: 558 712 577, reklamace@distrimed.cz. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Distrimed – sklad, reklamace, Třinec Konská, čp. 601, PSC: 739 61
- 3) Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé mechanickým poškozením (oděrky rámu, poškrábání plastových dílů), poškození vlivem opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, tj. například otěru pryžových násadců, koleček, plastových opěrek rukou apod.
- 4) Záruka zaniká v případě, kdy je produkt používán v rozporu s jeho určením a pokyny v návodu k použití, a také v případě, že uživatel překročí maximální přípustné zatížení stanovené výrobcem.
- 5) Záruka zaniká při jakékoliv konstrukční úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.
- 6) Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a skladování a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí, a také při překročení uživatelem maximální nosnosti stanovené výrobcem.

Reklamovaný výrobek musí být v řádném hygienickém stavu.

Distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz, www.distrimed.cz

ARMEDICAL[®]
HomeCare Line

NÁVOD K POUŽITÍ

Chodítka čtyřkolové předloketní SUPPORT Model: AR-028



 **ARMEDICAL S.C.**
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





NÁVOD K POUŽITÍ – Chodítko čtyřkolové předloketní SUPPORT

Vážení zákazníci,
děkujeme za nákup našeho produktu, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste do nás vložili. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že náš výrobek splní Vaše očekávání. Věříme, že bude významnou pomocí, díky které vám bude mnohem jednodušší pohybovat se doma i při každodenních procházkách. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití, je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy. Uchovávejte prosím tuto příručku.

Účel použití:

Rehabilitační chodítko je pomocné a rehabilitační zařízení určené pro osoby se zdravotním postižením s pohybovými poruchami, problémy se vstáváním nebo problémy s udržováním rovnováhy při chůzi. Používá se také k udržení rovnováhy při učení se chodit po nemoci nebo zranění.



Kontraindikace:

Kontraindikace vzpřímeného stoje, úrazy a dysfunkce horních končetin znemožňující oporu na chodítku, zhoršená motorická koordinace, problémy s labyrintem, nestabilita páteře.



Varování a doporučení

Abyste se vyhnuli nehodě, prosíme o:

- 1) Kontrolu, zda jsou všechny prvky rámu (13) rovné, bez poškození (např. během přepravy)
- 2) Kontrolu, zda jsou obě držadla/rukojeti (9) ve stejné výšce a dobře zajištěné
- 3) Kontrolu, zda chodítko obsahuje všechna čtyři kola (7) a (12)
- 4) Kontrolu, zda jsou kola bezpečně přišroubována (7) a (12)
- 5) Kontrolu, zda jsou všechny prvky nosného rámu pevně spojeny (13)
- 6) Kontrolu, zda jsou pružinová tlačítka zajišťující nohy se zadními koly (12) v otvorech a jsou zajištěna
- 7) Kontrolu, zda jsou šrouby zajišťující přední kola (7) bezpečně utaženy



Abyste předešli zranění:

- 1) Chodítko musí být zcela rozloženo (sedák je rovný, není prohnutý do oblouku).
- 2) Před každým použitím je nutné zkontrolovat stabilitu chodítka.
- 3) Rukojeti (držadla) (9) musí být nastavena ve stejné výšce pomocí tlačítek (15).
- 4) Chodítko používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu. Nepoužívejte na schodech!
- 5) Buďte zvláště opatrní na mokřích, kluzkých površích.
- 6) Při pohybu buďte obzvláště opatrní na ležící koberečky, oděvy, hračky atd., a také ležící zvířata, nerovné, povrchy s prasklinami, nerovné chodníky, obrubníky atd.
- 7) Chodítko **musí** být vždy drženo oběma rukama! Ruce pevně svírají držadla s možností rychlého zatáhnutí za rukojeti brzdy.
- 8) Chodítko nesmí být vystaveno dlouhodobým extrémním povětrnostním podmínkám (např. velmi silný mráz nebo přímé silné sluneční záření).
- 9) Chodítko nepřetěžujte, nepřekračujte maximální zatížení povolené výrobcem.
- 10) Nesmí být překročeno maximální přípustné zatížení košíku/tašky (3)
- 11) Před použitím se poraďte s lékařem.

Případně se poraďte se svým lékařem, fyzioterapeutem nebo prodejním místem ohledně konkrétních pokynů pro správné použití.

Pokyny k údržbě:

Pravidelně čistěte hadříkem navlčeným vodou s jemným čistícím prostředkem. Poté důkladně utřete/vysušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky!

Brzdová lanka, prvky (kola, rukojeti) jsou díly podléhající opotřebení a musí být vyměněny, pokud je zjištěno nadměrné opotřebení. Na výše uvedené prvky se záruka nevztahuje. Jakékoli uvolněné šroubové spoje a seřízení brzd jsou v odpovědnosti uživatele a nejsou důvodem k reklamaci.

Plán údržby:

Týdně: Zkontrolujte brzdu, zda není vadná, zkontrolujte všechna kola, zda nejsou uvolněné šrouby, matice a osy kol.

Pravidelně kontrolujte opotřebení rukojetí, utažení šroubů rámu, utažení šroubů přední a zadní osy, kontrolu „únavy“ součástí, zda nejsou opotřebené nebo prasklé

Ročně: Jednou za rok se doporučuje zaslat chodítko do autorizovaného servisního střediska, nechat provést kompletní kontrolu, servis a promazání všech pohyblivých částí.

1. Vyjměte všechny díly z obalu (všechny díly podpěry zobrazené na fotografii)



2. Vezměte přední kolo/a a umístěte ho objímkou do trubky



3. Vložte šroub do otvoru v horní části trubky / objímky kola a pevně utáhněte šroub černou maticí.



4. Uchopte část rámu se zadním kolem a zafixujte nohu pomocí pružinového tlačítka, přičemž dbejte na to, aby pružinové tlačítko bylo zajištěno ve správné poloze (v otvoru hlavního rámu)



5. Nainstalujte brzdový systém na trubku loketní opěrky nastavte ji na požadovanou délku, poté utáhněte a zavřete svorku trubky loketní opěrky.



6. Nainstalujte držák na hůl /berli na levou konzoli hlavního rámu.



7. Připněte lanka podle osobních preferencí.



Komponenty:

1. ruční brzda s parkovací pojistkou
2. nastavitelná loketní opěrka
3. opěradlo
4. nákupní taška
5. šroub zajišťující přední kola
6. přední vidlice
7. kola 20cm (8") z PVC
8. horní rukojeti
9. loketní opěrky z PU pěny
10. spodní rukojeti
11. sedák
12. noha se zadním kolem, s přítlačnou brzdou
13. hliníkový rám - hlavní
14. brzdová lanka
15. tlačítka pro nastavení výšky loketních opěrek



Odstraňování problémů:

V případě jakýchkoli problémů si přečtěte tuto kapitolu. Pokud to nepomůže, kontaktujte prosím prodejní nebo servisní místo. Opravovat chodítko svépomocí je **ZAKÁZÁNO !!!**

I. Chodítko je nestabilní.

- a. Jsou obě loketní opěrky (9) ve stejné výšce? Pokud ne, nastavte je správně (tlačítko 15).
- b. Jsou svorky pro nastavení horní rukojeti (8) bezpečně zajištěny? Pokud ne, zablokujte je.
- c. Je chodítko zcela rozloženo? Pokud ne, rozložte jej, dokud nebude sedák zcela rovný.
- d. Jsou všechna kola utažena / upevněna? Pokud ne, pevně je utáhněte / upevněte.
- e. Jsou všechny části nosného rámu (13) navzájem pevně spojeny? Pokud ne, kontaktujte prosím své prodejní místo. **CHODÍTKO NEPOUŽÍVEJTE!!!**

Každá **závažná** událost související s tímto zdravotnickým prostředkem by měla být hlášena výrobcí, Úřadu pro registraci léčiv, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků.

Ukončení používání:

Odstraňte tašku a poté chodítko složte vytažením sedáku směrem nahoru a následným stažením levé a pravé části chodítka směrem k sobě.

Čištění a skladování:

1. Uchovávejte chodítko na místo, kde nebude vystaveno mechanickému poškození.
2. V případě znečištění postupujte podle odstavce „Pokyny k údržbě“ tohoto návodu.

DĚKUJEME ZA VÝBĚR A ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU

