

CZ

carlett.

Senior



Senior

COMFORT PRO

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt Carlett. Nezapomeňte si uschovat účtenku, protože je to váš jediný doklad o zakoupení výrobku, potřebný pro uplatnění případné reklamace.

Jakákoli vada vyplývající z nesprávného používání výrobku uživatelem a možného normálního zhoršení některých komponent (kol a textilních součástí) v důsledku opotřebení výrobku jsou ze záruky vyloučeny .

Před použitím vozíku si prosím pozorně přečtete návod k jeho správnému použití.

Doufáme, že se vám tento produkt, který byl navržen tak, aby pomohl zlepšit kvalitu života svých uživatelů, bude líbit .

Děkujeme!

Chod'te, nakupujte a bezpečně si sedněte.

Pomocný vozík umožňuje uživateli bezpečně chodit a nakupovat. Můžete se posadit a odpočívat, kdykoliv je to nutné.

Má bezpečnostní nebo parkovací brzdou, která je nezbytná pro použití vozíku jako sedadla. Chcete-li aktivovat bezpečnostní brzdou, zatáhněte za rukojeť brzdové páky dozadu. Chcete-li odbrzdit a znovu se rozjet, zatlačte páčku dopředu (viz obrázek č. 1).



Image 1. Safety brake

Obraz 1. Bezpečnostní brzda

Obsahuje okamžitý brzdový systém, který se aktivuje zatažením rukama, dokud se vozík nezastaví. Chcete-li ji deaktivovat a/nebo pokračovat v chůzi, jednoduše přestaňte tahat za brzdovou páku (viz obrázek č. 2).

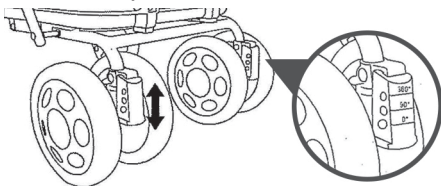


Image 2. Instant brake

Obrázek 2. Okamžitá brzda


Výrobek má také systém pro nastavení stupně otáčení dvou předních otočných kol podle vaší

potřeby. Kola mohou být kompletně pevná, s otočením o 90° nebo plně otočná (360°). Chcete-li změnit stupeň natočení, stiskněte seřizovací mechanismus umístěný v předním kole a nastavte jej podle potřeby (viz obrázek č. 3).



Obrázek 3. Rotující kola

Má výškový nastavovací mechanismus pro říditka se třemi polohami. Chcete-li změnit výšku, odstraňte blokátory z otvorů umístěných vlevo a vpravo od říditek, přesuňte je do požadované výšky a znovu je zajistíte zavedením blokátorů do správných otvorů na obou stranách (viz obr. č. 4).

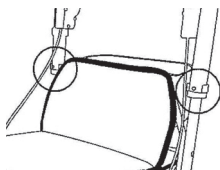


Obrázek 4.
Nastavitelná rukojeť



Obrázek 5. Deštníková podpora

Obsahuje stojan na deštníky, který lze upevnit pomocí popruhu (viz obrázek č. 5).

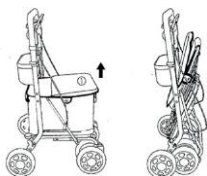

Obrázek 6. Skládací systém

Uložení a skládání výrobku: Pouze vytáhněte sedadlo za polštář směrem nahoru (viz obrázek č.6).

Má odnímatelnou vnitřní tašku s ručkami, která se snadno čistí.

Materiál

- Podvozek: hliník
- Textilní komponenty: Polyester

- Kola: materiál EVA (tento materiál zaručuje, že kola jsou tichá i na drsném povrchu).
- Pneumatiky: polypropylenový plast

Specifikace

- Rozložený produkt: Š-49,5 x D-65 x
- Výška 86-96 cm
- Složený výrobek: Š-49,5 x D-43,5 x V-87 cm
- Rozměry sedáku: Š-35.5 x D-30 cm
- Maximální zatížení sedadla: 100 kg
- Maximální zatížení v odnímatelném vnitřním vaku: 15 kg
- Čistá hmotnost podvozku: 6,2 kg

Údržba

Pro každodenní údržbu používejte suchý hadřík. Pokud potřebujete odstranit skvrny, doporučujeme použít neutrální čisticí prostředek a skvrnu setřít ručně.

Za účelem prodloužení životnosti výrobku je nutné pokud např. zmoknul na dešti nebo je mokrý, osušit kovové části suchým měkkým hadříkem.

Doporučení

Má se za to, že tento výrobek splňuje požadavky Essen – tial a příslušná ustanovení směrnice ES: směrnice (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Společnost nenese odpovědnost za žádné jiné použití produktu.

Nepohybuje vozíkem, když na sedadle sedí osoba.

Maximální hmotnost, kterou taška pojme je 15 kg. Těžší předměty dávejte vždy na dno tašky.

Zvláštní opatrnosti dbejte při používání výrobku na rampě nebo na ulici se sklonem. Nezapomeňte použít ruční brzdu k ovládní vozíku.

Zvláštní pozornost věnujte používání vozíku na mokřém nebo kluzkém povrchu. Před použitím sedadla zkontrolujte, zda je zatažena bezpečnostní nebo parkovací brzda. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, s ním manipulovat a/nebo na něj lézt. Nepoužívejte vozík k přepravě domácích zvířat. Neuchovávejte vozík na místech, která jsou vlhká, velmi horká nebo vystavená přímému slunečnímu záření, protože to může zkrátit životnost výrobku.

Výhradní dovozce pro ČR a SR

Nikaro S.R.O.

Průhonická 127

251 01 Čestlice

IČ:11675047

DIČ:CZ11675047

**Infolinka:+420
773111269**

www.dokose.cz