

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKY DO SPRCHY

4300 C

Katalogové číslo:
4300 C



POUŽITÍ

Sedačky do sprchy jsou součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde klient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavený sprchový kout. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny, snižují svalovou únavu v důsledku stání a ulehčují manipulaci s pacientem. Výrazným způsobem tak zvyšují soběstačnost a eliminují riziko pádu a zranění.

INDIKACE

Uživatel by měl být schopen samostatného sedu na sedačce a mít nezbytné fyzické, vizuální a kognitivní dovednosti pro jeho používání. Snížená schopnost bezpečného stoje ve sprše z důvodu zhoršené funkce dolní končetiny s omezenou nebo chybějící hybností a svalovou silou a/nebo zhoršené vestibulární funkce nebo sklonu k pádu z jiné etiologie při současné adekvátní stabilní poloze trupu pro sezení a dostatečných reziduálních funkcích horních končetin.

KONTRAINDIKACE

Uživatel by neměl mít poruchu vnímání, koordinace nebo závažnou ztrátu rovnováhy. Sedačku nedoporučujeme používat uživatelům, kteří trpí závažnými psychomotorickými nebo motorickými koordinačními patologiemi, stařeckou demencí, mentálním omezením nebo slabozrakostí a slepotou. V těchto případech je vždy nutné sedačku používat pouze s dopomocí a za přítomnosti odborné asistence!



POZOR

V případě alergických reakcí, zarudnutí kůže, popř. vzniku otlaků, neprodleně vyhledejte lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Vždy je potřeba zohlednit fyzické i psychické schopnosti uživatele a jeho individuální potřeby.

Pro co nejbezpečnější používání sedačky vždy upravte prostředí, kde ji budete používat.

Sedačka by měla být nejprve odborně zaměřena a při předání uživateli individuálně nastavena.

Před prvním použitím sedačky si pečlivě přečtěte tento návod a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele. Pokud z důvodu zrakového omezení si není možné návod přečíst, vyžádejte si elektronickou verzi k přečtení softwarovou aplikací nebo osobní instruktáž.

Sedačku používejte vždy jen v souladu s návodem k použití. Za následky způsobené používáním v rozporu s tímto návodem nenese dodavatel žádnou zodpovědnost.

Při sestavení a instalaci sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 160 kg (viz výrobní štítek na produktu).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 120 kg.

Sedačku nikdy nepoužívejte, pokud je jakkoliv poškozená nebo jsou patrné známky výrazného opotřebení.

Před každým použitím zkontrolujte bezpečné a stabilní umístění sedačky.

Při užívání sedačky musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.

Pro zachování maximální stability a bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav jisticích prvků.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madly.

POPIS

Zesílený rám sedačky je vyroben z vylehčených duralových trubek a je doplněn prostorným plastovým hygienickým sedátkem a plastovou opěrkou zad pro zlepšení stability. Opěrné nohy jsou vyztuženy zpevňujícím křížem a umožňují výškové nastavení sedátka a ve spodní části jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

**POZOR**

Obrázky uvedené v návodu slouží pouze k upřesnění pokynů a mohou se od dodávaného výrobku lišit.

VYBALENÍ SEDAČKY A UVEDENÍ DO PROVOZU

Všechny sedačky jsou výrobcem pečlivě kontrolovány a zabaleny pro dodání uživateli. Před tím, než sedačku rozbalíte se ujistěte, že obal není poškozen. Po vybalení sedačky z obalu zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny její části, tj. smontovaný zesílený rám (3) s protiskluzovými pryžovými nástavci (4) a plastovou sedačkou (2), obě trubky s plastovou opěrkou zad a dvěma připevňovacími šrouby (1), včetně uživatelské příručky pro bezpečné používání sedačky. Po důkladné kontrole sedačky ji autorizovaný odborník dodavatele smontuje, nainstaluje, předá uživateli pokyny ohledně důležitých upozornění bezpečného provozu v souladu s tímto návodem a ujistí se, že uživatel těmto pokynům rozumí.

**POZOR**

Obalový materiál a další různé ochranné části musí být ekologicky zlikvidovány!




MONTÁŽ SEDAČKY

Sedačka je předmontovaná a dle potřeby je nutné připevnit pouze trubky s opěrkou zad (1 + 5). Zmáčkněte aretační „V“ pojistku (2) a obě trubky rámu opěrky zad (1) zasuňte do všech čtyř připravených otvorů (3) v rámu sedačky (4). Po zasunutí pozici zafixujte uvolněním aretačních „V“ pojistek a přesvědčte, že jsou v otvorech pevně aretovány. Nasuňte opěrku zad (5) současně na obě trubky (1) a přivneste ji zašroubováním obou přiložených šroubů (6) po směru hodinových ručiček. Před prvním použitím se ujistěte se, že je zádová opěrka bezpečně a stabilně připevněna a „V“ pojistky aretovány v příslušných otvorech.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDAČKY


Pro nastavení výšky sedu zmáčkněte aretační „V“ pojistku (7), tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a pozici zafixujte samovolným zapadnutím pojistky (7). Postup opakujte u všech čtyřech nohou, které musí mít výšku nastavenou stejně a před použitím se ujistěte, že je sedačka v horizontální poloze!

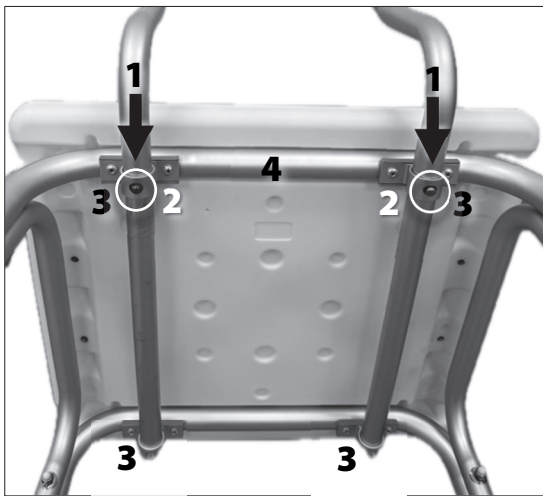

Zasunutí trubek opěrky zad.



Připevnění opěrky zad.

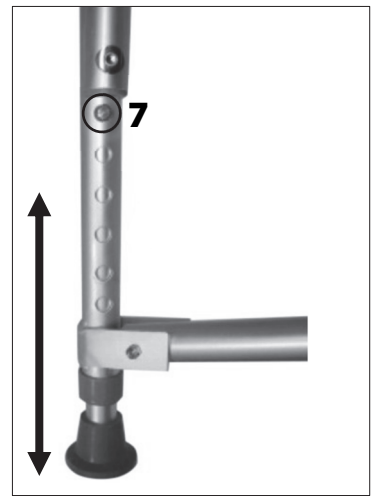

Nastavení výšky sedu



POZOR

Před každým použitím zkontrolujte bezpečné a stabilní umístění sedačky a správnou aretaci všech pojistek. Výška sedu by měla být shodná s výškou podkolenní jamky od země. Při sedu by tak kolenní i kyčelní kloub měl svírat pravý úhel 90°. Optimální výšku sedu vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem. Doporučujeme kombinovat s madly pro vstávání pro vstávání a protiskluzovou podložkou.

ÚDRŽBA

Sedačku po každém použití hygienicky ošetřete. Čistěte omytím vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1 min | 85 °C). Pro zachování maximální funkčnosti sedačky doporučujeme pravidelně kontrolovat všechny jistících prvky a aretační pojistky, stav pryžových nástavců a odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti jakoukoliv opotřebovanou část vyměňte. K opravě je nutné použít pouze originální náhradní díly. V opačném případě zaniká jakákoliv záruka a dodavatel se zříká veškeré zodpovědnosti v případě nehody nebo zranění. Je-li potřeba důkladnější kontrola technického stavu nebo oprava, vždy kontaktujte pouze autorizované servisní středisko, které Vám poskytne veškeré informace a servis. Sedačku skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.

LIKVIDACE

Ekologická likvidace sedačky se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení. Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na místním městském nebo obecním úřadě. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na dodavatele.