

PŘEDMLUVA

Před použitím tohoto výrobku doporučujeme, abyste si přečetli všechny informace uvedené v tomto návodu k použití. Konstrukce a vylepšení výrobku jsou v souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Tyto pokyny jsou pouze vodítkem a nenahrazují protokoly a postupy, které navrhl váš koordinátor pro manuální manipulaci.

POPIS VÝROBKU

EZ-250 je lehké, skládací zařízení pro přepravu pacientů plachtového typu, které pomáhá pacientovi při otáčení v posteli, při přemísťování mezi postelí, invalidním vozíkem, toaletním křeslem a při přesunu pacienta směrem nahoru v posteli.


SPECIFIKACE VÝROBKU

EZ-250	
Velikost ($\pm 3\%$)	50x60 cm (rozložená)
Čistá hmotnost	0,45 kg

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před přenosem pacienta se ujistěte, že jsou postel i invalidní vozík nebo jiné sedací zařízení bezpečně zajištěny.
- Pro účely přenosu se důrazně doporučuje, aby všechny povrchy byly ve vyrovnané poloze a nebyly mezi nimi žádné mezery.
- Nesterilizujte EZ-250 při vysoké teplotě.
- EZ-250 očistěte povrchovým dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte vysoce teplotní sterilizace.
- Bezpečné pracovní zatížení je 120 kg

NÁVOD K OBSLUZE

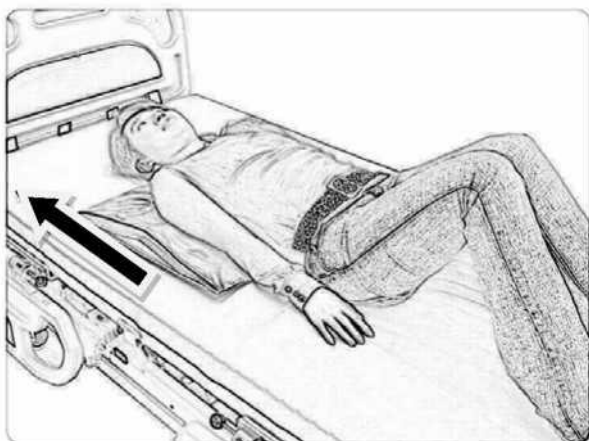

EZ-250 lze použít pod ramena jako pomůcku pro snížení tření, které pomáhá při přesunu pacienta směrem nahoru v posteli.



EZ-250 lze použít pod boky k usnadnění otáčení pacienta v posteli. Aktivní pacienti mohou EZ-250 používat sami, ale mohou ho používat i méně aktivní pacienti za asistence pečovatele.



EZ-250 lze použít pro přesun na / z invalidního vozíku.

VÝKRES A SEZNAM ČÁSTÍ

Vnitřní podložka s povrchem s velmi nízkým třením



Venkovní rolovací protipožární zpomalovací plachta

KONTROLNÍ SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ

Položka	Obsah kontroly a požadavky na bezpečnost	Výsledek kontroly	Komentář
1	Jsou uvedené informace o zákazníkovi úplné?	OK	
2	Je zobrazený jazyk stejný jako požadoval zákazník?	OK	
3	Ujistěte se, že jsou všechny základové šrouby bezpečné a nástroj je v dobrém stavu	OK	
	Potvrďte, že jsou připevněny všechny výstražné značky a označení.	OK	
5	Povrchy, hrany nebo rohy byly zbaveny otřepů	OK	
6	Typový štítek	OK	
7	Značka CE	OK	
8	Návod k použití	OK	
9	Zkontrolujte bezpečnostní prvky odkazující na TCF	OK	
10	Podepsané ES prohlášení o shodě	OK	

ES prohlášení o shodě

Níže podepsaný, Terry Kuo, zastupující EZ-Care Solution Co. Ltd., 5F., No. 15, Lane 548, RueiGuang Rd., Neihu District, Taipei, Tchaj-wan (Čína) 114; dodavatel prohlašuje, že výrobky popsané níže:

Systém pro přesun pacientů EZ-Go


Model:

EZ100/100P/110/150/150P/200/211 řady /215/221/230/250 Podložka na přesun pacienta
 EZ-115 Sada pro domácí péči
 EZ-300/EZ-410 Otočný polohovací polštář
 EZ-510/520/EZ-510 Deska pro přesun typu motýl
 EZ-600 (6 směrná) Multifunkční podložka pro přesun pacienta
 EZ-610 (6 směrná plus) Multifunkční podložka pro přesun pacienta
 EZ-710 Evakuační křeslo pro přesun pacienta
 EZ900/905/910/915/925/900B/900C/905B/901B/915B/925B Pás pro přesun pacienta
 EZ-950 Repoziční pás
 EVC-100/200/300 Nouzová evakuační lehká nosítka
 EVC400/EVC500 Nouzová evakuační podložka/Evakuační matrace

Systém prevence pádu CareWatch

Model:

OWG-MAT/CW400 Jednosměrná protiskluzová matrace
 PA-BED / PA-CHAIR bezpečnostní podložka s alarmem
 CW100 Nastavitelná pomocné madlo k posteli
 CW-300 Multifunkční chodítko

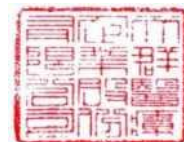

jsou prostředky třídy I dle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Pokud je používán a udržován v souladu s obecně uznávanými pravidly správné praxe a doporučeními v návodu k použití, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Pro nejvíce specifická rizika tohoto zařízení byla bezpečnost a shoda se základními požadavky směrnice posuzována na základě:

- Mezinárodní norma ISO 14971:2000.



Obelis s.a.

Bd General Wahis 53
 1030 Brussels, Belgie
 Tel: +3227325954
 Fax: +3227326003
 mail@obelis.net

výkonný ředitel

Podepsáno na Tchaj-wanu dne 14. července 2020