

NÁVOD K POUŽITÍ

ERGONOMICKÝ PÁS PRO PŘESUN

EZ 910




POUŽITÍ

Manipulační pás pro přesun je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen se sám přesunout nebo změnit polohu. Svou konstrukcí eliminuje možné riziko pádu při přesunu a výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem.

POPIS

Pás se skládá z vyztužené protiskluzové vnitřní vrstvy, je vybaven čtyřmi vertikálními a třemi horizontálními pevnými úchyty a fixuje se pomocí plastové přezky. Svým provedením ulehčuje pás přesun, otáčení, posazování, vstávání a chůzi pacienta. Lze také použít jako fixační pás. Doporučujeme kombinovat s přesouvacím prknem EZ 510, popřípadě kombinaci dvou pásů, kde ho používá i terapeut, aby se pacient mohl pohodlně chytit.

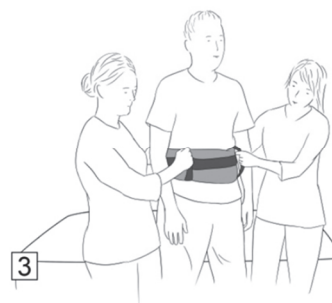

TECHNICKÉ PARAMETRY (± 3%)


Rozměry: 130×15 cm

Pro obvod hrudníku/pasu: 90–110 cm

Hmotnost: 0,6 g

Nosnost: 150 kg

Materiál: 100% Nylon (pás), PVC (výztuha)

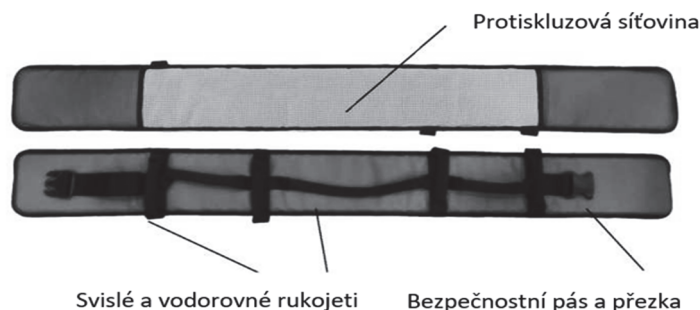

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním pásu si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele a konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci s pásem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pásu pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci nebo k znečištění pásu, doporučujeme ho ihned dezinfikovat.

Dbejte na to, aby se mezi pás a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.

V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Pás používejte výhradně pro účely, k jakým je určen.

Před použitím se ujistěte, zda obě plochy, mezi kterými budeme pacienta přesunovat, jsou stabilní, zabrzděné a ve vodorovné poloze.


Před použitím překontrolujte všechny švy, chyty a popruhy, a že je pás pevně zapnutý.

Během přesunu dbejte zvýšené pozornosti na hlavu, krční páteř a volné dýchací cesty.

Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 150 kg.

NÁVOD

1. Vstávání a přesun

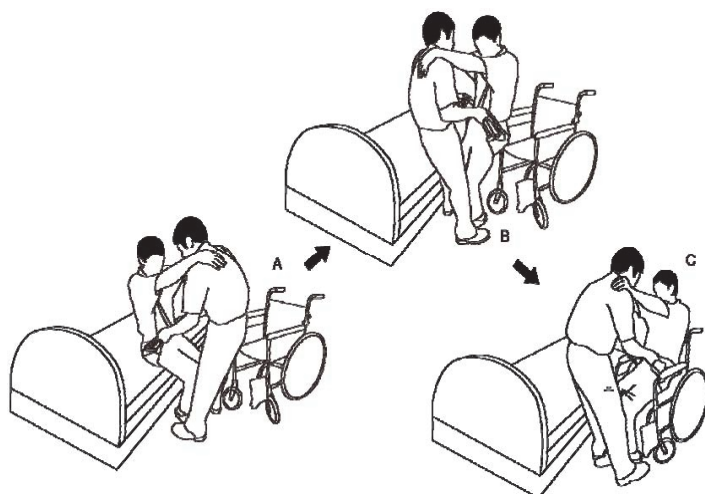


2. Asistence při chůzi



3. Bezpečnostní pás



Kombinace s přesouvacím prknem EZ 510

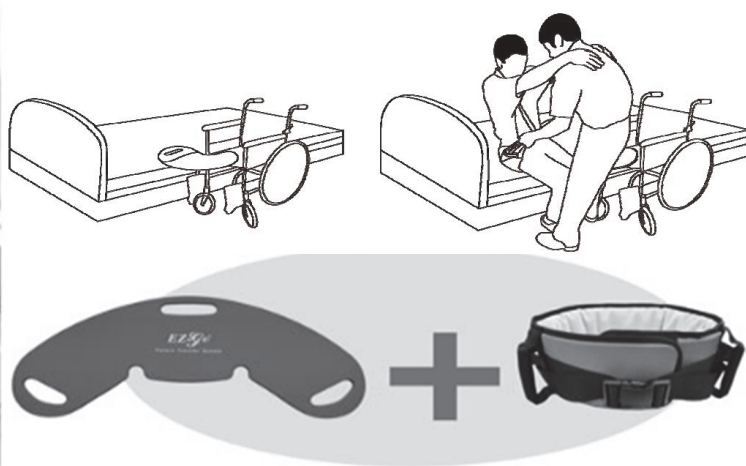

SKLADOVÁNÍ

Pás skladujte v horizontální poloze.

Pás nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA

Nebělte a nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty. Podložku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro standardní čištění omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Podložku je možné prát (max. 60° C), pouze zapněte sponu bezpečnostního popruhu a pás vložte do pracího pytle na prádlo. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě. Nesterilizujte při vysokých teplotách.



SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.