


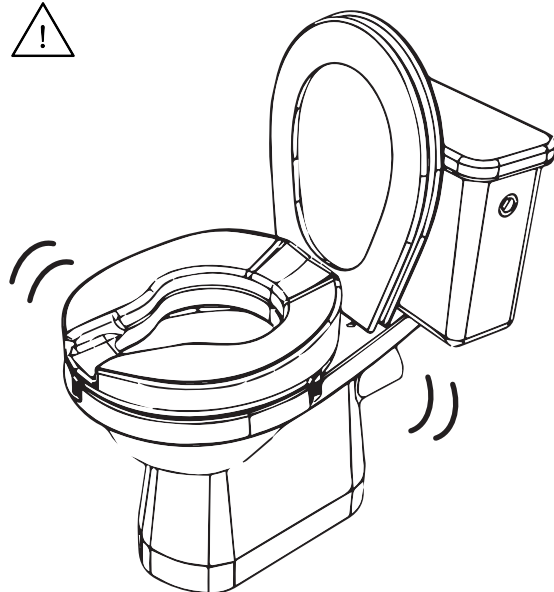

NÁVOD K POUŽITÍ INSTRUCTIONS FOR USE

CS NÁSTAVEC NA WC ASHBY POUŽÍVEJTE VŽDY V SOULADU S NÁVODEM K POUŽITÍ. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE, ŽE JE NÁSTAVEC BEZPEČNĚ A STABILNĚ PŘIPEVNĚN. VYMEZOVACÍ PATKY NASTAVTE TAK, ABY SE NÁSTAVEC NEMOHL POSUNOUT. UPEVNĚNÍ PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE. POZOR NA PŘÍLIŠNÉ PŘETAŽENÍ ŠROUBŮ.

EN ONLY USE ASHBY TOILET SEAT AS SHOWN. CHECK THE SEAT IS SECURE BEFORE EACH USE. BRACKETS SHOULD BE ADJUSTED TO GIVE A TIGHT FIT. PERIODICALLY CHECK FIT IS STILL TIGHT. AVOID OVER TIGHTENING BRACKETS TO STOP THE SEAT FROM RIDING UP.



ASHBY ZVÝŠOVACÍ NÁSTAVEC NA WC STANDARD, SUPER A DELUXE

Představujeme Vám nový produkt od Gordon Ellis.
Doufáme, že Vám pomůže v každodenním životě.



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE OBĚ STRANY TOHOTO NÁVODU.



CS POKUD SE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ STANE JAKÁKOLIV VÁŽNÁ NEHODA, NAHLAŠTE JI VÝROBCI - VIZ NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY.



MAXIMÁLNÍ NOSNOST




INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ


ČISTĚTE NEABRASIVNÍ UTĚRKOU A MÝDLOVOU VODOU NEBO V AUTOKLÁVU.

PH 5 - 9

Vaše ZVÝŠOVACÍ NÁSTAVCE NA WC ASHBY byly speciálně navrženy UK Design Team pro co možná nejjednodušší použití s účelem předejít zranění a zmírnit obtíže během dočasného nebo trvalého pohybového postižení. Pomáháme ulehčovat každodenní život.

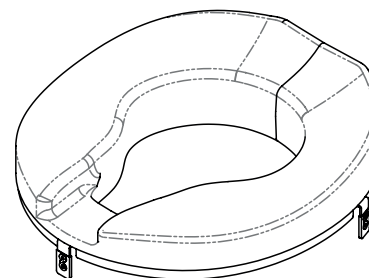

**ASHBY
STANDARD**

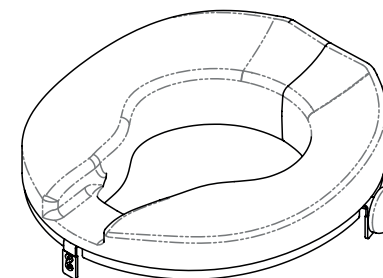

**ASHBY
SUPER / DELUXE**

MODELDELUXE JE DODÁVÁNÝ S VÍKEM

KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDETE NA
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare
 @EllisHealthcare



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT



DMA PRAHA S.R.O.,
KRAJANSKA 339, 149 00 PRAHA 4,
CZECH REPUBLIC



MD

IFU-REF 6202/0920-4-CS

PART REF

62..02.04.06.12.14.16.22.24.26
63..02.04.06.12.14.16.22.44.66

EC REP

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR,
TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA


KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDETE NA
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare
 @EllisHealthcare





ASHBY STANDARD ZVÝŠOVACÍ NÁSTAVEC NA WC

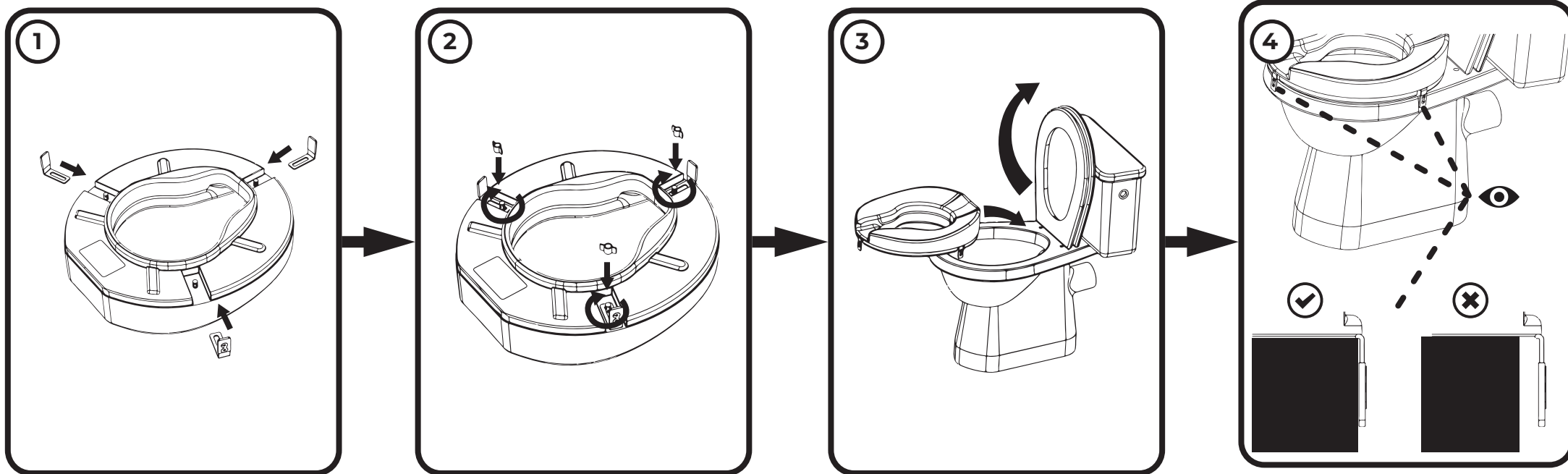

ASHBY SUPER / DELUXE ZVÝŠOVACÍ NÁSTAVEC NA WC

